

Закрытое Акционерное Общество

< ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ >

**Россия 127521, г. Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 619-26-38, факс. 618-51-31**

ПАСПОРТ

**Ширма медицинская
(с полимерными панелями)
ШМП-01-ЗМММ
ТУ-9452-018-32466639-97**

Назначение:


Ширма медицинская ШМП-01-ЗМММ предназначена для ограждения мест приема пациентов в кабинетах. Применяется для оснащения лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Технические данные:

Габариты:

длина	590мм
ширина	410мм
высота со спинкой	1830мм
масса не более	7,5кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет

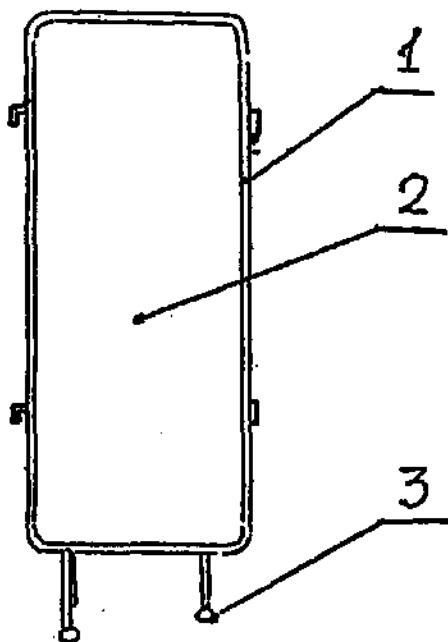

Комплект поставки:

Каркас (металлический) (поз. 1) – 1 шт.

Щит пластиковый (поз. 2) – 1 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

2. Положить каркас (поз.1) на бок и вставить щит пластиковый со стороны отгиба (поз.6) в держатели (паз.3), как показано на сечении A-A.

Примечание:

Конструкция ширмы позволяет устанавливать единое ограждение из нескольких ширм для чего: во втулки (поз.4)

установленной ширмы вставить соответствующие крючки (поз.5)

устанавливаемой ширмы.

Ширму устанавливать на ровном полу в вертикальном положении.

Хранение

Ширма должна храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 90%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части ширмы имеют защитное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости ширму подвергнуть дезинфекции 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением

полупроцентного моющего средства типа <Лотос>

или тампоном, смоченным 1-процентным раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-1689.

Тампоны должны быть отжаты.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок ширмы медицинской составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Дата выпуска

Представитель ОТК

