

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «МЕЗО-ЭКСПЕРТ»
Л.Н.Маменко
« 04 » мая 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

**Имплантат интродермальный MESOLINE BODYFIRM во флаконах по 5
мл,**

производства

MD Skin Solutions, Люксембург

1. ВВЕДЕНИЕ
2. СОСТАВ
3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

Имплантат интродермальный MESOLINE BODYFIRM – стерильный инъекционный имплантат, выпускается во флаконах, представляет собой комплексный биологический коктейль, обогащенный биосинтетической гиалуроновой кислотой. Имплантат предназначен для естественной реструктуризации и улучшения архитектоники дермальных структур, стимуляции регенерации и метаболических процессов кожи.

2. СОСТАВ

Основные компоненты

Карнитин 5.0%;
Кофеин 0.5%;
Экстракт артишока 2.0%;
Органический кремний 1.0%;
Центелла азиатика 1.0%;
Иглица шиповатая 1.0%;
Гиалуроновая кислота 0.23%.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Перед лечением пациент должен быть проинформирован о средстве, противопоказаниях к его применению и возможных побочных действиях.
- Запрещается использовать изделия с истекшим сроком годности, а также в том случае, если нарушена целостность упаковки.
- Гиалуронат натрия осаждается в присутствии четвертичных аммониевых солей (таких, как бензалкония хлорид), поэтому рекомендуется избегать контакта геля с такими веществами.
- Чувствительную кожу можно предварительно подвергнуть анестезии. Необходимо обратить внимание на то, что анестезия может вызвать местное покраснение или гиперчувствительность.
- Избегать гиперкоррекции.
- Пациентам следует строго воздерживаться от нанесения макияжа в течение минимум 12 часов после прохождения процедуры, а также от посещения сауны, турецкой бани и длительного воздействия солнца или УФ-лучей в течение 2 недель после прохождения процедуры. В течение недели пациентам следует избегать надавливания на области, подвергшиеся коррекции.

4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Формула специально разработана для коррекции целлюлита (эффекта апельсиновой корки), атонии кожи, возникших в результате старения и колебаний веса.

Меры предосторожности

Не используйте для пациентов:

- Имеющих гиперчувствительность к одному из химических ингредиентов. В случае сомнений, проведите аллергическую пробу перед употреблением продукта.
- Имеющих кожные заболевания или изменения на коже.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Острые воспалительные высыпания (акне, герпес) или проявления хронических кожных заболеваний в зоне предполагаемых инъекций.
2. Повышенная чувствительность к гиалуроновой кислоте и другим компонентам имплантата.

3. Наличие в анамнезе аутоиммунных заболеваний или проведение аутоиммунной терапии.
4. Наличие постоянного имплантата в зонах предполагаемой коррекции.
5. Беременность и лактация.
6. Возраст менее 18 лет.

6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Имплантаты могут вводить только дипломированные практикующие врачи. Работа должна проводиться в подходящих асептических условиях. Данные изделия предназначены для использования в медицинском кабинете.

Имплантаты должны вводиться только в здоровую, невоспаленную и продезинфицированную кожу.

В силу присущим имплантатам MESOLINE BODYFIRM характеристикам рекомендуется вводить интродермально, в соответствии с описанием.

Откройте флакон. Стерильным шприцом наберите необходимое количество имплантата. Медленно начните интродермальное введение материала путем многократных инъекций имплантата в средние слои кожи на глубину от 0,5 до 9 мм, с помощью техники «наппаж» (вся область введения покрывается небольшими объёмами препарата) или трассирующей линейной техники (контролируемое интрадермальное линейное введение в области проблемных зон).

Если игла закупоривается и инъекционное давление становится слишком высоким, немедленно прекратите введение и смените иглу.

После введения врачу следует мягко промассировать обработанную зону для равномерного распределения материала.

После использования шприц и оставшийся продукт должны утилизироваться.

Проводите 4-6 сеансов, 1 раз в неделю, для одной локальной зоны. Поддерживающий сеанс проводите 1 раз в течение 2-3 месяцев.

Количество материала зависит от индивидуальных потребностей, задачи и зоны лечения. Обычно однократно используется не более 2-х флаконов по 5 мл.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием проверяйте сроки хранения на упаковке.

Флакон предназначен для однократного применения и после вскрытия не подлежит хранению.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от 2 до 25°C.

Не замораживать. Не использовать по истечении указанного срока годности.

Избегать механических ударов и попадания ультрафиолетовых лучей.

Средний срок годности – не менее 3 лет после даты изготовления. Не использовать по истечении указанного срока годности.

Генеральный директор
ЗАО «МЕЗО-ЭКСПЕРТ»



Л.Н.Маменко

