

Инструкция по применению

Кабель подключения электродов для низкочастотных электротерапевтических процедур РС7ТВ-К-Ч
ТУ 9398-006-50034180-2015

Назначение изделия:

Кабель предназначен для подключения медицинских электродов к физиотерапевтическим аппаратам. Применяется в клиниках и лечебно-профилактических учреждениях.

Общие сведения:

Кабель представляет собой изолированный провод, имеющий на одном конце штекер для подключения к прибору, а на втором конце один или два (в зависимости от исполнения) штекера типа «банан» Ø 2 мм с ламелями SLS205-L MultiContact (красный или чёрный) с зажимом типа «крокодил» для подключения электрода.

Противопоказания к применению.

При использовании изделий в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении не обнаружено.

Меры безопасности:

Кабель – предназначен для многократного использования.

Необходимо соблюдать условия и сроки хранения изделия, который указан на этикетке.

Применять кабель по истечении срока хранения возможно только с разрешения технических служб, осуществляющих обслуживание медицинской техники в ЛПУ.

Кабель должен эксплуатироваться при температурах от +10 °С. до +40°С.

Подготовка изделия к работе.

- осмотреть кабель на предмет отсутствия механического повреждения изоляции провода или штекеров, а также соединения провода со штекерами. В случае обнаружения каких-либо дефектов – кабель подлежит утилизации;
- обесточить медицинский аппарат;
- соединить соответствующий штекер кабеля с медицинским аппаратом, проверить качество соединения;
- соединить штекер (зажим) кабеля с электродом;
- провести физиотерапевтическую процедуру.

По окончании процедуры:

- обесточить медицинский аппарат;
- отсоединить штекер (зажим) кабеля от электрода;
- провести дезинфекцию кабеля двукратным протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, 6% раствора перекиси водорода ГОСТ 177.

Вид поставки и маркировка на упаковке:

Кабель поставляется в индивидуальной упаковке, где изделие упаковано в ZIP -LOCK пакет и коробку из картона.

Хранение:

Срок хранения кабеля в потребительской упаковке предприятия-изготовителя 5 лет с даты изготовления.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69

(при температуре от +5° до +40°С и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий).

Гарантийный срок службы кабеля – не менее 1,5 лет с даты изготовления.

Утилизация

Использованные изделия складываются в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А, и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010.

Регистрационное удостоверение _____ от _____

Изготовитель:

ООО "ИНИСС-мед" 195196, Санкт-Петербург,
ул. Таллинская дом 7 лит. "О" Тел/факс: (812) 313-7668

иниссмед.рф
mail@iniss.ru

