

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «АЛЬЯНС КАЧЕСТВА»



Балуева О.Ю.  
200\_\_г.

## ИНСТРУКЦИЯ по применению

### **Аппарат терапевтический для липомоделирования RF Esthetics Device RFV1 с принадлежностями**

### **I Назначение:**

Используется для нехирургического омоложения и подтяжки кожи лица и тела, устранения морщин, целлюлита.

Значительные видимые изменения могут происходить уже после первой процедуры и усиливаются после нескольких сеансов. Эффект омоложения и лифтинга нарастает в течение 6 месяцев после курса процедур и сохраняется до 2 лет.

Рекомендуемый возраст от 20 до 60 лет. Может быть, применим к любому типу кожи.

Зоны воздействия: лицо, живот, спина, руки, ноги, ягодицы.

### **Действие:**

Воздействует на кожу, используя контролируемый глубокий разогрев тканей. Он позволяет переносить энергию и тепло в глубокие слои дермы и в подкожную клетчатку, защищая эпидермис от термического воздействия.

В результате глубокого контролируемого прогрева дермы, происходит укорочение волокон коллагена и их «сжатие». Это приводит к мгновенному видимому эффекту подтяжки кожи лица или другой зоны. Кроме того, после курса процедур происходит мощная стимуляция образования нового коллагена в дерме и ее глубоких слоях.

Одновременно с этим запускаются следующие процессы в коже и подкожно-жировой клетчатке:

- Восстановление энергетического равновесия, вследствие воздействия на самые корни проблемы;
- Стимуляция фибробластов и процессов выработки и омоложения коллагена;
- Увеличение скорости кровотока и улучшение микроциркуляции, устранение застоя крови в капиллярах;
- Восстановление эластичности и проницаемости стенок сосудов;
- Освобождение при целлюлите междуузельной ткани от отечной закупорки;
- Восстановление температуры, необходимой для начала расщепления жиров;
- Восстановление способности жировых клеток поддерживать правильный обмен жиров на цитоплазматической мембране;
- Прерывание процесса фиброза в подкожно-жировой клетчатке;
- Улучшение условий циркуляции и насыщения кислородом поврежденных анатомических структур;
- Восстановление естественных антивозрастных процессов, настоящее и полное омоложение кожи.

Все это приводит к изменениям в эластичности кожного покрова, позволяя улучшить качество состарившейся кожи, усилить антивозрастное воздействие и произвести новое моделирование кожи.

### **II Основные технические характеристики:**

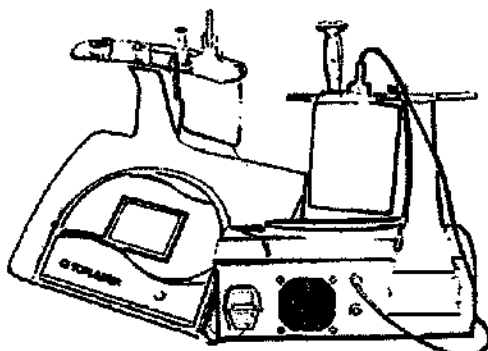


Иллюстрация 1. Целая структура единицы

1. Сменные электроды – 4 шт;
2. Пластина-электрод -1 шт;
3. Ручка-манипулятор – 1шт;
4. Сетевой шнур – 1шт.

#### Технические параметры:

Питание: 220 V ~ 50 гц;  
 Частота RF: 6 МГц;  
 Мощность: RF: 50 W  
 Способ воздействия: Непрерывно;  
 Охлаждение: воздушное принудительное.

#### **III Условия работы:**

1. Окружающая температура: 10-30°C ;
2. Относительная влажность: < 70 %;
3. Атмосферное давление: 860 hPa ~ 060hPa.

#### Транспорт и условия хранения:

1. Окружающая температура: 4 - 50;
2. Относительная влажность: < 93 %;
3. Атмосферное давление: 500 hPa ~ 060hPa;
4. Габариты: 489-мм x 421-мм x 398 мм;
5. Вес: 17,5 кг.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.

#### **IV Предостережения:**

1. Снять любые металлические украшения;
2. Держаться дальше от радио и другого передающего устройства;
3. Охлаждающий гель должен использоваться для защиты кожи во время обработки;
4. Держаться подальше от нагревателя и избегать контакта с легковоспламеняющимися материалами;
5. Постоянно перемещать насадку во время работы, чтобы избежать перегрева на области обработки кожи;
6. Обходить область сердца при использовании монополярного тока.

#### **V Режим работы:**

1. Перед процедурой выберите надлежащую насадку для области обработки; закрутите насадку на ручку (см. иллюстрация 2). Большая насадка для обработки тела, маленькая насадка для обработки лица;
2. Подсоедините шнур питания;
3. Включите кнопку, которая располагается на задней панели аппарата и покрыта резиновым кожухом;
4. Затем необходимо ключ повернуть из режима OFF в режим ON, после чего загорится экран сенсорного управления.
5. Выберите нужный режим на сенсорном экране;
6. Выберите энергию в зависимости от желаемой интенсивности воздействия , диапазон которой колеблется от 1-10;
7. Установите время воздействия;
8. Выберите надлежащий режим: работы аппарата: монополярный или биполярный.



Иллюстрация 2 Ручка и две насадки

- 9 Плотно прижмите ручку к коже клиента и только после этого нажмите кнопку «Start».
- 10 Нажмите кнопку STDBY, если вы закончили работу RF.
- 11 Ключ поверните в режим "OFF".

#### VI Противопоказания к применению:

Клиенты с металлическими имплантатами в теле;  
Клиенты в острой стадии кожных заболеваний;  
Клиенты с кардиостимуляторами.

**VII Транспортировка** -50 +50. Любым средством, аппарат поместить в полиэтилен, пенопласт, двойной короб, гофрокартон.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.

Всего пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 4 (четыре) лист(ов)  
Генеральный директор Балуева О.Ю.

