

ОКП 94 5200

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
«Завод металлической
изделий мебели»
А.Б.Макаров
2008г.

Кровати медицинские многофункциональные с гидроприводом

Паспорт

2008г.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
1. Назначение изделия.....	3
2. Технические характеристики.....	3-5
3. Комплектность.....	5
4. Устройство и принцип работы.....	5
5. Указания мер безопасности.....	5
6. Правила хранения и транспортирования.....	6
7. Подготовка изделия к эксплуатации.....	6
8. Свидетельство о приемке.....	6
9. Гарантии изготовителя.....	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Кровать медицинская многофункциональная с гидроприводом КММГ 1 (в дальнейшем-кровать) является комфортабельным решением для ухода за больными и недееспособными лицами. Она может быть использована в стационаре, для ухода за пациентом под наблюдением врача и служить для диагностики, лечения и наблюдения за ним.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,

2.1. Основные параметры и размеры.

Таблица 1

Наименование (рисунок)	Обозначение КД	Шифр	Габаритные размеры (длина×ширира×высота)
Кровать медицинская многофункциона льная универсальная с гидроприводом	КММГ1.00.00.00	КММГ1	2135×910×780-1170
		КММГ1-01	
		КММГ1-02	
Кровать медицинская многофункциона льная с гидроприводом	-01		
	-02		
Кровать медицинская многофункциона льная с гидроприводом «упрощенная»			

Таблица 2

Наименование параметра, единица измерения	Значение параметра кровати		
	КММГ1	КММГ1-01	КММГ1-02
1 Предельная рабочая нагрузка, Н в т.ч – пациент – матрас – принадлежности	1700 1350 200 150		
Угол наклона спинной секции к горизонтальной позиции ложа, поддерживающего матрац, град	80		0
Угол наклона ножной секции к горизонтальной позиции ложа, поддерживающего матрац, град	45		0
Диаметр самоориентирующий колес, мм	125		
Масса, не более, кг	80	60	

2.1.1 Кровать должна быть устойчива к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 либо 1%-ным раствором хлорамина ХБ по ГОСТ 14193.

2.1.2 Кровать должна быть оснащена четырьмя самоориентирующими колесами. Колеса должны вращаться даже в самой неудачной позиции.

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготавливать кровати без колес.

2.1.3 Усилие, прилагаемое к педали тормоза должно быть, не более 300 Н (30 кгс).

2.1.4 Нагрузка 2250 Н должна быть на краю плоского ложа, поддерживающего матрац, и центр нагрузки должен быть на расстоянии 125 мм от внешнего края ;1

2.1.5. Утечка рабочей жидкости из гидросистемы привода, независимо от нагрузки на ложе, поддерживающее матрац, не допускается.

2.1.6 Усилие трогания с места кровати с предельной рабочей нагрузкой, должно быть, не более 160 Н, а усилие перемещения 100 Н.

2.1.7. Кровать должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, при этом зазор между одним из колес и полом не должен превышать 3 мм.

2.1.8. Кровать должна быть оснащена буферами для предохранения покрытия кровати и стен помещения от повреждения.

2.1.9. Спинки кровати должны быть легкоъемные:

2.1.10. Рабочие условия эксплуатации :

- температура окружающей среды, °C $+35 \pm 10$

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входят :

- спинки 2шт. ;
- паспорт

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Кровать представляет собой конструкцию, выполненную из металлических труб с полимерным покрытием. Кровать имеет четыре самоориентирующихся колесные опоры. Колеса снабжены тормозами. Регулировка угла подъема ножной и спинной секций при помощи ручек установленных на уровне ложа. Высота ложа регулируется при помощи педалей установленных с двух сторон кровати.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К самостоятельной работе по техническому обслуживанию допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию.

5.2. Категорически запрещается посадка пациента на расстояние менее 125 мм от внешнего края.

5. Всегда проверять переведена ли подматрачная основа в нижнее положение перед тем, как пациент будет оставлен без внимания. Таким образом можно предотвратить

травмирование пациента в случае падения при вставании с кровати или укладывания на нее.

5.4. Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что колеса заблокированы.

5.5. Категорически запрещается перемещение кровати на заблокированных колесах.

5.6. Категорически запрещается эксплуатировать кровать с неисправленными тормозами.

6. ПОДГОТОВКА КРОВАТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. После транспортировки кровать в условиях отрицательных температур, перед распаковкой она должна быть выдержана в нормальных условиях не менее 4-х часов.

6.2. Распаковать кровать, освободить все части от упаковочного материала, очистить от пыли.

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Осмотреть комплектующие кровати для определения их состояния после транспортировки и хранения, отсутствие видимых следов деформации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Кровать в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться при температуре окружающего воздуха от +1° до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

7.2. Кровать может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская многофункциональная
с гидроприводом
(наименование изделия)

КММГ
(обозначение)

Заводской номер _____ соответствует техническим условиям
ТУ 9452-001-80797656-2008 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

(личная подпись штамп ОТК)


9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирование, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.


9.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода , но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

9.3. В течении гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет кровать и ее части в случае поломки при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.4. Адрес завода-изготовителя : РФ 127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, дом 8, стр.1.

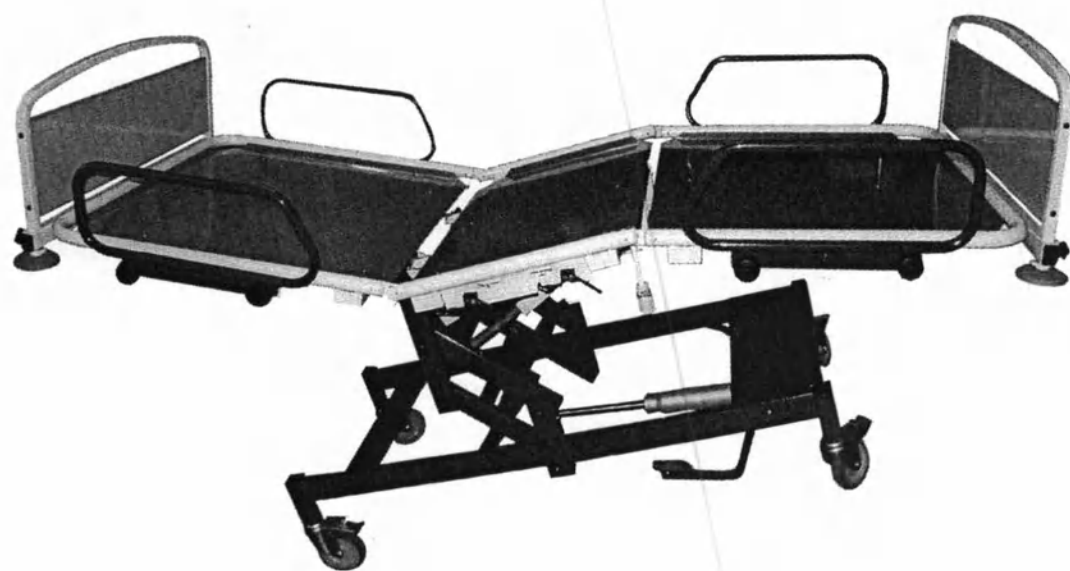

Копия верна
ген.директор
ООО «МетМедМебель»

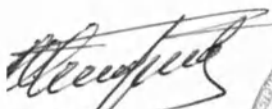
А.Б.Макаров

