



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Альфалаб»



М.А.Суворова
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* в клиническом материале
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

«Микоплазма хоминис»

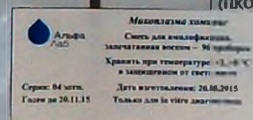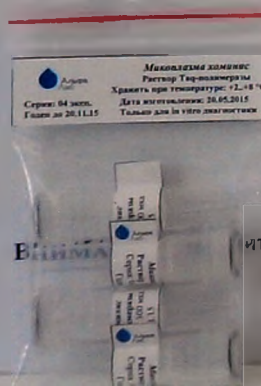

ООО «Альфалаб»	Паспорт качества № 210515-04	Стр. 1 из 1
Название набора	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Микоплазма хоминис»	

Дата изготовления: 20.05.2015
Серия набора: 04 эксл.
Количество наборов в серии: 10
Срок годности: 20.11.2015
Условия хранения: 2-8 °C

Результаты контроля ОТК:


Органолептические показатели:			
Смесь для амплификации	Прозрачная бесцветная жидкость		
Раствор Taq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость		
Положительный контрольный образец ПКО	Прозрачная бесцветная жидкость		
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Прозрачная бесцветная жидкость		

Технические характеристики:

	Параметры оценки	Канал	Наличие флуоресценции
Положительный контрольный образец (ПКО)	Регистрация экспоненциального роста флуоресцентного сигнала по каналам FAM и HEX	FAM/HEX	+/+
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Отсутствие флуоресцентного сигнала каналам FAM и HEX	FAM/HEX	-/-
Не более 2000 копий/мл			

Заключение: соответствует
ТУ 9398-011-010586

Дата выдачи паспорта
Штамп ОТК:

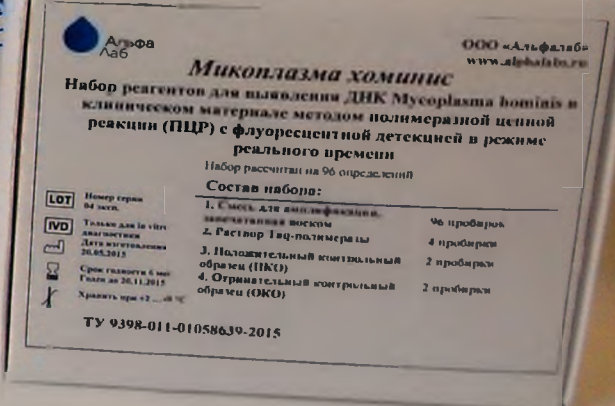



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»




М.А.Суворова
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* в клиническом материале
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

«Микоплазма хоминис»

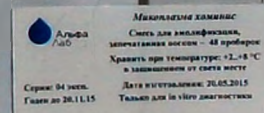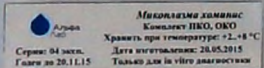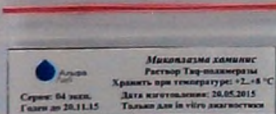

ООО «АльфаЛаб»	Паспорт качества № 210515-04	Стр. 1 из 1
Название набора	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Микоплазма хоминис»	

Дата изготовления: 20.05.2015
Серия набора: 04 экзп.
Количество наборов в серии: 10
Срок годности: 20.11.2015
Условия хранения: 2-8 °C

Результаты контроля ОТК:


Органолептические показатели:	
Смесь для амплификации	Прозрачная бесцветная жидкость
Раствор Taq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость
Положительный контрольный образец ПКО	Прозрачная бесцветная жидкость
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Прозрачная бесцветная жидкость

Технические характеристики:		Параметры оценки	Канал	Наличие флуоресценции
Положительный контрольный образец (ПКО)	образец	Регистрация экспоненциального роста флуоресцентного сигнала по каналам FAM и HEX	FAM/HEX	+
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	образец	Отсутствие флуоресцентного сигнала каналов FAM и HEX	FAM/HEX	-

Не более 2000 копий/мл

Включение: соответствует
ТУ 9398-011-01058

Дата выдачи паспорта
Штамп ОТК:

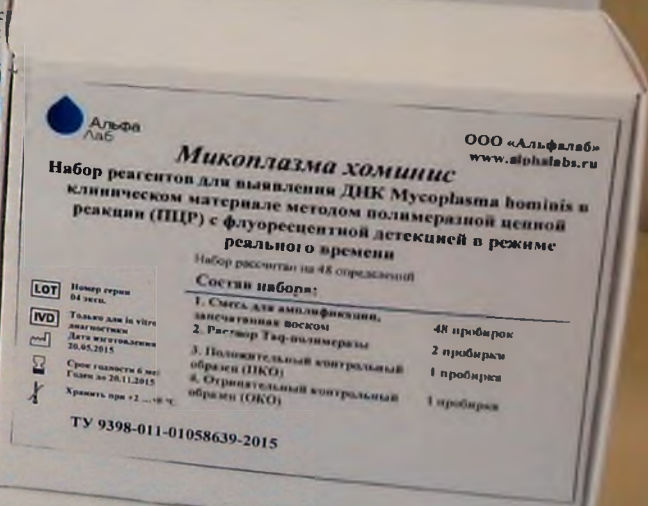



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»

М.А.Суворова
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* в клиническом материале
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

«Микоплазма хоминис»

Микоплазма хоминис
Смесь для амплификации,
запечатанная упаковка – 12 пробирок
по 8 пробирок.
Хранить при температуре +2...+8 °C
в холодильнике от момента
Срок: 04 года.
Годен до 20.11.15



ООО «АльфаЛаб»	Паспорт качества № 210515-04	Стр. 1 из 1
Название набора	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Микоплазма хоминис»	


Дата изготовления: 20.05.2015
Серия набора: 04 экзп.
Количество наборов в серии: 10
Срок годности: 20.11.2015
Условия хранения: 2-8 °C

Результаты контроля ОТК:

Органолептические показатели:	
Смесь для амплификации	Прозрачная бесцветная жидкость
Раствор Taq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость
Положительный контрольный образец ПКО	Прозрачная бесцветная жидкость
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Прозрачная бесцветная жидкость

Технические характеристики:		Канал	Наличие флуоресценции
Положительный контрольный образец (ПКО)	Регистрация экспоненциального роста флуоресцентного сигнала по каналам FAM и HEX	FAM/HEX	++
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Отсутствие флуоресцентного сигнала каналам FAM и HEX	FAM/HEX	-

Микоплазма хоминис
Контроль ОТК, ОТК
Хранить при температуре +2...+8 °C
Срок: 04 года.
Годен до 20.11.15

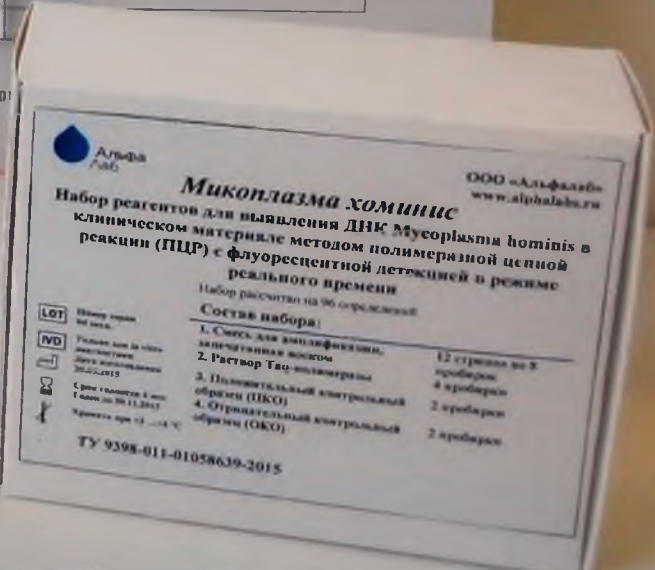



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»

М.А.Суворова
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* в клиническом материале
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

«Микоплазма хоминис»



ООО «АльфаЛаб»	Паспорт качества № 210515-04
Название набора	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Микоплазма хоминис»


Дата изготовления: 20.05.2015
Серия набора: 04 эксп.
Количество наборов в серии: 10
Срок годности: 20.11.2015
Условия хранения: 2-8 °C

Результаты контроля ОТК:

Органолептические показатели:	
Смесь для амплификации	Прозрачная бесцветная жидкость
Раствор Таq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость
Положительный контрольный образец ПКО	Прозрачная бесцветная жидкость
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Прозрачная бесцветная жидкость

Технические характеристики:			
	Параметры оценки	Канал	Наличие флуоресценции
Положительный контрольный образец (ПКО)	Регистрация экспоненциального роста флуоресцентного сигнала по каналам FAM и HEX	FAM/HEX	+/+
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Отсутствие флуоресцентного сигнала каналам FAM и HEX	FAM/HEX	-/-
Аналитическая чувствительность	Не более 2000 копий/мл		

Заключение: соответствует
Микоплазма хоминис
Срок: 04 эксп.
Где: 20.11.15

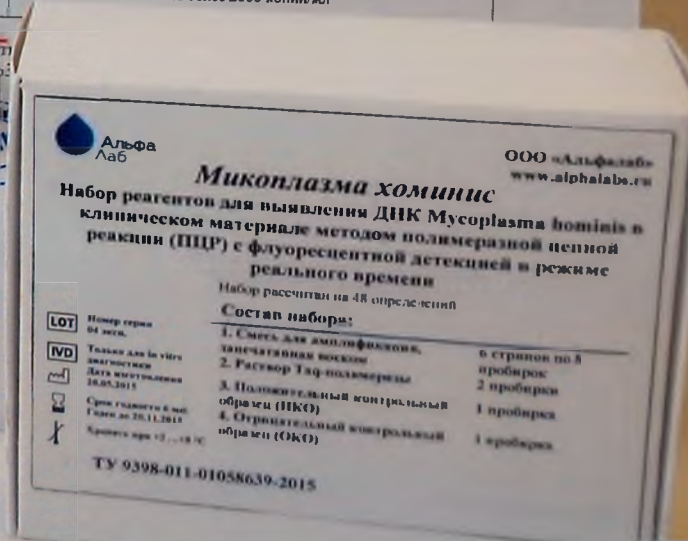

Прошито и пронумеровано
В количестве _____ листов

Генеральный директор ООО «Альфалаб»

_____ Суворова М.А.



000 ЦИРМИ
INFO@CIRMI.RU
WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU