

ИНСТРУКЦИЯ

по применению: Очки Корректирующие

Очки – сложный прибор предназначенный для коррекции оптических дефектов зрения. Очки корректирующие применяются для коррекции близорукости и дальнозоркости.

Корректирующие очки состоят из очковых линз и оправы. Очковые оправы бывают пластмассовыми, металлическими и комбинированными. Очковые линзы могут быть минеральными /из стекла/ и органическими (полимерными) /из пластика/.

Для точного и правильного подбора корректирующих очков рекомендуется воспользоваться услугами врача-офтальмолога.

Правильно подобранные очки :

- оправа должна устойчиво держаться на лице, не спадая с переносицы при движении головы;
- оптические центры линз должны совпадать с центрами зрачков.
- заушники оправы должны охватывать голову, опираясь на основания ушных раковин.

При использовании очков не прикладывайте к очкам значительных механических усилий.

Храните очки в защитном футляре. Не кладите очки на твердую поверхность линзами вниз. Протирайте очки специальной салфеткой из микрофибры или замши, при сильном загрязнении можно использовать специальные очищающие спреи.

Снимайте очки обязательно двумя руками для предотвращения деформации заушников.

Нежелательно оставлять очки возле нагревательных приборов.

Генеральный директор

ЗАО «Управляющая Компания «Аптечная сеть 36,6»

Калмес Джере

