

«30» мая 2016 г.

« 30 » 05 2015 г.

Мясников А. Л.

Д. Р. Киркина

по применению клеенки подкладной резиноканевой

Клеенка подкладная предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала.

Используется в медицинских учреждениях, социальных службах или домашних условиях для подкладывания на кровать, для физиотерапевтических кабинетов (покрытие кушеток), для массажных столов, в хирургии, стоматологии и т.д. Клеенка может успешно применяться для покрытия матрасов хирургических; медицинских и массажных столов; носилок, кушеток; изготовления медицинских ширм и других изделий (фартуки, бахилы, нагрудники и т.д.).

Клеенка подкладная резиноканевая изготавливается согласно ГОСТ 3251-91.

Вид А - на основе хлопчатобумажных тканей.

Вид Б — на основе полиэфирно-вискозной или других синтетических тканей.

Клеенка подкладная резинотканевая изготавливают любого цвета светлого тона.

Клеенка поставляется в рулонах.

Длина клеенки в рулоне не более - 75 м.

Ширина - не менее 0,75 м.

Наименование показателя	Норма для вида	
	А	Б
Разрывная нагрузка, Н, не менее		
- в продольном направлении	300	
- в поперечном направлении	190	
Жесткость, Н, не более	0,05	0,1
Масса 1 м ² , кг, не более	0,65	0,55

1 Разрезать клеенку подкладную по размеру.

2 Положить внутренней (текстильной) стороной на защищаемую поверхность.

3 Верхнюю водонепроницаемую сторону покрыть простыней или пленкой.

Клеенку в упакованном виде хранить в сухом закрытом помещении при температуре от 0 до 25°C на расстоянии не менее 1,0 м от нагревательных приборов защищенной от воздействия прямых солнечных лучей в условиях, исключающих воздействие масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Рулоны клеенки должны храниться в штабелях, состоящих не более чем из 10 рулонов по высоте.

При загрязнении клеенку протереть влажной тканью с использованием мыльного раствора или 1% раствора хлорамина. Высушить.

Клеенка стойкая к многократной дезинфекции 1% раствором хлорамина и многократной стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой.

Клеенку транспортируют всеми видами транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С по ГОСТ 15150-69 (группа 5 (ОЖ4) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения клеенки вида А - 24 месяца, вида Б - 26 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации клеенки вида А – 1 месяц в лечебных учреждениях и 6 месяцев индивидуально, вида Б – 2 месяца в лечебных учреждениях и 8 месяцев индивидуально со дня получения потребителем.

Клеенка после применения утилизируется с бытовыми отходами.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению клеенки подкладной резиноканевой по ГОСТ 3251-91

Клеенка подкладная предназначена для создания водонепроницаемого барьера в санитарно-гигиенических целях. Применяется в медицинских учреждениях, социальных службах или домашних условиях для подкладывания на кровать, для физиотерапевтических кабинетов (покрытие кушеток), для массажных столов, в хирургии, стоматологии и т.д. Клеенка может успешно применяться для покрытия матрасов хирургических, медицинских и массажных столов; носилок, кушеток; изготовления медицинских ширм и других изделий (фартуки, бахилы, нагрудники и т.д.).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клеенка подкладная резиноканевая изготавливается согласно ГОСТ 3251-91 в вариантах исполнения:

- 1) Вид А - на основе хлопчатобумажных тканей. Выпускается в рулонах и отрезках в рулоне:
 - Рулон. Длина - не менее 45 м и не более 75 м, ширина — не менее 0,75 м и не более 1,20 м.
 - Отрезки в рулоне. Длина - не менее 3,0 м, ширина — не менее 0,75 м и не более 1,20 м.
 - Отрезки в рулоне (корткомеры). Длина — не менее 0,5 м и не более 3,0 м, ширина — не менее 0,7 м и не более 1,20 м (допускается не более 10 % от партии).
- 2) Вид Б - на основе полиэфирно-вискозной или других синтетических тканей. Выпускается в рулонах и отрезках в рулоне:
 - Рулон. Длина — не менее 45 м и не более 75 м, ширина — не менее 0,75 м и не более 1,20 м.
 - Отрезки в рулоне. Длина - не менее 3,0 м, ширина — не менее 0,75 м и не более 1,20 м.
 - Отрезки в рулоне (корткомеры). Длина — не менее 0,5 м и не более 3,0 м, ширина - не менее 0,7 м и не более 1,20 м (допускается не более 10 % от партии).

Клеенка подкладная резиноканевая изготавливается розового цвета.

Наименование показателя	Норма	
	Вид А	Вид Б
1 Разрывная нагрузка, Н, не менее в продольном направлении в поперечном направлении	300 190	
2 Жесткость, Н, не более	0,05	0,1
3 Масса 1 м ² , кг, не более	0,65	0,55
4 Эластичность	Отсутствие на резиновом полотне трещин и отслоений от основы после проведения испытаний по 3.6 ГОСТ 3251-91 (сворачивание и сгибание)	

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1) Разрезать клеенку подкладную резиноканевую по размеру.
- 2) Положить внутренней (текстильной) стороной на защищаемую поверхность.
- 3) Верхнюю водонепроницаемую сторону покрыть простыней или пленкой.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Клеенку в упакованном виде хранить в сухом закрытом помещении в соответствии с условиями хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69 при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не менее 80 % на расстоянии не менее 1,0 м от нагревательных приборов, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей в условиях, исключающих воздействие масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Рулоны клеенки должны храниться в штабелях, состоящих не более чем из 10 рулонов по высоте.

При загрязнении клеенку протереть влажной тканью с использованием мыльного раствора или 1% раствора хлорамина. Высушить.

Клеенка стойкая к многократной дезинфекции 1% раствором хлорамина и многократной стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой.

Клеенку транспортируют всеми видами транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С по ГОСТ 15150-69 (группа 5 (ОЖ4) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения клеенки вида А - 24 месяца, вида Б - 26 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации клеенки вида А - 1 месяц в лечебных учреждениях и 6 месяцев индивидуально, вида Б - 2 месяца в лечебных учреждениях и 8 месяцев индивидуально со дня получения потребителем.

Клеенка после применения утилизируется с бытовыми отходами.

5 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - Нет

6 ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - Нет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2.
Тел./факс: 8 (34783) 2-09-04/ 8 (34783) 2-01-49

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись