

Инструкция по эксплуатации
«Насадки стоматологические к аппарату для удаления зубного камня и/или
полировки зубов LMPгоPower с принадлежностями»,
производства «ЛМ-Инструментс Ои», Финляндия.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Рекомендуется сохранять инструкцию для ее последующего использования.

Меры предосторожности:

- во избежание короткого замыкания или ударов током, необходимо предотвращать попадание воды на прибор;
- прибор предназначен только для стоматологического лечения и должен использоваться квалифицированным персоналом;
- постоянно помните о безопасности пациента, работайте в соответствии с инструкциями по эксплуатации;
- используйте насадки в соответствии с их предназначением, не правильный выбор насадки может привести к повреждению поверхности зуба или самой насадки;
- при снятии зубного камня используйте достаточное количество воды, не достаточное количество воды может привести к повреждению зубной эмали или перегреву наконечника;
- запрещается натачивать или изгибать насадку;
- во время работы насадка не должна соприкасаться с десной, слизистой оболочкой и непосредственно с кожей;
- со временем насадка изнашивается, при изнашивании насадки, замените ее на новую;
- насадка должна быть закреплена при помощи специального ключа, который прилагается;
- необходимо снимать насадку каждый раз перед отсоединением наконечника для стерилизации.

1. Установка и снятие насадки.

Установить насадку слегка закрутив ее рукой.

Установить ключ на насадку и вращать по часовой стрелке до полного закрепления насадки.

Для снятия насадки, вращать ключ необходимо в обратном направлении.

Примечание!

При установке насадки необходимо работать в стерильных перчатках и со стерилизованным ключом, насадкой и наконечником.

Насадки поставляются не стерильными, перед использованием подлежат автоклавированию.

2. Стерилизация:

- насадки, после каждого применения необходимо автоклавировать;
- насадка, наконечник и ключ подлежат стерилизации в автоклаве.

Процесс стерилизации:

- после использования снять насадку;
- снять наконечник со шланга;
- поместить наконечник, насадку и ключ (отдельно) в стерилизационный пакет и заклеить;
- автоклавировать в течении 15 минут при температуре 132°C.

Примечание!

Если в стерилизаторе присутствует процесс сушки, температура которой превышает 132°C, пропустите эту процедуру.

Если насадки, наконечник и ключ автоклавировается вместе с другими предметами, обработанными химическими препаратами, их покрытие может потемнеть.

Не допускается использовать химические паровые стерилизаторы, спирт, ацетон, кетон или другие ядовитые химические дезинфектанты, включая ультразвуковые чистящие растворы, содержащие химикаты.

3. Возможные неисправности и их устранение.

Неисправность	Поврежденный элемент	Причина неисправности	Устранение неисправности
Полное отсутствие или слабая вибрация		Слабое крепление насадки	Закрепить насадку
		Насадка изношена	При выходе из строя насадки, вибрация уменьшается или прекращается. Заменить насадку на новую

4. Правила хранения и транспортировки.

Температура рабочая + 10°C +40°C при относительной влажности 10%-95%.

Транспортировка и хранение: -40°C +70°C при относительной влажности 10% - 100%.

Избегайте воздействия пыли, прямых солнечных лучей, влаги, механических воздействий.

Транспортировка может осуществляться любыми видами крытого транспорта с соблюдением условий хранения ИМН.

5. Срок службы

Насадки могут использоваться до тех пор, пока остаются неповрежденными.

Условия замены насадок указаны в упаковочных листках.

Гарантийный срок службы – 3 месяца.

Производитель.

«ЛМ-Инструментс Ои», Финляндия.

«LM-Instruments Oy», Norrbyn rantatie 8, 21600 Parainen, Finland.

Тел: +358 2 4546 400, факс +358 2 4546 444.

Официальный представитель в Российской Федерации.

ЗАО «ЭУР-МЕД Денталдепо», Россия, 143360, Московская область, г.

Апрелевка, ул. Октябрьская 9. Телефон: (495) 983-10-72.

Генеральный директор

ЗАО «ЭУР-МЕД Денталдепо»



Козлов С.Г.

Генеральный директор
ЗАО «ЭУР-МЕД Денталдепо»

Прошито и пронумеровано 4 ¹ листов



Козлов С.Г.