

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок столика составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта. Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью

< ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ >

Россия 127521, г. Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 619-26-38, факс. 618-51-31

ПАСПОРТ

**Столик прикроватный
с вращающейся столешницей.**

СП-01-ТР-ЗМММ

ТУ-9452-006-32466639-97

Назначение:


Столик прикроватный предназначен для оборудования палат лечебных и лечебно-профилактических учреждений. Столик применяется для хранения личных вещей пациента.

Технические данные:

Габариты:

длина	550 мм
ширина	480 мм
высота	830-1070 мм
масса не более	30 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

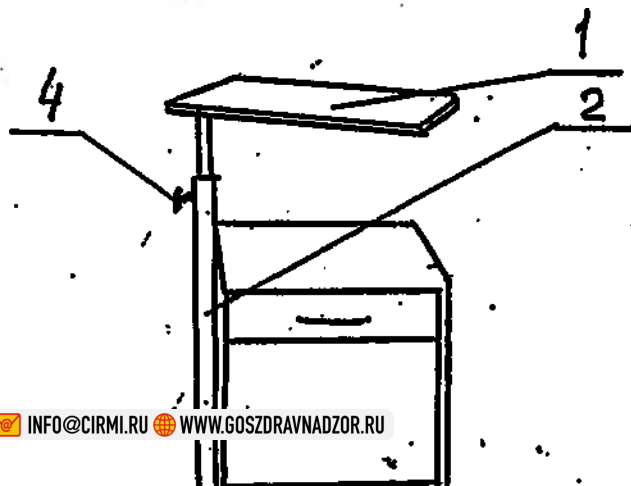

Комплект поставки:

1. Столешница(поз.1) - 1 шт.
2. Кронштейн (поз.2) - 1 шт.
3. Опоры роликовые(поз.3) - 4 шт.
4. Стопор (поз.4) - 1 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Ввернуть в отверстия ножек колесные опоры (поз.3)
Вставить в основание кронштейн столешницы(поз.2) и закрепить её стопором (поз.4), установив необходимую высоту стола.

Установить столешницу в требуемое положение относительно оси вращения.

Примечание: не допускается устанавливать на столешницу груз более 2 кг.

Периодически проверять крепления колес.

Хранение:

Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, в вызывающих коррозию.

Все металлические части столика имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости столик подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным

Общество с ограниченной ответственностью

< ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ >

Россия 127521, г. Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 619-26-38, факс. 618-51-31

ПАСПОРТ

Стол приставной.

СП-01-Р-3МММ
ТУ-9452-006-32466639-97

Назначение

Стол приставной предназначен для размещения на его поверхности медикаментов, столовых предметов или канцелярских принадлежностей


Стол приставной применяется для оснащения лечебно-профилактических медицинских учреждений

Технические данные:

Габариты:	
длина	550мм
ширина	600мм
высота	650-1100мм

масса не более	15кг
допустимая нагрузка на столешницу	2кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет

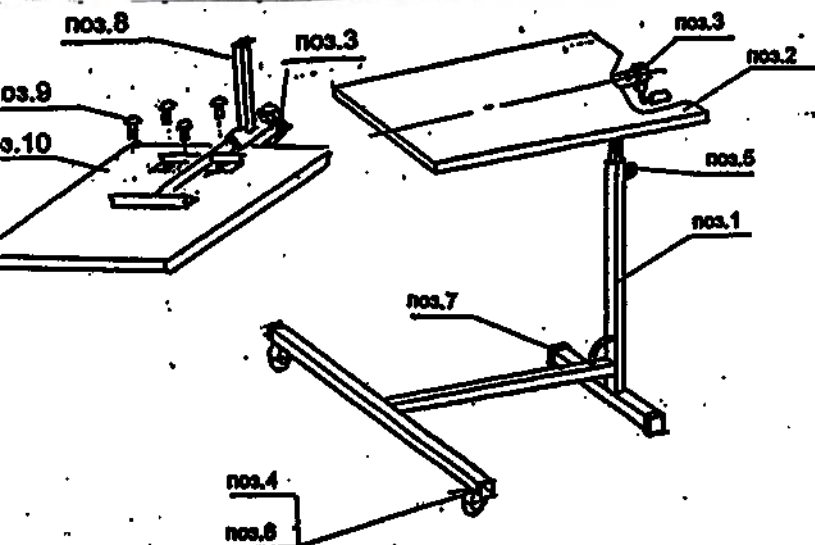

Комплект поставки:

Основание (поз.1)	1шт
Столешница с кронштейном (поз.2)	1шт
Хомут зажимной (поз.3)	1шт
Опора роликовая (поз.4)	2шт
Зажим (поз.5)	1шт
Втулка регулировочная (поз.6)	2шт
Полупатрик (поз.7)	2шт

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*Винты М6 (поз.9) 4шт

*Столешница (поз.10) 1шт

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ввернуть в отверстия опоры роликовые (поз.4).

Вставить трубу кронштейна столешницы (квадрат 20х20) в трубу основания (поз.1) (квадрат 25х25) и установить необходимую высоту стола.

Зафиксировать положение кронштейна завернув до упора зажим (поз.5)

Установить столешницу в требуемое положение относительно оси вращения зафиксировать её хомутом зажимным (поз.3) для чего: Установить флажок хомута в разжатое положение и подтянуть регулировочную гайку хомута до упора. После этого необходимо повернуть флажок хомута в сторону зажатия (до упора).

*В случае поставки стола в разобранном виде, предварительно произвести сборку столешницы (поз.10) с кронштейном столешницы (поз.8) для чего: ослабить хомут зажимной (поз.3), привернуть основание кронштейна столешницы (поз.8) к столешнице (поз.10) четырьмя винтами М6 (поз.9).

Внимание! После фиксации подвижных частей стола убедитесь в том, что они действительно зафиксированы.

Не допускается устанавливать на столешницу груз весом более «2-х кг».

Периодически, один раз в 6 месяцев эксплуатации, проверять крепление колес

Хранение

Стол приставной должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части стола имеют защитное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости стол приставной подвергнуть дезинфекции 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением полупроцентного моющего средства типа «Лотос» или тампоном, смоченным 1-процентным раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-1689. Тампоны должны быть отжаты.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок стола приставного составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Дата выпуска

Представитель ОТК

95

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок столика составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта. Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью

< ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ >

Россия 127521, г. Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 619-26-38, факс. 618-51-31

ПАСПОРТ

Столик прикроватный

СП-01-ТФ-3МММ

ТУ-9452-006-32466639-97

значение:

Олик с выдвижными ящиками предназначен для оборудования
небно-профилактических учреждений.

Столик применяется для хранения личных вещей пациента.

Технические данные:**Габариты:**

длина	560 мм
ширина	416 мм
высота со спинкой	821 мм
масса не более	30 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

**Комплект поставки:**

1. Корпус столика(поз.1) - 1 шт.
2. Ящик верхний-малый(поз.2) - 1 шт.
3. Ящик нижний-большой(поз.3) - 1 шт.
4. Ручка в комплекте с винтами (поз.4) - 2 к-та.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Установить ручки(поз.4) на ящики(поз.2) и (поз.3)

Установить верхний и нижний ящики, как показано на рисунке.

Хранение:

Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, в вызывающих коррозию.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости столик подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689 (тампоны должны быть отжаты).