

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АРКОМ»



Р.Ю. Селезнев

Инструкция по применению

изделия медицинского назначения

**«Материалы композитные стоматологические в наборах и отдельных
упаковках с принадлежностями», производства Centrix, Inc. (Центрикс,
Инк.), США**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материалы композитные стоматологические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями предназначены для реставраций всех классов на передних и боковых зубах.

Композитные материалы состоят из нескольких компонентов. В стоматологии композитными называют синтетические пломбировочные материалы цвета естественных зубов, которые после внесения в полость затвердевают вследствие химической реакции или под воздействием света.

Композиты светового отверждения делают возможным применение послойной техники, обеспечивающей оптимальность цвета и лучшую морфологическую форму пломбы, надлежащее краевое прилегание.

Композитный материал

- Помогает легко и просто удалять временную реставрацию.
- Уникальная формула – защищает поверхность дентина от бактерий и загрязнения временным цементом.
- Способствует завершенности этапа бондинга и снижению чувствительности, благодаря незамедлительному запечатыванию дентина.
- Розового цвета – легко контролировать при нанесении.
- Две вязкости для изготовления накладок и вкладок.
- Антибактериальные свойства – выделяют фтор и почти не впитывают влагу.
- Прочность и устойчивость в сочетании с оптимальным краевым прилеганием.
- Идеально моделируется и формируется – моделирование в полости рта без матриц.

I. Материалы композитные стоматологические в отдельных упаковках:

1. Versalite - композитная светоотверждаемая смола. Цвета A1;A2; A3;A3,5;B1;B2;B3;C3.
2. Versaflo - композитная текучая светоотверждаемая смола. Цвета: A1;A2;A3;A3,5;B1;OP.
3. SuperCure – композитный светоотверждаемый материал. Цвета: Natural; Contrast.
4. SuperCure Q - композитный светоотверждаемый материал. Цвета: Natural; Contrast.

5. Tempit – композитный влагоактивируемый материал.
6. Tempit L/C – композитный светоотверждаемый материал для вкладок.
7. Calciject – композитная паста для временной обработки канала.
8. Tempit Ultra – композитный светоотверждаемый материал для промежуточных реставраций.
9. Tempit Ultra-F – композитный светоотверждаемый материал для промежуточных реставраций.
10. Champ - композитный светоотверждаемый материал.
11. NoMix - композитный временный цемент для коронок и мостов

II. Материалы композитные стоматологические в наборах:

1. Access Crown - композитный двухкомпонентный материал для временных коронок и мостов. Цвета: A1;A2;A3;A3,5;B1;B3;BL;C2. В составе:
 - картридж с материалом - 1шт.;
 - смешивающая канюля - 10 шт.
2. Access - композитный временный двухкомпонентный цемент. В составе:
 - картридж с материалом - 1шт.;
 - смешивающая канюля - 10шт.
3. NoMix Starter Kit – композитный временный цемент для коронок и мостов. В составе:
 - шприц с материалом - 6 шт.;
 - унидоза с материалом - 24шт.;
 - канюля с поршнем - 30шт.
4. NoMix REFILL Kit – композитный временный цемент для коронок и мостов. В составе:
 - шприц с материалом - 12 шт.;
 - канюля с поршнем - 60шт.
5. C-R Hybrid - композитная самоотверждающаяся смола. В составе:
 - банка базового материала - 1шт.;
 - банка катализатора - 1шт.;
 - шпатель - 50шт.;
 - листы для замешивания - 50шт.
6. Versaflo – композитная текучая светоотверждаемая смола. Цвета: A1;A2;A3;A3,5;B1;OP. В составе:

- 1)- шприц с материалом - 6шт.;
- канюля - 30шт.
- 2)- шприц с материалом - 1шт.;
- канюля - 5шт.
7. RapidCore – композитная двухкомпонентная самоотверждающаяся смола. Цвета: White; Natural; Blue; Contrast. В составе:
 - 1)- картридж с материалом - 1шт.;
 - смешивающая канюля - 10шт.;
 - канюля - 10шт.
 - 2)- картридж с материалом - 1шт.;
 - смешивающая канюля - 15шт.;
 - канюля - 10шт.
8. RapidCore MiniMix – композитная двухкомпонентная самоотверждающаяся смола. Цвета: White; Natural; Contrast. В составе:
 - 1)- унидоза с материалом - 12шт.;
 - смешивающая канюля - 12шт.
 - 2)- унидоза с материалом - 36шт.;
 - смешивающая канюля - 36шт.
9. Encore – набор композитных материалов. Цвета: White with fluoride; White without fluoride; Natural with fluoride; Natural without fluoride. В составе:
 - базовый материал - 1 банка;
 - катализатор - 1 банка;
 - материал адгезивный Connexio part A - 1 бутылка;
 - материал адгезивный Connexio part B - 1 бутылка;
 - микроаппликатор – 20шт.;
 - шпатель - 50шт.;
 - канюля с поршнем - 25шт.
 - листы для замешивания - 50шт.
10. Encore AF – композитный самоотверждающийся материал. Цвета: White with fluoride; Natural with fluoride. В составе:
 - базовый материал - 1 банка;
 - катализатор - 1 банка.
11. Encore D/C Automix – композитный материал двойного отверждения. Цвета: Natural with fluoride; Contrast with fluoride. В составе:

- картридж с материалом - 1шт.;
- смешивающая канюля - 10шт.;
- канюля - 10шт.

12. Encore D/C MiniMix – композитный материал двойного отверждения. Цвета: Natural; Contrast. В составе:

- 1) – унидоза с материалом - 12шт.;
- смешивающая канюля - 24шт.
- 2) – унидоза с материалом - 36шт.;
- смешивающая канюля - 72шт.

13. EndoKit – набор для пломбирования каналов. В составе:

- канюля MicroAspirator – 1шт., унидоза Calciject – 1шт., унидоза Tempit – 1шт. – 10шт.

III. Принадлежности:

1. Lube Cube – губка для чистки инструмента от композитных материалов.
2. Benda Brush Regular – аппликатор.
3. Benda Brush Big Box – аппликатор. Цвета RED;BLUE;YELLOW;GREEN.
4. Benda Brush Mini – аппликатор.
5. Benda Brush Mini Big Box – аппликатор. Цвета BLUE;GREEN; PURPLE; SILVER.
6. Benda Micro - аппликатор. Цвета RED;BLUE;YELLOW;GREEN.
7. Benda Micro Fine – аппликатор. Цвета RED; YELLOW.
8. Benda Micro X-Fine – аппликатор. Цвета: LIGHT GREEN; YVORY.
9. Benda Microtwin- аппликатор. Цвета: BLUE; PINK.
10. Benda Microtwin X-Fine- аппликатор. Цвета: GREEN; YVORY.
11. Benda Matic Dispenser – диспенсер для аппликаторов.
12. Exposé Carries Indicator- аппликатор. Цвета: FINE BLUE ; FINE RED; FINE YELLOW; FINE IVORY; X-FINE BLUE ;X-FINE RED; X-FINE YELLOW; X-FINE IVORY.
13. Exposé Carries Indicator Kit – набор аппликаторов. Цвета BLUE; RED. В составе:
 - Benda Matic Dispenser - 2шт.;
 - FINE YELLOW аппликатор - 96шт.;
 - X-FINE IVORY аппликатор - 96шт.
14. AccuDose Low Viscosity – канюля с поршнем.
15. AccuDose High Viscosity – канюля с поршнем.

16. AccuDose 20ga Needletube - канюля с поршнем.
17. AccuDose 19ga Needletube - канюля с поршнем.
18. AccuDose 19ga Ribbontube - канюля с поршнем.
19. AccuDose TriPack – набор канюлей. В составе:
 - AccuDose 20ga Needletube канюля с поршнем -25 шт.;
 - AccuDose Low Viscosity канюля с поршнем - 25 шт.;
 - AccuDose High Viscosity канюля с поршнем-25шт.
20. Mixing Nozzle Tips – канюля. Размер 18ga, 20ga.
21. DS 50 Crown Nozzles – смешивающая канюля.
22. DS 25 Core Build Up Nozzles – смешивающая канюля.
23. Core Build Up Combo Nozzles – смешивающая канюля.
24. MiniMix Nozzles – смешивающая канюля.
25. Micro Aspirator – канюля. Размеры 18ga, 20ga.
26. NoMix Syringe Tips – канюля.
27. Versaflo Needles – канюля.
28. SofNeedle – канюля.
29. Automix Syringe – диспенсер - дозатор. Модели: DS25 1:1, DS50 1:1
30. C-R Syringe – диспенсер – дозатор. Модели: MARK I; MARK II SNAP-FIT; MARK IIIp; S/CLASS; SNAP-FIT SYRINGE; E/Z SYRINGE; SNUB NOSE SNAP-FIT SYRINGE; JUMBO SYRINGE; NUGUN.

Принадлежности предназначены для нанесения композитных материалов.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. **Versalite** - композитная светоотверждаемая смола. Цвета A1;A2; A3;A3,5;B1;B2;B3;C3.
 - 1 Подготовьте зуб. Протравите поверхность, нанесите светоотверждаемый адгезив (Adhere™).
 - 2 Выберите насадку с материалом подходящего оттенка VITA®. Удалите герметизирующий колпачок и поместите в корпус шприца CENTRIX C-R® (рекомендовано использовать NuGUN®, S/Class®, или Mk IIIp™).
 - 3 Выдавите содержимое шприца медленным равномерным движением, не прилагайте излишнюю силу. Попробуйте на бумаге для смешивания прежде, чем использовать в ротовой полости.

4 Введите насадку в основание подготовленного зуба и вводите материал, постепенно вытаскивая ее в процессе выдавливания. Наносите слоями не более 2 мм толщиной. Не удаляйте ингибируемый воздухом слой между нанесениями. Отверждайте каждый слой светом в течение не менее 30 секунд.

5 Придайте форму и обработайте с помощью обычных финишных инструментов. Отполируйте с помощью полирующих инструментов CENTRIX Min-Identoflex®

Извлеките насадку VERSALITE из шприца и утилизируйте ее после использования. Не используйте повторно насадку для другого пациента. Простерилизуйте шприц-пистолет соответствующим методом. Храните VERSALITE в прохладном сухом месте при температуре не выше 24°C. Храните вдали от солнечного света и материалов, содержащих звенол. У некоторых пациентов наблюдается чувствительность или аллергические реакции на композитные материалы.

2. **Versaflo** - композитная текучая светоотверждаемая смола. Цвета: A1;A2;A3;A3,5;B1;OP.

VERSAFLO®-ШПРИЦ- КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1 Подготовьте зуб и нанесите связывающее вещество для композитов.

2 Если необходимо, согните иглу. Выдавите содержимое шприца медленным непрерывным движением.

Сначала попробуйте на бумаге.

3 Выдавливайте послойно, не толще 2 мм в толщину. Отвердите светом каждый слой, не менее 30 секунд каждый.

4 После использования извлеките насадку из шприца и утилизируйте. Протезинфицируйте шприц.

3. **SuperCure** и **SuperCure Q** – композитный светоотверждаемый материал. Цвета: Natural; Contrast.

Светоактивируемый композит для наращивания культи зуба

Храните при комнатной температуре (10°C – 22°C, 50°F – 72°F)

Изолируйте зуб пластиной из латекса или ватными валиками.

Удалите весь кариес и существующие пломбировочные материалы, включая звеноловый цемент или герметики.

Установите адгезивную бондовую систему для дентина, совместимую со светоактивируемыми композитами. Следуйте конкретным инструкциям изготовителей для применения.

Снимите колпачок (или гильзу) и вставьте канюлю SUPERCURE в шприц Centrix C-R. Проверьте поток выдавливанием небольшого количества на салфетку.

Введите 2-мм слой материала в пломбировочный материал на поверхность, покрытую бондом. Оставьте для затвердевания на свету на 20 секунд, используя любой галогеновый, LED или PAC источник света.

Нанесите сверху второй слой толщиной не более 6-8 мм. Подвергните воздействию света в течение 40 секунд.

Обрежьте и обработайте культю, используя алмазы или боры с водяным охлаждением.

Удалите использованную канюлю SuperCure из шприца и утилизируйте надлежащим образом. После использования стерилизуйте или продезинфицируйте шприц.

4. Tempit – композитный влагоактивируемый материал.

Разработан специально для пломбирования полости корневого канала между процедурами.

Введите во влажный препарированный зуб, утрамбуйте и отпустите пациента.

Tempit отверждается за 5 минут или даже быстрее.

Без смешивания, чистая работа.

Унидозы для шприца для легкого введения, максимальная асептика.

Отверждается за минуты, легко удаляется при следующем визите.

Содержит сульфат кальция и оксид цинка.

Не содержит эвгенол.

Как использовать Tempit®

1 Снимите колпачок.

2 Установите насадку в шприц C-R®.

3 Медленно и равномерно введите содержимое шприца во влажную полость.

4 Утрамбуйте влажным инструментом и отпустите пациента.

В последующий визит Tempit® может быть удален с помощью зонда.

5. Tempit L/C – композитный светоотверждаемый материал для вкладок.

Tempit L/C активируется светом в течение 40 секунд, приобретая эластичную консистенцию. Не требует дополнительного использования протравки и бондинга. Просто введите в зуб, подготовленный под вкладку, утрамбуйте, придайте форму, затем активируйте светом. Легко извлекается с помощью зонда.

Без смешивания, чистая работа.

Одноразовые насадки для шприца для легкого введения, максимальная асептика.

Эластичен в отвержденной форме, легко и чисто удаляется, не повреждая зуб.

Естественный цвет, полупрозрачен.

Можно использовать для временного пломбирования корневого канала или для защиты мягких тканей от острых ортодонтических скоб.

Как использовать Tempit® L/C

1 Промойте и осушите полость.

2 Установите насадку в шприц C-R® и снимите колпачок.

3 Выдавите содержимое шприца в полость медленным равномерным движением. Избегайте чрезмерного давления на шприц.

4 При установке вкладок или накладок оставляйте контактные участки межзубной матрицы свободными от материала.

5 Выполните отверждение светом поверхность не менее 45 секунд.

6 Проверьте прикус. Излишки можно удалить.

7 Снимите и утилизируйте насадку. Простерилизуйте шприц C-R

8 Для удаления TEMPIT® L/C введите острый зонд в материал и вытащите. Не используйте у пациентов с аллергией на метакрилат. Не используйте с препаратами, содержащими эвгенол.

6. Tempit Ultra и Tempit Ultra-F – композитный светоотверждаемый материал для промежуточных реставраций.

Разработан специально для временного пломбирования сроком до одного года. Просто наденьте предварительно заполненную насадку на любой шприц C-R®, введите материал, активируйте светом в течение 40 секунд и обработайте пломбу. Не требует смешивания. Tempit Ultra поставляется в однодозовых насадках для шприца, готовых для введения в препарированный зуб. Не требует травления или связывающих веществ. Tempit Ultra можно при необходимости наносить поверх прокладочных материалов, десенсибилизаторов, дезинфицирующих средств или пульпарных прокладок. Перед установкой постоянной пломбы Tempit Ultra удаляется бором.

В его составе использована биосовместимая активируемая светом полимерная матрица диуретан–диметакрилата, сходная с используемой в активируемых светом прокладках под пломбу. Для придания прочности и долговечности в состав Tempit Ultra входит 30% микрочастиц диоксида кремния. Tempit Ultra не вымывается. Он обладает большей прочностью на сжатие и меньшей растворимостью по сравнению с армированными материалами на основе эвгенолового цемента.

- Без смешивания, чист в работе. Перекрестное заражение исключено.
- Предварительно заполненные насадки для шприца для непосредственного введения в ротовой полости.
- Однодозовые насадки для шприца для легкого введения и максимальной асептики.
- Активируется светом – отверждается за 40 секунд или даже быстрее.
- Не содержит эвгенол, вызывающий аллергические реакции и замедляющий отверждение других композитов.
- Также представлена высвобождающая фтор версия Tempit® Ultra-F
- Нейтральный цвет
- Tempit Ultra является временным реставрационным материалом, который не предназначен для использования в качестве прокладки под пломбу или материала для наращивания зуба.
- Tempit Ultra не склеивается с этилметакрилатом.
- Tempit Ultra обладает механической фиксацией. При первом выдавливании из насадки (до активирования светом) материал липкий, что позволяет ему приклеиваться

к структуре. Tempit Ultra не сокращается при активации светом, поэтому механическая фиксация сохраняется, поэтому материал следует удалять с помощью бора.

- Можно использовать любой шприц Centrix C-R. Для облегчения работы мы рекомендуем шприц Snap-Fit.

- Не используйте с препаратами, содержащими эвгенол.

- 1 Очистите и продезинфицируйте препарированный зуб. При воздействии на пульпу нанесите защитное покрытие для пульпы на основе гидроксида кальция (Calciject™). На живой дентин рекомендовано нанести десенсибилизирующее покрытие (Glu/Sense™). Не используйте кислотное травление или связывающие вещества.

- 2 Препарированный зуб должен быть как можно более сухим.

- 3 Установите насадку TEMPIT® ULTRA в шприц. Снимите колпачок и выдавите материал. При необходимости используйте матрицу. Придайте форму с помощью обычных инструментов для композитов. Для уменьшения липкости опустите инструмент в спирт или охладите насадки Tempit® Ultra перед использованием.

- 4 Активируйте светом с помощью обычного галогенового источника света в течение 40 секунд. TEMPIT® ULTRA отверждается до 6 мм в глубину.

- 5 Для коррекции прикуса или удаления TEMPIT® ULTRA после отверждения используйте алмазные инструменты или боры с водяным охлаждением. Храните вдали от источников сильного видимого света. Не замораживайте.

- Можно использовать любой шприц Centrix C-R. Для облегчения использования мы рекомендуем шприц Snap-Fit.

- Так как Tempit является активируемым влагой материалом, важно сохранять предварительно заполненные тубы сухими. При избыточном воздействии влаги материал затвердевает в насадке.

- Да, можно использовать препарат на молочных зубах. Помните, что Tempit затвердевает под воздействием влаги. Он не абсорбируется, но вымоется со временем.

- Снимите колпачок.

- Вставьте канюлю в шприц C-R®/

- Медленно сдавите шприц с равномерным давлением и введите материал во влажную полость.

- Вдавите влажным инструментом и отпустите пациента.

При повторном визите Tempit® можно удалить стоматологическим зондом.

7. Calciject – композитная паста для временной обработки канала.

1) Вскройте упаковку и достаньте картридж с унидозой Calciject. Снимите защитный колпачок и вставьте картридж в диспенсер-дозатор Centrix C-R.

2) Выдавите немного материала сначала на подложку медленным плавным нажатием.

3) Согните канюлю для более удобного использования и поместите в канал зуба.

4) Введите нужное количество пасты в канал плавным нажатием.

5) После использования извлеките картридж из дозатора и сохраните для дальнейшего использования.

8. Champ - композитный светоотверждаемый материал.

- Тщательно очистите поверхность эмали нежирной чистящей пастой. Удалите все остатки.
- Хорошо прополощите, удаляя все остатки пасты из ямок и фиссур в эмали.
- Подготовьте проблемную эмаль.
- Изолируйте обрабатываемый участок и слегка просушите сжатым воздухом без примесей масла.
- Нанесите протравливающий гель на основе фосфорной кислоты на чистую зубную поверхность на 15 секунд. Хорошо прополощите.
- Легко высушите и удалите лишнюю воду ватным тампоном или чистым сжатым воздухом. Оставьте поверхности зуба слегка влажными. Champ закрепляется на поверхностях, слегка влажными от слюны; однако, лучше не допускать попадания слюны на подготовленный участок.
- Крепко возьмите оболочку из фольги и медленно отогните ее, открывая кисточку аппликатора и герметизирующий материал.
- Снимите кисточку аппликатора.

- Нанесите тонкую пленку Champ на обрабатываемый участок. Распределите материал кисточкой от бугорка до бугорка, но не покрывайте краевые гребни.
- Оставьте затвердевать на свету. Затвердевает при воздействии любого света. Время затвердевания при галогеновом свете при минимуме 300 мВт/см² составляет 20 секунд. Более мощный свет сокращает время отвердевания.
- Проверьте и откорректируйте при необходимости прикус.
- Выбросите всю упаковку после завершения процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Champ противопоказан пациентам, страдающим аллергией на любые его ингредиенты. Не применяйте при кариесе зубов.

9. NoMix - композитный временный цемент для коронок и мостов

NoMix Starter Kit – композитный временный цемент для коронок и мостов.

NoMix REFILL Kit – композитный временный цемент для коронок и мостов.

Применение:

1. Оставьте подготовленный зуб и внутреннюю поверхность коронки влажными но не мокрыми.
2. Нанесите тонкий слой временного цемента NoMix® на внутреннюю поверхность и края коронки.
3. Установите коронку и проверьте правильность ее установки. Попросите пациента прикусить.
4. Подождите 5 минут; цемент достаточно затвердеет, чтобы можно было счистить излишек. Очистите межзубные пространства, проводя сквозь них нить (НЕ ВВЕРХ).
5. Цемент полностью затвердеет примерно через 15 минут. Лучше всего порекомендовать пациенту не есть в течение 1 часа.

10. Access Crown - композитный двухкомпонентный материал для временных коронок и мостов. Цвета: A1;A2;A3;A3,5;B1;B3;BL;C2.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Сделайте дооперационный слепок, используя Голубой Виниловый Полисилоксан Access или материал для альгинатного слепка. Излишек между зубами следует удалить со слепка. Это обеспечивает прочный межзубный промежуток. При необходимости срежьте дополнительный слепочный материал, чтобы изменить форму и толщину временной конструкции.
- При построении временного моста участок тела моста можно удалить со слепка, чтобы создать тело моста во временном мосте. Затем проводится подготовка опорных зубов и удаление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда выпустите воздух после установки смешивающей канюли!

- Просушите слепок и заполните Access® Crown в требуемых подготовленных местах. Заполните по всей высоте. После того, как Матрица будет полной на $\frac{3}{4}$, (в течение 30 секунд) расположите ее во рту пациента.
- В течение 60 секунд (90 секунд с начала смешивания) оставьте Access® Crown для затвердевания, затем удалите изо рта. Материал будет иметь эластичную рыхлую консистенцию и будет перекрывать все надрезы или непараллельные препарированные участки. Материал обычно затвердевает за 3,5 дополнительные минуты. Однако, вы можете ускорить затвердевание, опустив временные протезы Access® Crown в горячую ванну на 30 секунд.
- Удалите из Матрицы и снимите лишний материал с помощью ножниц для подрезания зубных коронок и мостов или алмазного бора. Удалите смазанный слой салфеткой, смоченной в спирте.
- При должной тщательности при подготовке вашей коронки потребуется лишь немного или вообще не потребуются мезиальной или дистальной обработки. При необходимости обработки, однако, рекомендуется мелкозернистый алмазный бор.
- При необходимости полировки используйте композиционную глазурь, пемзу, полировочный порошок или алмазную полировальную систему.
- Примерьте временную конструкцию во рту пациента. Если она не встает на место, было удалено недостаточно лишнего материала или присутствуют

надрезы или непараллельные препарированные участки. (Для Access® Crown характерна очень небольшая усадка.)

- Зацементируйте любым временным цементом Access® или любым незвеноловым или звеноловым цементом.

Ремонт пустот или заполнение сужений

- Промойте и высушите на воздухе временную конструкцию Access® Crown.
- Придайте легкую шероховатость посредством алмазного бора.
- Обдуйте воздухом, чтобы удалить поверхностный порошок, затем начисто протрите спиртом.
- Снова установите в рот.
- Внесите композитное связывающее вещество VersaFlo в дефект и в течение 10 секунд оставьте для отвердевания на свету.
- Если дополнительная подгонка не требуется, выньте из рта и оставьте на свету для затвердевания еще на 30 секунд. Оставьте для закрепления.

ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ


Смешайте, вставьте в матрицу и установите в рот	Удалите из рта через*	Начните обработку и отделку еще через	Общее время затвердевания
30 секунд	60 секунд	3:30 минут	5 минут

* 90 секунд с начала смешивания

Дополнительные применения

Access Crown является точной временной конструкцией и может применяться для того, чтобы десневая нить оставалась под десной перед снятием окончательного слепка.

Применение:

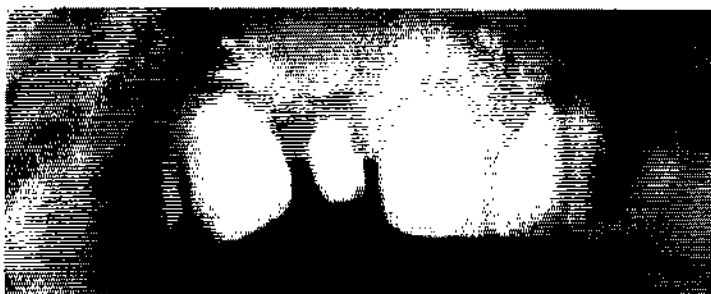

1. Подготовьте зуб обычным способом.



2. Введите Access Crown в предоперационный слепок, вставьте в рот и подождите 1 минуту.



2. Access Crown становится полупругим и легко удаляется.



3. Обработайте композитными инструментами.



4. Окончательное самоотверждение занимает всего лишь 2,5 минуты.

11. **Access** - композитный временный двухкомпонентный цемент.

Способ применения:

Снимите колпачок со шприца для автоматического смешивания, повернув его на 90° против часовой стрелки. Наденьте и закрепите смешивающую канюлю для шприца тип 10 поворотом на 90° по часовой стрелке. Материал автоматически смешивается в смешивающей канюле. Все шприцы Access выпускаются со съемным поршнем. Поршень можно легко вытащить из шприца и заменить, не вызывая утечки материала. Пробки в отсеках шприца остаются на месте, предотвращая взаимное загрязнение материалов.

Для получения более мягкого материала и для сохранения способности Access поддаваться обработке в течение более длительного времени добавьте небольшое количество вазелинового масла. Более твердый и быстрее застывающий материал получают добавлением окиси цинка (временное пломбирование).

Применение:

Нанесите тонкий слой Access внутрь временной коронки или моста и приложите его на подготовленный зуб. Временный цемент Access сохраняет свою способность поддаваться обработке в течение примерно 1 минуты. Все материалы застывают во рту за 4-6 минут. Установите временный компонент в рот. Удалите излишек материала через 3-5 минут.

Дополнительные инструкции/информация:

Влага (влажная культя) облегчает удаление временной пломбы. Перед удалением остатков Access сбрызните охлаждающей струей и немного подождите.

Храните Access при температуре 4 – 23°C.

Плотно закройте трубки после использования.

12. **C-R Hybrid** - композитная самоотверждающаяся смола.

Подготовьте зуб и нанесите самозатвердевающийся композиционный бонд.

Смешайте равные количества паст основы и катализатора. Не допускайте взаимного загрязнения банок. С этого момента время работы составляет 2,5 минуты.

Заполните смесью шприц-тюбик Centrix C-R (не NeedleTube). Заполните тюбик не более, чем наполовину!

Вставьте заглушку в тубик.

Установите тубик в цилиндр шприца.

Медленно и равномерно сдавите шприц и введите смесь.

После полного затвердевания (от 4 до 5 минут) обработайте C-R Hybrid.

13. Versaflo – композитная текучая светоотверждаемая смола. Цвета:
A1;A2;A3;A3,5;B1;OP.

Применение насадок:

1. Подготовьте зуб и нанесите связывающее вещество для композитов.
2. Снимите оболочку с картриджа и вставьте в пистолет C-R®
3. При необходимости согните иглу. Выдавите содержимое медленным равномерным движением. Сначала попробуйте на бумаге.
4. Наносите послойно не более 2 мм толщиной. Выполните отверждение светом каждый слой, не менее 30 секунд каждый.
5. После использования извлеките насадку из пистолета и утилизируйте. Простерилизуйте корпус шприца.

Применение шприца VersaFlo:

1. Подготовьте зуб и нанесите связывающее вещество для композитов.
2. Если необходимо, согните иглу. Выдавите содержимое шприца медленным непрерывным движением.
3. Сначала попробуйте на бумаге.
4. Выдавливайте послойно, не более 2 мм толщиной. Проведите отверждение светом каждый слой, не менее 30 секунд каждый.
5. После использования извлеките насадку из шприца и утилизируйте. Протрите шприц.

14. RapidCore – композитная двухкомпонентная самоотверждающаяся смола.

Цвета: White; Natural; Blue; Contrast.

Отверждение по всей глубине, без света, всего за 2 минуты.

Просто введите RapidCore через эксклюзивную насадку для смешивания. Всё готово для obtachивания за две минуты. Достигает высокой прочности связывания при использовании с совместимым связывающим веществом, таким как Adhere™. Передовая тиксотропная формула RapidCore позволяет ему легко проходить сквозь иглу без «ляпов», не требуя использования форм или матриц.

Отверждение за две минуты сокращает время визита на 50%.

Чистое самоотверждение – не зависит от глубины.

Канюля позволяет вводить материал на самое дно.

Формула «без ляпов» - нет необходимости использовать матрицу.

Прочность как у дентина – облегчает обработку.

Представлен в трех оттенках – натуральном, контрастном и белом.

Рентгеноконтрастный.

Содержит фторид.

6 ЭТАПОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТИ ЗУБА КОМПОЗИТОМ – ПРОЧНО, БЕЗ ПУСТОТ:

Расширьте корневой канал, так чтобы в него могла пройти игла RapidCore. Скосите края во избежание острых углов.

Протравите отверстие, тщательно промойте и осушите.

Нанесите связывающее вещество в соответствии с инструкцией производителя.

Введите канюлю до дна отверстия и введите материал медленным равномерным движением.

Продолжайте заполнение, вводя содержимое и при этом медленно вытаскивая иглу.

Дайте материалу полностью затвердеть, затем обточите и придайте форму культе. Результат – прочная, надежно закрепленная культа.

15. RapidCore MiniMix – композитная двухкомпонентная самоотверждающаяся смола. Цвета: White; Natural; Contrast.

Самозатвердевающий композитный материал для наращивания культи

Хранение: Для продления срока службы может использоваться охлаждение. Перед применением выдержать при комнатной температуре.

Показания к применению:

Для протезирования и наращивания дентина под готовые коронки и мосты

Подготовьте зуб:

Удалите весь кариес и старый реконструктивный материал.

Перед продолжением работы весь присутствующий эвгенол должен быть вымыт этанолом.

Протравите зуб:

Вставьте иглу в шприц и выдавите медленно с равномерным давлением.

Нанесите протравливающий гель с фосфорной кислотой Опух™ 40% сначала на эмаль, затем на дентин.

Подождите 10 секунд, затем прополощите водой и мягко высушите.

Поверхность должна быть влажной, но не блестящей.

Нанесите бонд:

Любое вещество, совместимое с самозатвердевающими композитами.

Нарастите культю:

Вставьте картридж RapidCore MiniMix в шприц C-R и снимите колпачок.

Закрепите на картридж смешивающую насадку.

Выдавите небольшое количество с канюли для обеспечения надлежащего смешивания и потока.

Введите материал в подготовленный зуб, погружая иглу в материал для снижения возможности образования пустот, заполните полностью. Время работы приблизительно составляет 60 секунд.

Обработка культи:

После полного затвердевания материала (обычно 2 минуты после введения) можно подрезать RapidCore до нужной формы, используя алмазы или боры с водяным охлаждением.

16. **Encore** – набор композитных материалов. Цвета: White with fluoride; White without fluoride; Natural with fluoride; Natural without fluoride.

Подготовьте зуб:

Удалите весь кариес и старый пломбировочный материал.

Перед обработкой необходимо смыть этанолом весь присутствующий эвгенол.

Нанесите бонд.

Смешайте и нанесите Encore:

Используя противоположные концы смесительного шпателя, распределите равные количества пасты Основы и Катализатора на бумаге для замешивания (примечание: для увеличения времени действия используйте более высокий процент пасты катализатора).

Тщательно перемешивайте в течение 10 - 15 секунд, затем обратно заполните канюлю шприца NeedleTube™.

Заполните канюлю не более, чем наполовину. Выдавите заполненную канюлю на зеленую пробку, чтобы герметизировать ее, и вставьте в пистолет шприца Centrix C-R®. При необходимости согните иглу.

Впрысните Encore в полость для штифта и/или подготовленную область, медленно сдавливая шприц с равномерным давлением. Канюлю должна быть погружена в материал в процессе введения, чтобы уменьшить вероятность образования пустот.

Отделка культи

После полного затвердевания материала (обычно через 4-5 минут после введения) можно обрезать Encore до нужной формы, используя алмазы или боры с водяным охлаждением.

17. Encore AF – композитный самоотверждающийся материал. Цвета: White with fluoride; Natural with fluoride.

Рекомендовано наносить Encore AF с помощью шприца с насадкой NeedleTube.

Encore AF не требует использования матрицы или формы для коронок.

Материалы, содержащие звенол, можно использовать ПОСЛЕ полного отверждения Encore AF.

Прочность Encore AF сходна с прочностью дентина, он легко обрабатывается обычным алмазным инструментом или бором.

Подготовьте зуб и нанесите связывающее вещество для композитов.

Смешайте равные количества паст Основы и Катализатора.

Не загрязняйте банку с одним препаратом другим. Вещество можно использовать в течение 2-1/2 с момента смешивания.

Наполните полученным материалом тубу для шприца Centrix C-R®. Не заполняйте тубу больше, чем 1/2 ее объема!

Вставьте пробку в тубу.

Поместите тубу в цилиндр шприца.

Выдавите содержимое медленным равномерным движением.

Проведите обработку после того, как Encore или Encore AF полностью отвержден (через 4-5 минут).

18. Encore D/C Automix – композитный материал двойного отверждения. Цвета: Natural with fluoride; Contrast with fluoride и **Encore D/C MiniMix** – композитный материал двойного отверждения. Цвета: Natural; Contrast.

- Изолируйте зуб, который должен быть подготовлен. Мы рекомендуем использовать пластину из латекса или ватные валики.
- Удалите все имеющиеся пломбировочные материалы и кариес из зуба. В этом время вы можете при необходимости установить любые пины или штифты.
- Протравите кислотой весь пломбировочный материал в течение 20 секунд, используя (32%-40%) фосфорную кислоту. Мы рекомендуем применять фосфорный протравливающий гель 40% Centrix Опух™.
- Промойте струей воды в течение 30 секунд и немного подсушите воздухом. Эмаль пломбировочного материала должна иметь матовый вид.
- Установите бондовую систему по вашему выбору на пломбировочный материал в соответствии с инструкциями изготовителя. Не применяйте бондовые системы в одной бутылке. При нанесении грунтовки убедитесь, что весь растворитель полностью испарился и пломбировочный материал имеет глянцевый вид. Перед затвердеванием на свету бонд следует сделать тоньше при помощи легкой струи воздуха.
- Нарращивание культи зуба
- Вставьте картридж Encore D/C Mini-Mix в шприц Centrix Snap-Fit™.
- Снимите колпачок с картриджа Mini-Mix и закрепите смешивающую насадку.
- Выдавите небольшое количество из канюли, чтобы обеспечить надлежащее смешивание и течение.
- Выдавите материал в подготовленный зуб, держа иглу в нижней части подготовленного зуба для уменьшения возможности образования пустот; заполните снизу вверх.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ

- Для простоты расположения металлическая матрица может быть размещена вокруг подготовленного зуба.
- Установите смешивающую канюлю непосредственно в пломбировочный материал и нажмите на курок пистолета аппликатора, чтобы выдавить пасту.

- В случае использования металлической матрицы проверьте стоматологическим зондом затвердевание материала перед удалением. Если материал затвердел, отрежьте и выполните отделку пломбировочного материала, используя алмазы или боры с водяным охлаждением.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОТОВОЙ КОРОНКИ

- Поместите смешивающую канюлю непосредственно в коронку и надавите на курок картриджа, чтобы выдавить пасту.
- Установите заполненную коронку на подготовленный зуб и удерживайте на месте до полного затвердевания пасты.

	Время работы	Время работы		
		Время самоотвердевания	Отверждение на свету	Полное время затвердевания
Самоотвердевание	1:30 секунд	3:30 секунд		5 минут
Отверждение на свету	1:30 секунд или меньше		40 секунд	2:10 секунд или меньше

Время работы с пастой для наращивания культи зуба Encore D/C MiniMix составляет 1,30 минут. Материал можно обрабатывать с помощью композитного инструмента. Рекомендуется инструмент для межзубного моделирования с тупым концом (IPC). Воздействуйте светом при помощи стандартной зубоветеринарной галогеновой лампы или СИД полимеризатора в течение 40 секунд (на слой толщиной 4 мм). Для более тонкого слоя (менее 2 мм) потребуется воздействие света только в течение 20 секунд. Для завершения химического затвердевания подождите 5 минут, прежде чем обрезать и обработать пломбировочный материал. При использовании металлической матрицы проверьте стоматологическим зондом затвердевание материала перед удалением его. Если материал затвердел, отрежьте и выполните отделку пломбировочного материала, используя алмазы или боры с водяным охлаждением.

19. EndoKit – набор для пломбирования каналов.
Обработка корневого канала зуба

ШАГ 1. Высушите

MicroAspirator – 18 г одноразовая канальная сушилка

- Просто закрепите на HVE ручке, согните иглу и отсосите жидкость из полости.
- Вставьте бумажный штифт и проверьте отсутствие жидкости. Если полость еще не сухая, повторите отсасывание.
- Если полость сухая, отсоедините от вакуумной линии и после применения утилизируйте надлежащим образом.
- Примечание: MicroAspirator может не отсасывать твердые частицы или очень вязкие жидкости. Прозрачная трубка позволит вам проверить и увидеть, идет ли отсасывание.

ШАГ 2. Примените лекарство

Calciject 25 мл паста на основе гидроокиси кальция 10°C – 24°C / 50°F – 75°F

- Выньте картридж Calciject из упаковки.
- Вытащите колпачок к оболочке и вставьте в шприц Centrix C-R.
- Сначала проверьте на салфетке. Медленно выдавите с равномерным давлением.
 - Согните иглу в соответствии с необходимостью и введите материал в канал.
 - После применения удалите картридж Calciject и утилизируйте надлежащим образом.

ШАГ 3. Герметизируйте

Tempit 35 г влагоактивируемая временная пломба 10°C – 24°C / 50°F – 75°F

- Снимите колпачок.
- Вставьте канюлю в шприц C-R.
- Положите ватный тампон на Calciject.


- Медленно сдавите шприц с равномерным давлением и введите материал во влажную полость.
- Вдавите влажным инструментом и отпустите пациента.
- При повторном визите удалите Tempit стоматологическим зондом. Введите через материал в ватный тампон, поверните на 45° и вытащите.

Предназначен для применения в течение не более 30 дней подряд.


Применение:




1. Прочистите и высушите канал при помощи MicroAspirator, закрепленного на высокоскоростном наконечнике

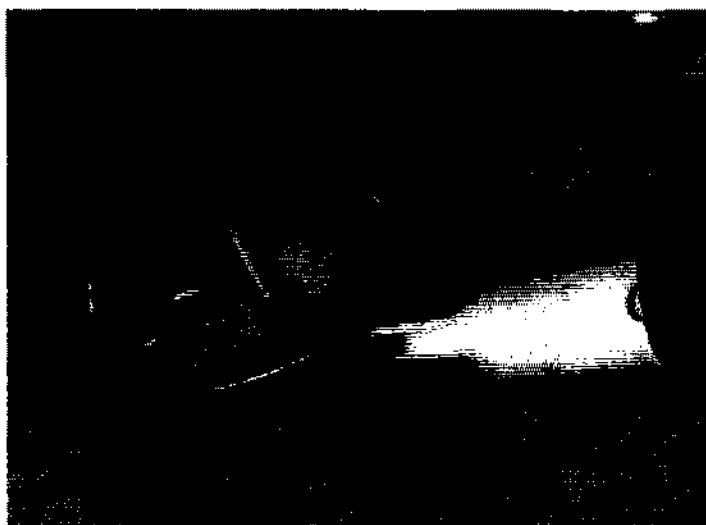

2. Обработайте канал с помощью Calciject

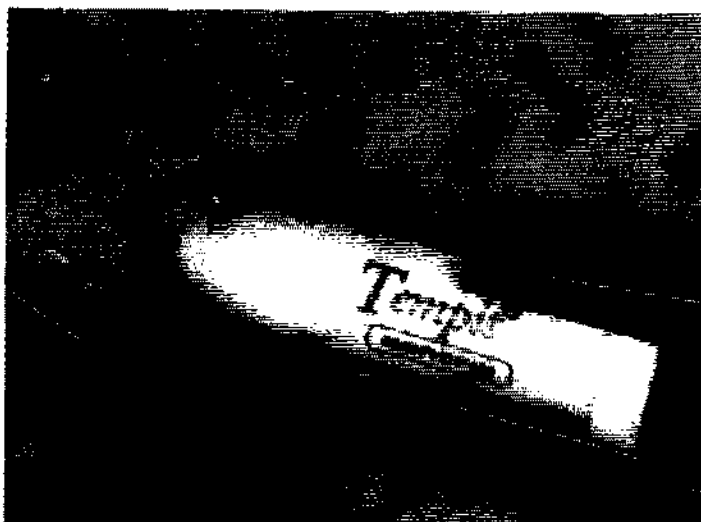

3. Введите Calciject в канал при помощи Tempit

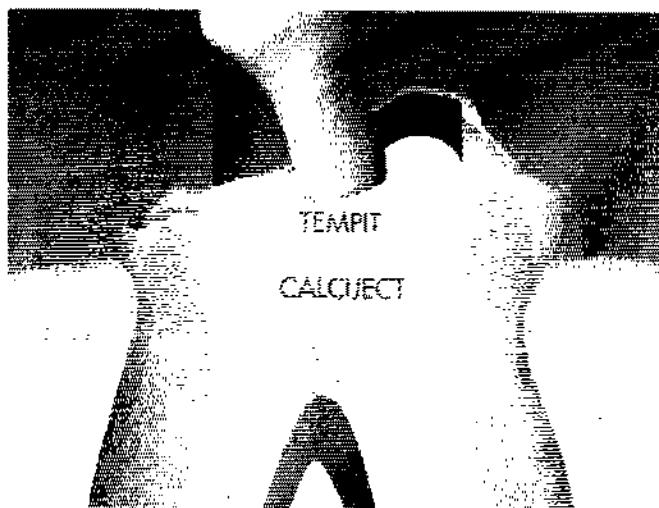

Принадлежности:

1. **LubeCube** – губка для чистки инструмента от композитных материалов.

Очиститель и лубрикатор для инструментов, используемых при работе с композитами.

Очищайте и смазывайте моделирующий инструмент, просто проводя его через прорезанную щель на поверхности губки.

Снимите с LubeCube клейкое покрытие, приклейте LubeCube к поверхности и проведите концом инструмента через прорезанную щель в губке. Очистка и смазывание поможет с легкостью моделировать композиты.

Очищает, сохраняет и смазывает инструменты с помощью ненаполненного фотоактивируемого Bis-GMA/UDMA мономера

Лубрикант совместим со всеми фотоотверждаемыми композитами и композитами двойного отверждения. Не содержит спирт и растворители.

Самоклеящаяся поверхность позволяет располагать приспособление в любом удобном месте

Лубрикант покрывает каждый инструмент тончайшей пленкой, не образуя капель

Моделирование композитов становится быстрее и проще, меньше «тянучесть» материала

Делает любой инструмент для композитов нелипким

Непрозрачный кубик из губки предохраняет смоляной лубрикант от полимеризации

Доступный по цене, одноразового использования

Более гладкая, менее пористая поверхность композита (см. иллюстрацию на обратной стороне)

БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ, МЕНЕЕ ПОРИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!


С LubeCube Без LubeCube

Фотоотверждаемый композит, увеличение 750х


LubeCube очищает и смазывает моделирующий инструмент, делая моделирование композита быстрее и проще.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ LUBECUBE:

Применение:

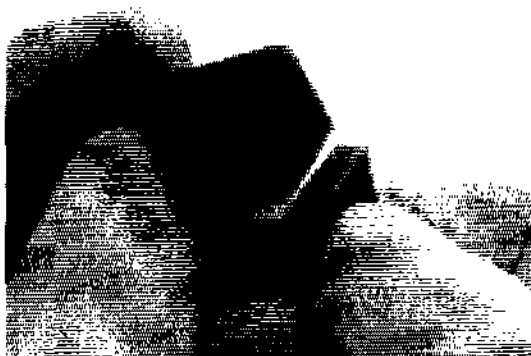

1. Снимите клейкое покрытие LubeCube

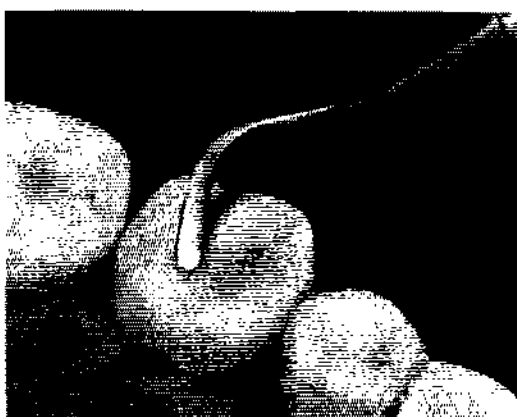

2. Разместите и приклейте LubeCube в любом удобном месте (на тыльной стороне ладони, фартуке, подносе и т.п.)



3. Введите конец инструмента для композитов в прорезанную щель на поверхности LubeCube. Проведите концом инструмента из стороны в сторону



4. Выньте инструмент и приступайте к моделированию. Повторите шаги 1-4 при необходимости до завершения моделирования. Выбросьте использованный LubeCube

Утилизируйте использованный LubeCube.

3. **Benda Brush Regular** – аппликатор, **Benda Brush Big Box** – аппликатор. Цвета RED;BLUE;YELLOW;GREEN, **Benda Brush Mini** – аппликатор, **Benda Brush Mini Big Box** – аппликатор. Цвета BLUE;GREEN; PURPLE; SILVER.

Аппликаторы Benda являются оригинальными сгибаемыми аппликаторами с кисточками из полимерных волокон. Они имеют химически стойкие волокна, которые захватывают самые грубые материалы. Кисточка обеспечивают повышенное удерживание и более равномерное распределение и разглаживание. Обычно применяются с отбеливающими веществами, протравками, бондами, герметиками, десенсибилизирующими веществами, адгезивами и смолами.

- Формованная головка сгибается под любым углом без распрямления.
- Нескатывающаяся, непоглощающая, химически стойкие полимерные волокна.
- Одноразовая, позволяет избежать очистки, исключается перекрестное заражение.

Предлагается с обычной и маленькой головкой.

- Имеются различные цвета для процедур с цветовым кодированием.

4. **Benda Micro** - аппликатор. Цвета RED;BLUE;YELLOW;GREEN, **Benda Micro Fine** – аппликатор. Цвета RED; YELLOW, **Benda Micro X-Fine** – аппликатор. Цвета: LIGHT GREEN; YVORY, **Benda Microtwin**- аппликатор. Цвета: BLUE; PINK, **Benda Microtwin X-Fine**- аппликатор. Цвета: GREEN; YVORY.

Аппликаторы Benda Micro созданы для точного внесения пломбировочных материалов в области ограниченного доступа. Могут применяться с герметиками, бондами, протравками, гемостатическими растворами, прокладками под пломбу и выявляющими растворами.

- Головка наклоняется под любым углом .
- Удобнее держать благодаря широкой ребристой ручке.
- Волокна без пуха пригодные для чистки.
- Легко достигать ограниченные участки.
- Одноразовые — не нужно очищать, позволяет избежать перекрестного заражения.
- Предлагается с головками стандартного, малого и супермалого размера.
- Работает с Benda Matic Dispenser.

5. **Benda Matic Dispenser** – диспенсер для аппликаторов.

Выдача аппликаторов Benda Matic осуществляется нажатием кнопки. Управление посредством одного касания последовательно выдает по одному аппликатору. Benda Matic легко загружается, сохраняет аппликаторы и помогает избежать взаимного загрязнения, одновременно повышая вашу производительность.

6. **Exposé Carries Indicator**- аппликатор. Цвета: FINE BLUE ; FINE RED; FINE YELLOW; FINE IVORY; X-FINE BLUE ;X-FINE RED; X-FINE YELLOW; X-FINE IVORY, **Exposé Carries Indicator Kit** – набор аппликаторов. Цвета BLUE; RED. Достаньте аппликатор Exposé из Benda®Matic.

Слегка смочите аппликатор Exposé водой или прикоснувшись к влажному зубу.

Проведите влажным аппликатором Exposé по зубу.

Промойте и проверьте участок на предмет оставшегося Exposé на поврежденном дентине.

Продолжайте работу как обычно.

7. Применение канюль AccuDose

AccuDose Low Viscosity – канюля с поршнем.

Универсальная канюля, которая при необходимости может быть закреплена на большем отверстии. Используйте для текучих композитов и культевых материалов, цемента и стеклоиономеров.

AccuDose High Viscosity – канюля с поршнем.

Большое отверстие обеспечивает более легкое прохождение материалов. Photobloc orange блокирует свет. Используйте для высоконаполненных композитов и культовых материалов.

AccuDose 20ga Needletube - канюля с поршнем.

Канюля с гибкой тупой иглой 20 калибра, удобная для введения материалов в отверстия для штифтов, глубокие проксимальные камеры и туннельные участки. Photobloc orange блокирует свет.

AccuDose 19ga Needletube - канюля с поршнем.

Канюля зеленого цвета с гибкой тупой иглой 19 калибра, удобная для введения материалов в отверстия для штифтов, глубокие проксимальные камеры и туннельные участки.

AccuDose 19ga Ribbontube - канюля с поршнем.

Подача тонкой и широкой ленты материала. Отлично подходит для размещения пломбировочного композита в винир и прямого композитного бонда на передние зубы.

AccuDose TriPack – набор канюлей.

Выберите канюлю в соответствии с вашими требованиями.

- Экономят время, обеспечивая наличие полной смеси материалов и устраняют необходимость переноса с бумаги для смешивания в рот.
- Сокращают количество пустот при любой реставрации.
- Предлагается в различных видах для конкретных применений.
- Канюли и поршни легко загружаются.
- Одноразовые.
- Photobloc оранжевого оттенка блокирует свет и продлевает срок службы светоактивируемых материалов.
 - Могут применяться со всеми шприцами и пистолетами, имеющимися в данный момент на рынке.

Применение:

1. Выберите соответствующую канюлю для материала.
2. Поместите материал на бумагу для смешивания.

3. Загрузите материал в канюлю. **Важно!** Не заполняйте больше, чем наполовину!
4. Вставьте поршень полностью в канюлю.
5. Поместите канюлю в цилиндр.
6. Медленно сожмите шприц с равномерным давлением.
7. Утилизируйте канюлю. Простерилизуйте шприц.

8. Mixing Nozzle Tips – канюля. Размер 18ga, 20ga.


Канюли автоматического смешивания Access имеют мягкую, гибкую иглу небольшого диаметра для внесения материала непосредственно в нужное вам место. Просто вставьте в смешивающую насадку. Благодаря тому, что достигается дно десневой борозды или пломбировочного участка и введение осуществляется снизу вверх, слепок или наращивание культи происходит более точно и без пустот.

- Желтые канюли — для применения со слепочными материалами GingiTrac и Access.
- Бирюзовые канюли — для применения со слепочными материалами Access.
- Зеленые канюли — для применения с Encore D/C и насадкой с желтым разъемом RapidCore.

9. DS 50 Crown Nozzles – смешивающая канюля, DS 25 Core Build Up Nozzles – смешивающая канюля.

для автоматического смешивания обеспечивают равномерное смешивание слепочных материалов Centrix, материалов для коронок, наращивания культи, ретракции десны и стеклоиономерных цементных материалов.

- для слепочных материалов (бирюзовые), 24 шт.
- для материалов по изготовлению коронок (синие), 50 шт.

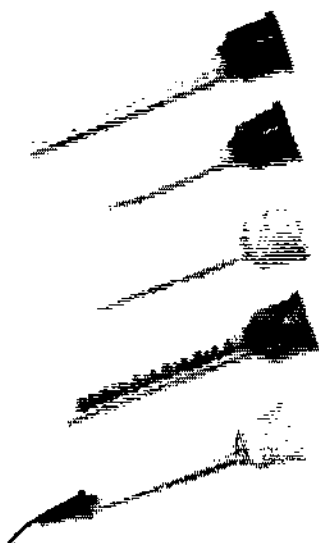

10. Core Build Up Combo Nozzles – смешивающая канюля.

Комбинированные канюли к материалам для наращивания культи зуба (желтые), 50 шт. Канюли для автоматического смешивания обеспечивают равномерное смешивание материалов наращивания культи зуба.

11. MiniMix Nozzles – смешивающая канюля.

Канюли для автоматического смешивания обеспечивают равномерное смешивание слепочных материалов Centrix, материалов для коронок, наращивания культи, ретракции десны и стеклоиономерных цементных материалов.

12. Micro Aspirator – канюля. Размеры 18ga, 20ga.

Просто вставьте MicroAspirator в высокоскоростной наконечник и очистите корневые каналы и отверстия для штифтов. Канюля проходит глубоко в канал и удаляет излишнюю влагу и остатки. Прозрачная трубка позволяет зрительно следить за отсасыванием и видеть, когда канал станет сухим. Micro Aspirator – канюля одноразового использования для обеспечения полной асептики.

Он позволяет вам очищать отверстия для штифтов и корневые каналы за секунды. Быстрее и проще очищает каналы, чем при применении множества бумажных штифтов.

13. NoMix Syringe Tips – канюля.

Предназначена для использования со шприцем NoMix

14. Versaflo Needles – канюля.

- 1 Подготовьте зуб и нанесите связывающее вещество для композитов.
- 2 Снимите оболочку с картриджа и вставьте в шприц C-R®
- 3 При необходимости согните иглу. Выдавите содержимое шприца медленным равномерным движением.

Сначала попробуйте на бумаге.

- 4 Наносите послойно не более 2 мм толщиной.

Выполните отверждение светом каждый слой, не менее 30 секунд каждый.

- 5 После использования извлеките насадку из шприца и утилизируйте.

Простерилизуйте корпус шприца.

15. SofNeedle – канюля.


SofNeedle - это канюля люэровской иглы 22 размера с губчатым наконечником. SoftNeedle разработана для завинчивания на люэровский шприц для нанесения жидкостей и легких гелей. Канюля обеспечивает точное и ровное нанесение жидкости непосредственно на поверхность зуба. Канюля не оставляет царапин и добавляет незначительное «обратное давление» для дополнительного контроля жидкостей.



16. Automix Syringe – диспенсер - дозатор. Модели: DS25 1:1, DS50 1:1

Диспенсер - дозаторы обеспечивают прямое введение материала, сводя к минимуму необходимость бумаги для смешивания и обеспечивая чистоту работы.

Дозаторы Automix относятся к типу «с отдельными картриджами».

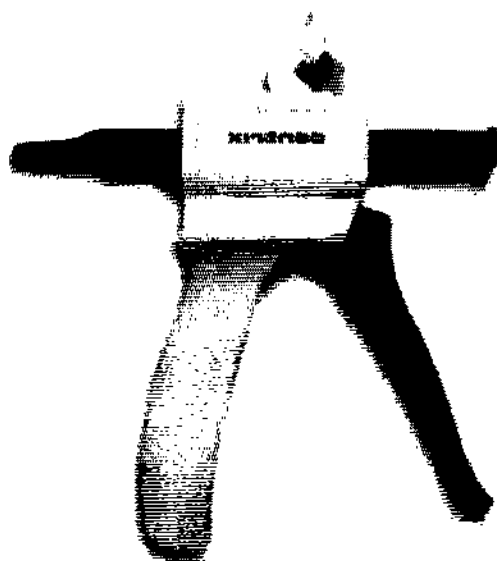

17. C-R Syringe – диспенсер – дозатор. Модели: MARK I; MARK II SNAP-FIT; MARK III; S/CLASS; SNAP-FIT SYRINGE; E/Z SYRINGE; SNUB NOSE SNAP-FIT SYRINGE; JUMBO SYRINGE; NUGUN.

Наберите материал в трубку. Не заполняйте более, чем наполовину!

Вставьте пробку подностью в трубку.

Поместите трубку в цилиндр шприца.

Медленно сожмите шприц с равномерным давлением.

Выньте и утилизируйте трубку после применения.

Простерилизуйте ручку шприца в автоклаве или в сухом жару не выше 285°F (140°C). Не используйте хемиклав для пластмассовых частей. Не погружайте и не вытирайте одноразовые трубки и пробки спиртом или иными растворителями.

3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материалы в сухом прохладном 5 – 24°C месте, без прямого солнечного света. Обращайте внимание на срок годности материала, который указан на каждой единице продукции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случаях обнаженной пульпы зуба или недостаточной толщины дентина рекомендуется защита пульпы (например, цемент с гидроокисью кальция). Чувствительность культи можно снизить использованием снижающих чувствительность препаратов до временного пломбирования. Полностью удалите эти материалы перед установкой постоянной пломбы (Не используйте препараты, содержащие эвгенол).

В случае обширных поверхностных и многоповерхностных полостей, а также при установке временной долгосрочной пломбы следует применять более твердый цемент.

- Не используйте GingiTac в качестве окончательного слепка.
- Оставьте смешивающие насадки на картриджах до следующего применения.
- Для картриджей требуется смешивающий пистолет DS50 1:1.
- Не трогайте материал в латексных или резиновых перчатках.

Access Crown

НЕ ПРИМЕНЯТЬ В ПРИСУТСТВИИ ЭВГЕНОЛА!

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ ПОДРЯД

ENCORE D/C MINIMIX

При обнаженной пульпе зуба используйте соответствующий прокладочный материал.

Следует избегать контакта с кожей и попадания в глаза. При случайном контакте немедленно промойте большим количеством воды и при необходимости обратитесь к врачу.

Не применяйте с материалами, содержащими эвгенол. Это может препятствовать полимеризации.

Необходимо избегать воздуха, загрязненного водой и маслом, так как они препятствуют полимеризации в области контакта.

Избегайте контакта с десной и соседними зубами.

Отсутствие возможности сухого участка является противопоказанием для размещения какого-либо композита.

Не применяйте пасту для наращивания культи зуба Encore D/C MiniMix для непосредственного нанесения на дентин вблизи пульпы или в случае открытой пульповой камеры.

На данный момент не известны систематические побочные эффекты; однако, не применяйте у пациентов с известной чувствительностью к Bis-GMA, перекиси бензоила или композиционным пластмассам.


SuperCure

Не подвергайте воздействию света! Не замораживайте!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ПРИСУТСТВИИ ЭВГЕНОЛА!

Не применяйте у пациентов с известной аллергией на Bis-GMA, перекись бензоила или другие компоненты.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
37 (Тридцать семь) листов
Ген. директор ООО «АРКОМ»

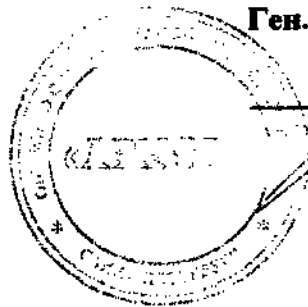

Селезнев Р.Ю.