

Назначение

Тележка с носилками предназначена для перевозки больных с различными заболеваниями

Тележка применяется для оказания лечебно-профилактических медицинских учреждений


Технические данные:

Габариты:

длина	2000мм
ширина	584мм
высота	822мм
масса не более	40кг
допустимая нагрузка не более	120кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00675 срок действия по 05.10.2010г.

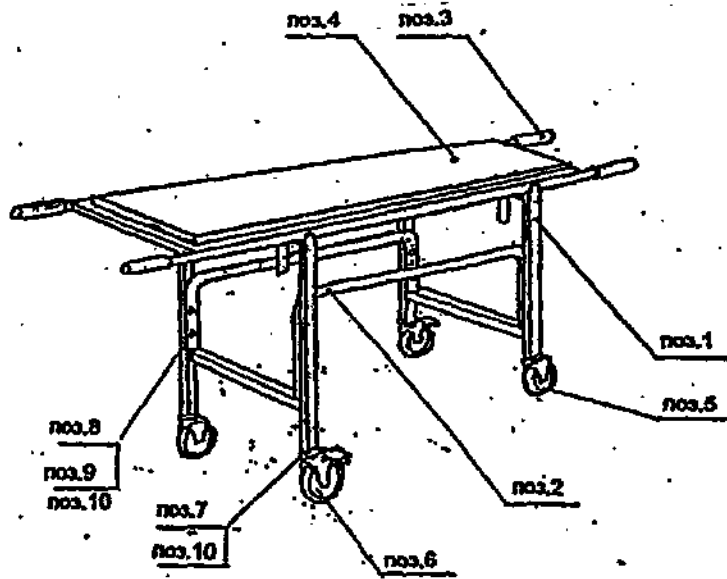

Комплект поставки:

Боковая (поз.1)	2шт
Связь (поз.2)	2шт
Носилки (поз.3)	1шт
Матрац (поз.4)	1шт
Колесо $\varnothing 125$ мм без тормоза (поз.5)	2шт
Колесо $\varnothing 125$ мм с тормозом (поз.6)	2шт
Болт M10 $\times$ 30 (поз.7)	4шт
Гайка M10 (поз.8)	2шт
Шайба (поз.9)	2шт
Шпилька 10.65Г2,5 (поз.10)	12шт

Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Собрать каркас из двух боковин (поз.1) и двух связей (поз.2), для чего связи (поз.2) отверстиями одеть на резьбовые шпильки на внутренней поверхности боковины (поз.1) и закрепить их комплектом крепежных деталей состоящего из шайбы (поз.9), шайбы 10.65Г2,5 (поз.10) и Гайки М10 (поз.8) Окончательно затянуть гайки с усилием не менее 52Н.м.

2. Привернуть колеса (поз.5,6) к ножкам боковин (поз.1) болтами $M10 \times 30$ (поз.7) через шайбу 10.65Г2,5 (поз.10).

(Внимание! Колеса (поз.5,6) должны быть установлены по диагонали относительно противоположных позиций.)

Усилие затяжки болтов при установке колес (поз.5,6) должно быть не менее 52 Н.м.

Периодически, один раз в 6 месяцев эксплуатации, проверять крепление колес к ножкам боковин.

Перемещение тележки осуществлять внутри корпуса, по ровному полу, с отключенными тормозами на колесах.

Хранение

Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Боковина, дельта продольная, носилки имеют защитное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости тележку подвергнуть дезинфекции 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением полупроцентного моющего средства типа «Лотос» или тампоном, смоченным 1-процентным раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-1689. Тампоны должны быть отжаты.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок тележки составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Металлической и Медицинской Мебели"

Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31

ПАСПОРТ

Тележка с носилками

МММ-201

ТУ-9451-002-32466639-2002

Назначение

Тележка с панелью из листа предназначена для перевозки больных с различными заболеваниями.

Тележка применяется для оснащения лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений.


Технические данные:

Габариты:

длина	1900мм
ширина	600мм
высота	905мм
масса не более	40кг
допустимая нагрузка не более	120кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00675 срок действия по 05.10.2010г.

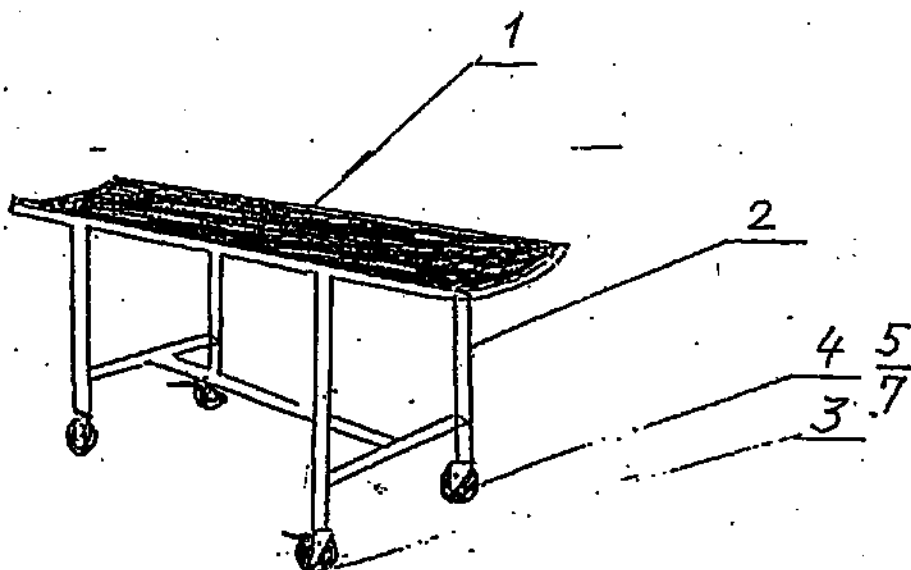

Комплект поставки:

1. Каркас металлический (поз. 2)
2. Лист металлический (поз. 1)
3. Колесо с тормозом
4. Колесо без тормоза
5. Болт М10х30
6. Гайка М10
7. Шайба 10.65Г2,5

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Привернуть колеса (поз. 3 и 4) к ножкам каркаса болтами М10х30 через шайбу 10.65Г2,5.

Внимание! Колеса (поз. 3 и 4) должны быть установлены по диагонали относительно одноименных позиций.

Усилие затяжки болтов для крепления опоры колесной - не менее 52 Нм. Периодически проверять крепление колес и осуществлять их подтяжку с усилием не менее 52Нм.

Перемещение тележки внутри корпуса осуществлять по ровному полу, с отключенными тормозами.

Хранение

Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от -30 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части тележки имеют защитно-декоративное полимерное покрытие. Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости тележку подвергнуть дезинфекции 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением полупроцентного моющего средства типа «Потос» или тампоном, смоченным 1-процентным раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-1689. Тампоном должны быть отжаты.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок тележки составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПРОДАВЦОМ ИЗДЕЛИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА!

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Металлической и Медицинской Мебели"

Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
т. 619-26-38
факс 618-51-31

ПАСПОРТ

Тележка с панелью из листа

МММ-217
ТУ-9451-002-32466639-2002

Назначение

Тележка МММ-216 предназначена для перевозки новорожденных детей.
Применяется как для оснащения роддомов, так и лечебных и лечебно-профилактических детских медицинских учреждений.


Технические данные:

Габариты:

длина	1610мм
ширина	748мм
высота	870мм
масса не более	40кг
допустимая нагрузка не более	120кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет

Сертификат соответствия № РОСС RU.НМ25.В00675 срок действия по 05.10.2010г.

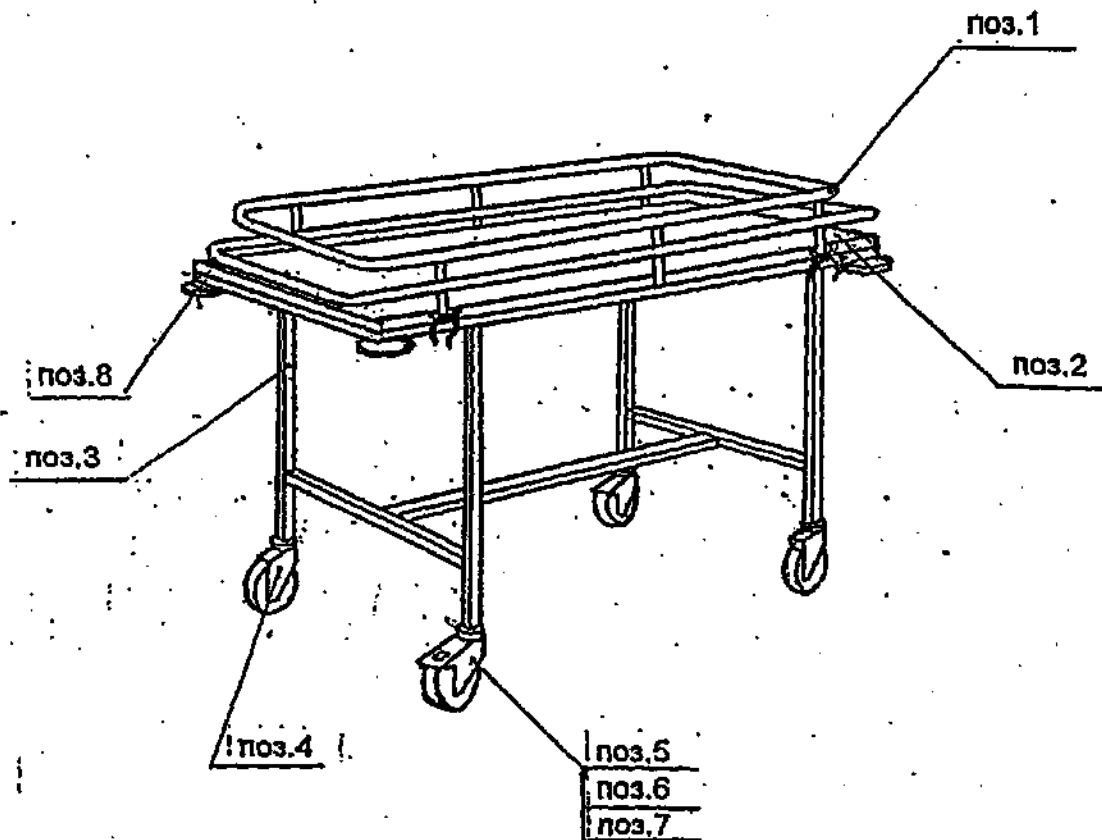

Комплект поставки:

Ложка (поз.1) - 1шт
Матрац с намотрационным (поз.2) - 1шт
Основание (поз.3) - 1шт
Колесная опора, без тормоза (поз.4) - 2шт
Колесная опора с тормозом (поз.5) - 2шт
Болты M10x30 (поз. 7) - 4шт
Шайба 10.65Г (поз. 6) - 4шт

Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Присвернуть колеса (поз. 4 и 5) к ножкам основания (поз. 3) болтами M10x30 через шайбу 10.65Г. Усилия затяжки болтов для крепления опор колесной (поз. 4 и 5) - не менее 52 Нм. (Внимание! Опоры колеса (поз. 4 и 5) устанавливать по диагонали относительно противоположных позиций).
2. Приложить (если не приложен в состоянии поставки) матрац (поз. 2) при помощи тесьмы к стойкам ограждения ложка (поз. 1), в местах их взаимного расположения.
3. Установить ложку (поз. 1) на основание (поз. 3) вставив четыре из трубы 20x20, находящиеся на нижней поверхности ложки, в отверстия ножек основания (поз. 3) до упора.

Примечание.

Для предотвращения от ударов о стены и другие предметы при перемещении, на углах ложка установлены 4 резиновых бампера (поз. 8).

Периодически, один раз в 6 месяцев эксплуатации, проверить крепление колес и ножек к раме.

Перемещение тележки внутри корпуса осуществлять по ровному полу, с отключенными тормозами.

Хранение

Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре

от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части тележки имеют защитное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости тележку подвергнуть дезинфекции: 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением полупроцентного моющего средства типа «Лотос» или тампоном, смоченном 1-процентным раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-1689. Тампоны должны быть отжаты. (За исключением матраца с матрасаццином.)

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок тележки составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Металлической и Медицинской Мебели"

Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31

ПАСПОРТ

Тележка для перемещения пациентов

МММ-216

ТУ-9451-002-32466639-2002

Назначение

Тележка с носилками предназначена для перевозки больных с различными заболеваниями.

Тележка применяется для оснащения лечебно-профилактических учреждений.


Технические данные:

Габариты:

длина	2000мм
ширина	584мм
высота	822мм
масса не более	40кг
допустимая нагрузка не более	120кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет

Сертификат соответствия № РОСС RU.НМ25.В00675 срок действия по 05.10.2010г.

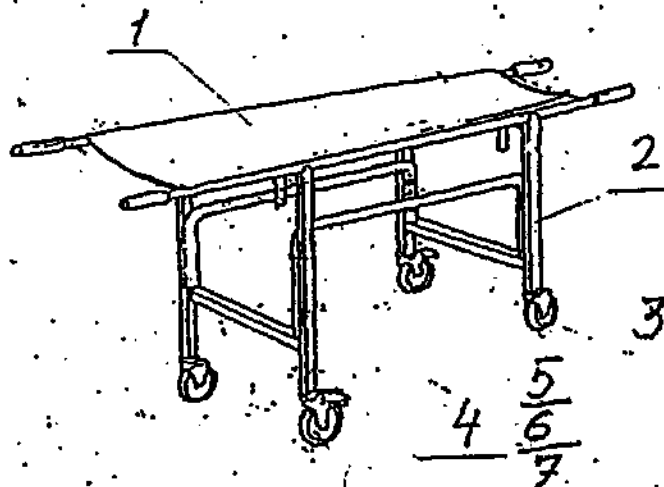

Комплект поставки:

1. Носилки (поз. 1) - 1шт.
2. Харкас (поз. 2) - 1шт.
3. Колесо без тормоза (поз. 3) - 2шт.
4. Колесо с тормозом (поз. 4) - 2шт.
5. Болт M10x30 (поз. 5) - 4 шт.
6. Шайба 10.65Г2,5 (поз. 6) - 12шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Привернуть колеса (поз. 3 и 4) к ножкам болтами M10x30 через шайбу 10.65Г2,5.

Внимание! Колеса (поз. 3 и 4) должны быть установлены по диагонали относительно одноименных позиций.

Усилия затяжки болтов для крепления опоры колесной - не менее 52 Нм.

Установить носилки на тележку (см. эскиз)

Периодически проверять крепление колес и осуществлять их подтяжку с усилием не менее 52Нм.

Перемещающие тележки внутри корпуса осуществлять по ровному полу, с отключенным тормозом.

Хранение

Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 90%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части тележки имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости тележку подвергнуть дезинфекции 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением полупроцентного моющего средства типа «Слотос» или танпомом, смоченным 1-процентным раствором хлорина по ТУ6-01-4689187-1689. Танпомы должны быть отжаты.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок тележки составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПРОДАВЦОМ ИЗДЕЛИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА!

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Металлической и Медицинской Мебели"

Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31

ПАСПОРТ

Тележка с жесткими носилками

МММ-202
ТУ-9451-002-32466639-2002.