

2. Для поддержания функциональности и безопасности системы дистрибьютор должен соответствующим образом обучить технический персонал больничного учреждения.

9.2 Осмотр вертикального кронштейна

ОСТОРОЖНО:



ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ: Не используйте светильник, если вертикальный кронштейн ослаблен или качается назад и вперед или из стороны в сторону. Немедленно вызовите технических специалистов Mediland.

Проверьте вертикальный кронштейн, чтобы выяснить не ослаблен ли он, осторожно перемещая его вперед/назад и из стороны в сторону. Если кронштейн качается, необходимо отрегулировать стойку; следует прекратить использование светильника. Немедленно вызовите технического специалиста Mediland.


9.3 Осмотр колпачка втулки

ОСТОРОЖНО:



ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ: Не используйте светильник, если колпачок втулки и самый нижний расширительный кронштейн соприкасаются друг с другом.

1. Визуально проверьте зазор между колпачком втулки и самым нижним расширительным кронштейном. По всей окружности должен быть одинаковый зазор 1,5 мм (см. рисунок справа).
2. Поверните самый нижний расширительный кронштейн на 360° и проверьте зазор между колпачком втулки и расширительным кронштейном. Если колпачок втулки и самый нижний расширительный кронштейн соприкасаются друг с другом во время вращения, не используйте светильник. Немедленно вызовите технического специалиста Mediland.

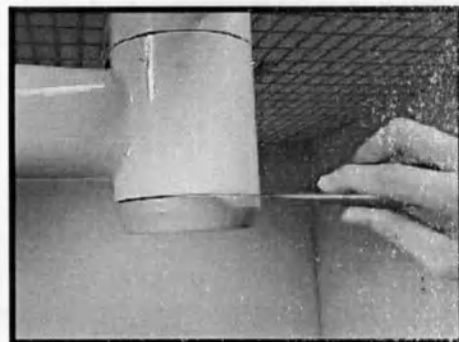

9.4 Замена батареи пульта дистанционного управления

При разряженной батарее ИК пульт дистанционного управления работает неправильно. Для замены батареи откройте небольшую крышку с задней стороны пульта дистанционного управления. В пульте дистанционного управления используется ртутная батарея (CR2025). При установке новой батареи следите, чтобы сторона со знаком «+» была направлена к крышке.

9.5 Замена плавкого предохранителя

ОСТОРОЖНО:



ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ: Перед заменой плавкого предохранителя отключите систему от сети электропитания.

Один плавкий предохранитель, используемый в светильнике, расположен под верхней крышкой у основания светильника.

1. Выкрутите винты из верхней крышки и снимите верхнюю крышку.

