

ОКП 94 5210

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО "Казанский медико-
инструментальный завод"



Н. Х. Шакиров

КАЛОПРИЕМНИКИ ПОЛЫМЕРНЫЕ

Паспорт

3872.6.563.002 ПС

Директор ООО

"Полимерные изделия"



М. М. Харчевников

2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Калоприемники полимерные (в дальнейшем - калоприемники), предназначены для сбора содержимого кишечника, непроизвольно выделяющегося из калостомы, расположенной на передней брюшной стенке.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Калоприемники выпускаются с диаметрами отверстия корпуса 40, 60, 80 мм, двух типов:

- I - без защитного козырька;
- II - с защитным козырьком.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В каждый комплект поставки калоприемника тип I должно входить:

- 1) Калоприемник полимерный тип I одного размера:
3872.8.663.002, 3872.8.663.002-01 или
3872.6.663.002-02 - 1 шт.

Запасные части

2) Кольцо прижимное	3872.8.683.051	- 1 шт.
3) Прокладка	3872.6.683.047	- 1 шт.
4) Корпус	3872.6.116.011	- 1 шт.
5) Пряжка	3872.8.661.002	- 2 шт.
6) Мешочек-сборник	3872.8.870.202	- 75 шт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3872.6.663.002 ПС		
Разраб.	АКСЕНОВА	Лист	10.04.02		КАЛОПРИЕМНИКИ ПОЛИМЕРНЫЕ	Лист	Лист
Проб.	НИТМЕТЗЯНОВ	Лист	10.06.02			2	6
Н. контр.	ВИНОКУРОВА	Лист	10.06.02			ООО "Полимерные изделия"	

Лента ~~тканая~~ эластичная - 1 м
шириной 50 мм
ТУ 17-09-326-80


8) Паспорт 3872.6.568.002 ПО - 1 экз.

1) Калоприемник полимерный тип II одного размера:
3872.6.563.003, 3872.6.563.003-01 или
3872.6.563.003-02 - 1 шт.

2) Кольцо прижимное	3872.8.683.051	- 1 шт.
3) Прокладка	3872.6.683.047	- 1 шт.
4) Корпус	3872.6.116.015	- 1 шт.
5) Прямка	3872.8.661.002	- 2 шт.
6) Мешочек-сборник	3872.8.870.202	- 75 шт.
7) Пояс (лента тканая эластичная шириной 50 мм)	ТУ 17-09-326-90	- 1 м

8) Паспорт	3872.6.563.002 ПС	- 1 экз.
------------	-------------------	----------

4.1 Калоприемник (рисунок 1) состоит из корпуса 1, на который надет мешочек-сборник 2, который закреплен на корпусе кольцом прижимным 3.

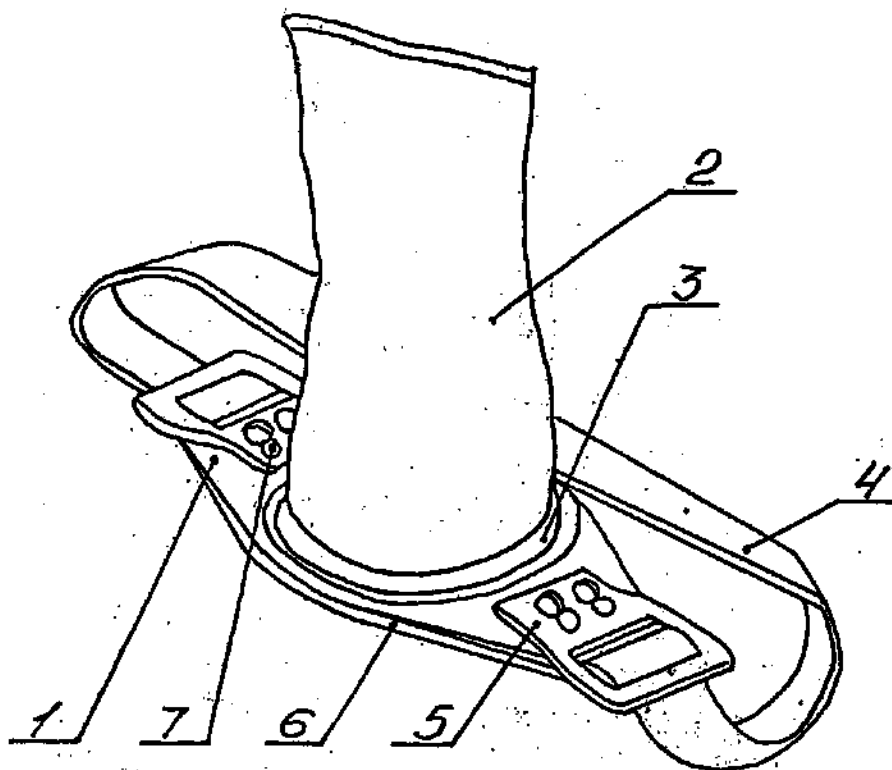

- 1 - корпус 3872.6.116.011 или 3872.6.116.015; 2 - мешочек-сборник 3872.8.870.202; 3 - кольцо прижимное 3872.8.683.051; 4 - пояс (лента тканая эластичная) ТУ 17-09-328-90; 5 - пряжка 3872.8.661.002; 6 - прокладка 3872.6.683.047; 7 - замок 3872.8.675.003

Рисунок 1 - Калоприемник полимерный.

Калоприемник крепится к телу больного с помощью ленты тканой эластичной ① 4, двух пряжек и замка 7.

Уплотнение между корпусом и телом больного достигается за счет прокладки 6.

5 СТЕРИЛИЗАЦИЯ

5.1 Детали калоприемника выдерживают предстерилизационную очистку моющим средством "Лотос" при температуре $+(50 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение (15 ± 1) мин. с последующим ополаскиванием под проточной водой ГОСТ 2874-73 в течение (10 ± 1) мин., а также дезинфекцию 1 %, раствором хлорамина ТУ 8-01-4589387-16-89 в течение (30 ± 5) мин., при температуре не менее $+18^\circ\text{C}$.

№ подл. Подпись и дата
Взам. инв. № инв. № дубл. Подпись и дата

1 1/3м. 5872.032-200 14.09.08

3872.6.563.002 ПС

Лист
4

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Калоприемник после очистки соберите в следующей последовательности: открытый конец мешочка-сборника проведите в отверстие прижимного кольца (рисунок 2) и отогните конец мешочка на кольцо, равномерно распределяя складки мешочка по его окружности. Величина отогнутого края стенки должна быть в пределах 10-20 мм. Мешочек с кольцом оденьте на корпус (рисунок 3) и пристегните к телу с помощью ленты тканой эластичной.


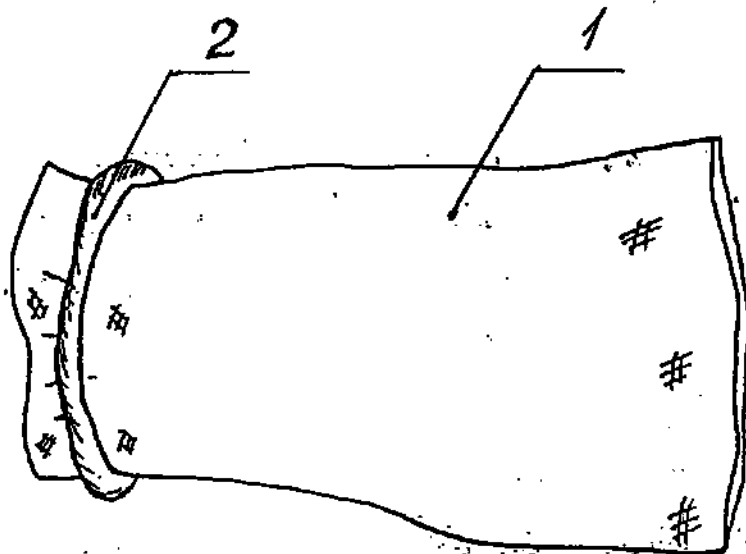


Рисунок 2 - Мешочек-сборник 1 с прижимным кольцом 2

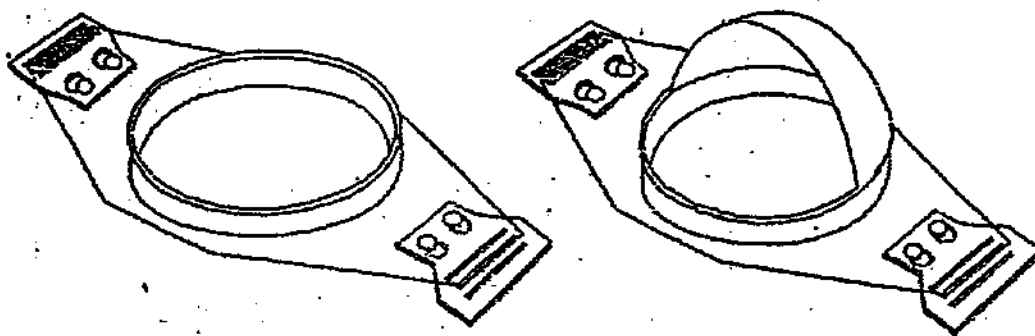

Тип I - без защитного козырька Тип II - с защитным козырьком

Рисунок 3 - Корпус калоприемника полимерного типа I и типа II

№ п/п, № подл. Подпись и дата

Иск. лист № док. Подпись и дата

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3872.8.563.002 ПС

лист

5

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Калоприемники в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при +25 °С.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Калоприемники полимерные соответствуют
ТУ 9452-114-05519988-2002 и признаны годными для эксплуатации.

ОТК _____ Дата выпуска _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу калоприемников при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации калоприемника - 3 месяца со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 420021, г. Казань, ул. С.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № инв. № дубл. Подпись и дата

Прошито и скреплено печатью
6 (шесть) листов



Директор

Ахмадуллин Р.А.