

94 5210

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Казанский медико-
ментальный завод»



Шкитров Н.Х.
2002 г.

ЛОТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ
ПОЧКООБРАЗНЫЕ ЛПТ- «КМИЗ»,
160 и 260 мм

Этикетка

0802.9.503.000 ЭТ

Генеральный директор
ЗАО «Полимерные изделия»



Юсупов А.Ю.
2002 г.

№ подл. Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. № дубли. Подпись и дата

Лотки полимерные почкообразные ЛП - «КМИЗ», 160 и 260 мм (в дальнейшем - лотки) предназначены для применения при различных процедурах и хирургических операциях.

Вид кинематического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал лотков - ~~полипропилен марки PP1500J ТУ 2211-136-05766801, окрашенный~~ ^{полипропилен марки 277-73 ГОСТ 16338-85} ^{концентрациями пигментов, имеющими разрешение для контакта с пищевыми продуктами и санитарно-гигиеническое заключение} ⁽²⁾
 Масса лотка полимерного почкообразного ЛП - «КМИЗ», 160 мм - не более

0,04 кг.

Масса лотка полимерного почкообразного ЛП - «КМИЗ», 260 мм - не более

0,09 кг.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Лотки подвергаются дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации в соответствии с ОСТ 42-21-2-85.

Дезинфекция проводится 3% раствором перекиси водорода при температуре не менее +18°C в течение (80 ± 5) мин.

Предстерилизационная очистка проводится ополаскиванием изделия проточной водой в течение (0,5 ± 0,1) мин, замачиванием в моющем растворе «Лотос» при температуре раствора + (50 ± 5)°C в течение (15 ± 1,0) мин, мойкой каждого изделия в течение (0,5 ± 0,1) мин, ополаскиванием ^{под} проточной водой в ^{по ГОСТ 6709-72} течение (10 ± 1) мин, ополаскиванием дистиллированной водой в течение (0,5 ± 0,1) мин, и сушкой горячим воздухом при температуре + (85 ± 2)°C до полного исчезновения влаги. ⁽¹⁾

Стерилизация проводится полным погружением изделия в 6% раствор перекиси водорода ^{по ГОСТ 177-88} при температуре раствора не менее +18°C, время выдержки (360 ± 5) мин или при температуре раствора + (50 ± 2)°C в течение (180 ± 5) мин с последующим ополаскиванием изделия стерильной водой.

2	1/3м	3872.003-200	ЛП	16.03.02	0802.9.503.000 ЭТ
1	1/3м	3872.005-200	ЛП	16.04.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.	Карпова	Кар	18.03.02		
Проб.	Нигметзянов	Ниг	29.02.02		
И. контр.	Винокурова	В	19.03.02		
ЛОТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЧКООБРАЗНЫЕ ЛП - "КМИЗ" 160 и 260 мм Этикетка					Лит. Лист Листов 1 2 3 "ОАО "КМИЗ"

ХРАНЕНИЕ

Лотки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Лотки соответствуют техническим условиям ТУ 9452-111-05519988-2002 и признаны годными для эксплуатации.

ОТК _____

Дата выпуска _____ ①

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации лотков – 12 месяцев со дня продажи.

В случае отсутствия штампа торговой организации, гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 420024, г. Казань, ул. С. Сайдашева, 12
ООО "Полимерные изделия" ①
ОАО «Казанский медико-инструментальный завод».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Лотки не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.


№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № М.П. и дата Подп. и дата

0802.9.503.000 ЭТ

Лист

3

Прошито и скреплено печатью
3 (три) листа

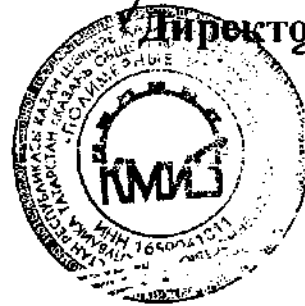

Директор

Ахмадуллин Р.А.