



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Управляющей компании

ООО «Юнимед-менеджмент»

А.Н.Шибанов

_____ июля 2010г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения

Тест-полоски URISCAN для анализаторов мочи URISCAN PRO, URISCAN OPTIMA Производство YD Diagnostics, Южная Корея

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Тест-полоски URISCAN для анализаторов мочи URISCAN PRO, URISCAN OPTIMA предназначены для проведения полуколичественного анализа мочи.

1.2. Тест-полоски URISCAN для анализаторов мочи URISCAN PRO, URISCAN OPTIMA применяются в клиничко-диагностических лабораториях лечебно-профилактических и научных учреждениях.

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

2.1. При смачивании тестовой зоны тест-полосок URISCAN мочой сухие реактивы растворяются и в тестовой зоне протекают химические реакции с аналитом, приводящие к изменению окраски тестовой зоны. Концентрация аналита оценивается по степени изменения окраски тестовой зоны. Результат исследования может быть зафиксирован визуальным методом или при помощи анализаторов мочи URISCAN.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Потенциальный риск применения полосок – класс I.

3.2. Все компоненты тест-полосок URISCAN для анализаторов мочи URISCAN PRO, URISCAN OPTIMA в используемых концентрациях являются нетоксичными.

3.3. При работе с полосками необходимо соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противозидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (Москва, 1981 г.).

3.4. При работе с полосками следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирусы гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

3.5. Химическая посуда и оборудование, которые используются при работе с полосками, должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.

3.6. При работе с полосками необходимо избегать попадания пыли или иных механических частиц на рабочую поверхность полосок.

Несоблюдение этих правил может привести к погрешностям измерений.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСОК

4.1. Состав Тест-полосок URISCAN:

- Тест-полоски URISCAN 1 Protein strip,
- Тест-полоски URISCAN 1 Glucose strip,
- Тест-полоски URISCAN 1 Ketone strip,
- Тест-полоски URISCAN 2 Ghuketo strip,
- Тест-полоски URISCAN 3 GPH strip,
- Тест-полоски URISCAN 4 Hemo GPH strip,
- Тест-полоски URISCAN 5 Hemoketo GPH strip,
- Тест-полоски URISCAN 6L strip,
- Тест-полоски URISCAN 11 strip,
- Тест-полоски URISCAN 7 strip.

5. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Тест-полоски URISCAN для анализаторов мочи URISCAN PRO, URISCAN OPTIMA

- Анализатор мочи
- Тест-полоски URISCAN
- Абсорбирующая бумага

6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Пробы мочи.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1. Соберите свежую, хорошо размешанную, нецентрифугированную мочу в чистый и сухой контейнер.

7.2. Перемешайте пробу мочи перед проведением теста.

7.3. Опустите полоску в мочу до последней тестовой зоны не более чем на 1 сек.

7.4. Удалите излишки мочи с помощью абсорбирующей бумаги.

7.5. При хорошем освещении и с помощью контрольной таблицы, расположенной на этикетке пенала считайте результаты теста через 60 сек (120 секунд для лейкоцитов).

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Тест-полоски должны храниться при температуре $+2 \pm 25^{\circ}\text{C}$, в течение всего срока годности.

8.2. Срок годности полосок 24 месяца.


8.3. Для получения достоверных результатов исследований, необходимо строгое соблюдение инструкции по применению тест-полосок и инструкции по эксплуатации анализатора глюкозы.

По вопросам качества обращаться в ООО «Юнимед-Импэкс», по адресу:

129301, Москва, ул. Касаткина 3 а

тел. (495) 935-86-50

Руководитель сервисной службы

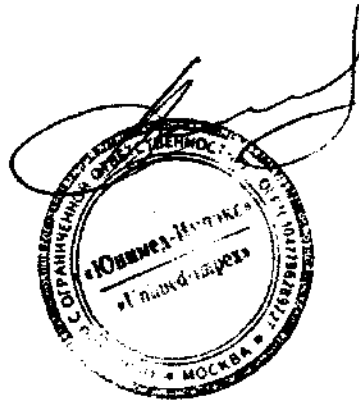

Дылдин Д.Р.