

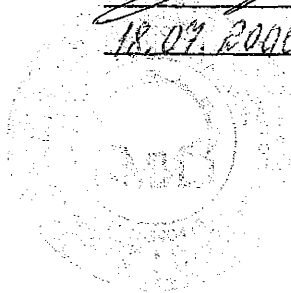
ОКП 94 3830

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"

 М. М. Харчевников
18.07.2006



КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.012 ST

№ п/п	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата

2006

Катетер уретральный мужской полимерный (в дальнейшем - катетер), предназначен для опорожнения и промывания мочевого пузыря.

Область применения - урология.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой однопросветную эластичную прозрачную трубку с прямым закрытым концом и одним боковым отверстием. На проксимальном конце катетера имеется раструб под шприц "Луер".

Катетер изготовлен из пластика гранулированного медицинского рецептуры ПМ-1/42 ТУ 6-05-1533-85.

Катетеры изготавливают с наружными диаметрами трубки: 4,33; 4,66; 5,00; 5,33; 5,66; 6,00; 6,33; 6,66; 7,33; 8,00 мм (№13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 по шкале Шарьера).

Длина катетера - 360±10 мм.

Катетеры выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °С.

3872.6.910.012 ЭТ

Изм. Лит. № докум. Подпись Дата

Разраб. Ансенова Инф 3.07.06
Проб. Игметзянов Н.С. 3.07.06

КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНЫЙ
МУЖСКОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Лит. Вост. Изм. 2 3

Этикетка

ООО "Полимерные
изделия"

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Катетеры соответствуют техническим условиям
ТУ 9438-002-44942795-2008 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности катетеров - 3 года со дня проведения
стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию-
изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО
ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Катетеры не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, уста-
новленном МЗ России.

№ п/п
Дата
Подпись и дата
Взам. инв. № инв. № д/б
Подпись и дата

3872.6.910.012 3T

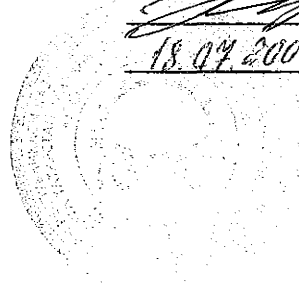
ОКП 94 3630

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"


М. М. Харчевников
18.07.2006г.



КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.026 БТ

№ п/п	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

2006

Катетер уретральный детский полимерный (в дальнейшем - катетер), предназначен для опорожнения и промывания мочевого пузыря.

Область применения - урология.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой однопросветную эластичную прозрачную трубку с прямым закрытым концом и одним боковым отверстием. На проксимальном конце катетера имеется раструб под шприц "Луер".

Катетер изготовлен из пластика гранулированного медицинского рецептуры ПМ-1/423 ТУ 6-05-1533-85.

Катетеры изготавливают с наружными диаметрами трубки: 2,00; 2,66; 3,00; 3,33; 3,66; 4,00 мм (№№ 8, 9, 10, 11, 12 по шкале Марьера).

Длина катетера - 360 ± 10 мм.

Катетеры выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре ± 25 °С.

3872.6.910.026 37

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Исенова	И	И	3.07.06
Пров.	Игметзянов	И	И	
И.контр.	Инокурова	И	И	3.07.06

КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

Лист	Всего	Листов
1	2	3
ООО "Полимерные изделия"		

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Катетеры соответствуют техническим условиям
ТУ 9436-002-44942795-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности катетеров - 3 года со дня проведения
стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятие-
изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО
ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Катетеры не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, уста-
новленном МЗ России.

на № акта Подпись и дата Взам. инв. № инв. № факт. Подпись и дата

3872.6.910.026 31

ОКП 94 3630

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"


М.М. Херчевников
18.07.2006



КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.006 ЭТ

2006

№ инв. Подпись и дата
Взам. инв. № инв. № докум. Подпись и дата

Катетер уретральный женский полимерный (в дальнейшем - катетер), предназначен для опорожнения и промывания мочевого пузыря.

Область применения - урология.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой однопросветную эластичную прозрачную трубку с закрытым концом и двумя боковыми отверстиями.

На проксимальном конце катетера имеется раструб под шприц "Луер".

Катетер изготавливают в двух вариантах:

I - с прямой заходной частью;

II - с изогнутой заходной частью.

Катетеры изготавливают с наружными диаметрами трубки: 3,66; 4,00; 4,33; 4,66; 5,00; 5,33; 5,66; 6,00; 6,33; 6,66; 7,33; 8,00 мм (№11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 по шкале Шарьера).

Длина катетера - 220 ± 10 мм.

Катетеры выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °С.

3872.6.910.006 ЭТ

М.п. Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Арсенова	Лук	30.06
Проб.	Нигметзянов	Хасан	
Н. контр.	Винокурова	Ирина	30.06

КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

Лист	Лист	Лист
1	2	3

ООО "Полимерные
изделия"

№ докум. Подпись и дата

ОЖП 94 3630

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"

 М. М. Харчевников



КАТЕТЕР ПУЛОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.029 BT

№ п/п	Подпись и дата	Взам. инв. № инв. № дудл.	Подпись и дата

2006

Катетер пулочный детский полимерный (в дальнейшем - катетер) предназначен для введения медикаментозных препаратов в пулочную вену при несовместимости крови матери и ребенка.

Область применения - гинекология.

Катетер предназначен для одноразового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой однопросветную эластичную прозрачную трубку с прямым открытым концом и одним боковым отверстием. На проксимальном конце катетера имеется раструб с заглушкой.

Катетер изготовлен из пластика гранулированного медицинского рецептуры ПМ-1/42 ТУ 6-05-1533-85.

Катетеры изготавливают с наружными диаметрами трубки: 1,33; 2,0; 2,66; 3,33 мм (№ 4, 6, 8, 10 по шкале Шарьера).

Длина катетера - 300±10 мм.

Катетеры выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

№ изделия. Подпись и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подпись и дата.

3872.6.910.029 ЭТ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Аксенова	<i>И.И.</i>	29.06.00
Проб.		Чигметзянова	<i>Ч.И.</i>	
Н. контр.		Винокуров	<i>В.И.</i>	29.06.00

КАТЕТЕР ПУЛОЧНЫЙ
ДЕТСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

Лист	Лист	Лист
1	2	3
ООО "Полимерные изделия"		

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Катетеры соответствуют техническим условиям
ТУ 9436-002-44942795-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности катетеров - 3 года со дня проведения стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию-изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Катетеры не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.

№ п/п
Дата
Подпись
№ инв.
№ док.
Подпись
и дата

3872.6.910.029 ЭТ

ОКП 94 3830

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"

 М. М. Харчевников

18.07.2006 г.



КАТЕТЕР ЖЕЛУДОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.030 ЭТ

2006

№ п/п, наименование и количество, дата, подпись и дата

Катетер желудочный детский полимерный (в дальнейшем - катетер) предназначен для искусственного вскармливания недоношенных, больных и послеоперационных детей.

Область применения - гинекология.

Катетер предназначен для одnorазового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой однопросветную эластичную прозрачную трубку с прямым закрытым концом и одним боковым отверстием.

На проксимальном конце катетера имеется раструб с заглушкой.

Катетер изготовлен из пластика гранулированного медицинского рецептуры ПМ-1/42 ТУ 8-05-1533-85.

Катетеры изготавливают с наружными диаметрами трубки: 1,33; 2,0; 2,66; 3,33 мм (№ 4, 6, 8, 10 по шкале Шарьера).

Длина катетера - 480 ± 10 мм.

Катетеры выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

3872.6.910.030 ЭТ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Аксенова	И.И.	28.06.01
Проб.		Чигметзянов	С.В.	
И.И. Коштыков		Винокуров	А.С.	28.06.01

КАТЕТЕР ЖЕЛУДОЧНЫЙ
ДЕТСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

Лист	Всего	Листов
41	1	2

ООО "Полимерные
изделия"

И.И. Коштыков
Подпись и дата
Взам. инв. № инв. № докум. Подпись и дата

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Катетеры соответствуют техническим условиям
ТУ 9436-002-44942795-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности катетеров - 3 года со дня проведения стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятия-изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Катетеры не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.

№ п/п Дата Подпись и дата
Взят. инв. № инв. № дубл. Подпись и дата

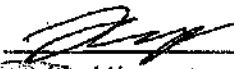
3872.6.910.030 3T

ОКП 94 3630

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"

 М. М. Харчевников
04.04.2006 г.


КАТЕТЕР ПОДКЛЮЧНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.072 БТ

№ п/п. Подпись и дата. Изам. инд. № инд. № дубл. Подпись и дата

2006

Катетер подключичный полимерный (в дальнейшем - катетер), предназначен для инфузии большого количества крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в подключичную и другие вены в клинических условиях.

Область применения - общая хирургия.

Катетер предназначен для однократового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой полимерную трубку с раструбом с присоединительными размерами под шприц "Луер", проводник и пробку.

Катетеры выпускаются с внутренними диаметрами трубки 0,6; 1,0 и 1,4 мм.

Длина катетера трубки с раструбом:

Ø 0,6 мм и 1,0 мм - 150±15 мм;

Ø 1,4 мм - 200±15 мм.

Детали катетера изготовлены из следующих материалов:

- трубка из смеси полиэтилена высокого давления марки 15803-020 сорт высший или 1 ГОСТ 16337-77 и полиэтилена низкого давления марки 277-73 ГОСТ 16338-85;
- раструб из полиэтилена высокого давления марки 15803-020 сорт 1 ГОСТ 16337-77;
- проводник из лески капроновой рыболовной ТУ 6-13-29-89;
- пробка из смеси резиновой марок И-51-1, И-51-2 ТУ 38.106440-86.

Катетеры выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

3872.5.910.072 3T

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Аксенова	И	6.07.06	
Проб.	Игметзянов	И	6.07.06	
Исполн.	Игметзянов	И	6.07.06	

КАТЕТЕР ПОДКЛУЧИЧНЫЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

Лист	Лист	Листов
1	2	3

ООО "Полимерные
изделия"

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом, стиливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °C.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ

Категория соответствует техническим условиям
ТУ 9436-002-44942795-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения катетеров - 3 года со дня проведения стерилизации.

СВЕТЛАЯ О РЕКЛАМНОЙ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию-изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

COMMITTEE ON VETERANS AFFAIRS

Кэтееры не тонычны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЭ России.

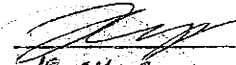
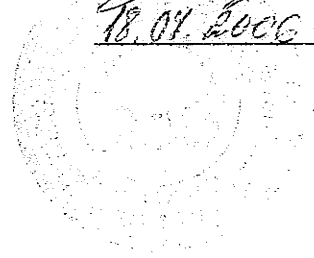
3872.6, 310.072 GT

ОКП 94 3830

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"


18.07.2006 г.

КАТЕТЕР НОСИЛОТЧНЫМ ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА
ОДНОХОДОВОЙ ПОЛИМЕРНЫМ

Этикетка

3872.6.910.018.5T

№ п/п	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата

2006

Катетер носоглоточный для подачи кислорода одноканаловой полимерный (в дальнейшем - катетер) предназначен для подачи кислорода через носоглотку.

Область применения - анестезиология.

Катетер предназначен для однократового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой однопросветную эластичную прозрачную трубку, заходная часть которой изогнута и на боковой поверхности имеется отверстие. На проксимальном конце катетера имеется раструб для подсоединения переходника (прямого).

Катетер изготовлен из гранулированного медицинского пластика марки ПМ-1/42 ТУ 6-05-1533-85, переходник - из полиэтилена низкого давления марки 277-73 ГОСТ 16338-85.

Катетеры изготавливают с наружными диаметрами трубки: 2,00; 3,33; 3,66; 4,66 мм (№№ 6, 10, 11, 14 по шкале Шарьера).

Длина катетера с переходником - 500±10 мм.

Катетеры выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

3872.6.910.018 3Т

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Игнатьева	Игн	5.07.88
Пров.		Игметязев	Игмет	
И. контр.		Инокуров	Ино	5.07.88

КАТЕТЕР НОСОГЛОТОЧНЫЙ
ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА
ОДНОКАНАЛОВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

Лист	Лист	Лист
1	2	3
ООО "Полимерные изделия"		

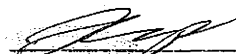
на № подл. Подпись и дата
Взам инв № Инв № дубл. Подпись и дата

ОКП 94 3830

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"


18.07.2006

КАТЕТЕР ПОСОСЛОТОННЫЙ ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА
ДВУХХОДОВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.106 ST

№ докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № докум.	Подпись и дата

2006

Катетер носоглоточный для подачи кислорода двухходовой полимерный (в дальнейшем - катетер) предназначен для подачи кислорода через носоглотку.

Область применения - анестезиология.

Катетер предназначен для одноразового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой две однопросветные эластичные прозрачные трубки, одна из которых с заглушенным концом, другая имеет на конце раструб. Трубки соединены между собой присоединителем с двумя цилиндрическими ответвлениями для подачи кислорода через носоглотку. Свободные концы трубок соединены между собой фиксатор с помощью которого катетер фиксируется в нужном положении.

Детали катетера (трубки, присоединитель, раструб, фиксатор) изготовлены из гранулированного медицинского пластика марки ПМ-1/42 ТУ 6-05-1533-85, переходник - из полиэтилена низкого давления марки 277-73 ГОСТ 16338-85.

Катетеры изготавливают с наружными диаметрами трубки: 2,00; 3,33; 4,86 мм (мм 6, 10, 14 по шкале Шарьера).

Катетеры выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

ХРАНИЕНИЕ

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

3272.6.910.106 37

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Аксенова	И.И.	5.12.06
Проб.		Нигметзянов	Х.И.	
Н. контр.		Винокур	Ю.В.	

КАТЕТЕР НОСОГЛОТОЧНЫЙ
ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА
ДВУХХОДОВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

Лист	Лист	Лист
1	2	3

Этикетка

ООО "Полимерные
Изделия"

в. № год. Подпись и дата в. зам. инд. № инд. № год. Подпись и дата

СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Катетеры соответствуют техническим условиям
ТУ 9436-002-44942795-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения катетеров - 3 года со дня проведения стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятие-изготовитель по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Катетеры не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.

№ п/п Подпись и дата Взам. инв. № инв. № дубл. Подпись и дата

Имя	Должность	Подпись	Дата

3872.6.910.106 3T

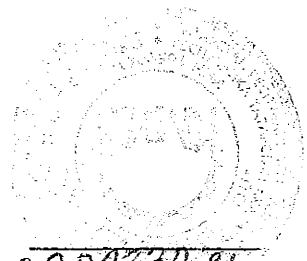
Лист
3

2006

3872.6.910.020 91

СТАНДАРТ

КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРВИСА
 ДЛЯ ОТРАСЛЕВЫХ СЛУЖБ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОДПИСИ



18.04.2006

М.М. Хасанов

Индекс 000
 "Информационная служба"
 (ИЗДАНИЕ)

ОК 84 3830

Катетер носоглоточный секреторный для отсасывания слизи из носоглотки полимерный (в дальнейшем - катетер) предназначен для отсасывания слизи из носоглотки.

Область применения - анестезиология.

Катетер предназначен для одноразового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Катетер представляет собой однопросветную эластичную прозрачную трубку, заходная часть которой изогнута и на боковой поверхности имеется отверстие. На проксимальном конце катетера имеется разъем для подсоединения переходника-тройника.

Катетер изготовлен из гранулированного медицинского пластика марки ПМ-1/42 ТУ 6-05-1533-85, переходник - из полиэтилена низкого давления марки 277-73 ГОСТ 16338-85.

Катетеры изготавливают с наружными диаметрами трубки: 2,00; 3,33; 3,66; 4,66 мм (№№ 6, 10, 11, 14 по шкале Шарьера).

Длина катетера с переходником - 500 ± 10 мм.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация катетеров обеспечивается радиационным способом. Поглощенная доза облучения - от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Катетеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

3872.6.913.020 ST

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Аксенова	И.И.	5.01.00
Проб.		Нигметзянов	Л.Н.	
Н. контр.		Винокурова	Р.С.	5.01.00

КАТЕТЕР НОСОГЛОТОЧНЫЙ
СЕКРЕТОРНЫЙ ДЛЯ
ОТСАСЫВАНИЯ СЛИЗИ ИЗ
НОСОГЛОТКИ ПОЛИМЕРНЫЙ
Этикетка

Лист	Лист	Лист
1	2	3
ООО "Полимерные изделия"		

№ п/п Подпись и дата

СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Катетеры соответствуют техническим условиям
ТУ 8436-002-44942795-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения катетеров - 3 года со дня проведения стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятие-изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Катетеры не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.

№ п/п Подпись и дата
Взам. инв. № инв. № д-ла Подпись и дата

Прошито и скреплено 4
27 (двадцать семь) листов

Директор

Ахматуллин Р.А.

