

ОКН 94 3420

Группа Р 21

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

"Полимерные изделия"



М. М. Харчевников

РЕФЛЕКТОР ЛОБНЫЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ

Этикетка

3872.3.914.000 ЭТ

Главный инженер ООО

"Полимерные изделия"



В. Н. Юсупов

2005

Рефлектор лобный оториноларингологический (в дальнейшем - рефлектор), предназначен для освещения отраженным светом уха, горла и носа во время лечебных процедур и профилактических осмотров.

Область применения - оториноларингология.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние - 175 ± 10 мм.

Масса рефлектора - не более 0,150 кг.

Габаритные размеры - $700 \pm 10 \times 95 \pm 2$ мм.

Средний срок службы - не менее четырех лет.

Диаметр отверстия для наблюдения - 14 ± 1 мм.

Комплект поставки рефлектора:

Наименование исполнения	Количество
1 Рефлектор лобный оториноларингологический	1 шт.
<u>Эксплуатационная документация</u>	
2 Этикетка	1 экз.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации рефлектор необходимо оберегать от механических повреждений. При загрязнении сферического зеркала его необходимо протереть мягкой чистой тканью.

3872.3.914.000 ЭТ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.	Аксенова	М/	Р.О.М.
Пров.	Нигметзянов	О/	М.О.П.
Н.Контр.	Винокурова	А/	В.М.О.
РЕФЛЕКТОР ЛОБНЫЙ ОТО-РИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ			
Этикетка			
Лист	Лист	Лист	Лист
1	2	4	
ООО "Полимерные изделия"			

Ид. № подл. Подпись и дата

Ид. № подл. Подпись и дата

Ид. № подл. Подпись и дата

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Рефлектор подвергается дезинфекции двукратным протираанием поверхности изделия марлевым тампоном, смоченным в 3 % растворе перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с интервалом между протирааниями 15 минут при температуре не менее плюс 18 °С, в соответствии с ОСТ 42-21-2-85.

ХРАНЕНИЕ

Рефлекторы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Рефлекторы соответствуют техническим условиям ТУ 9434-001-4494Z795-2005 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации рефлектора - 3 года со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня выпуска изделия.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию-изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Рефлекторы не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном Росаэдравом.

3872.3.914.000 ЭТ

Лист
3

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия _____

Срок действия _____

Выдан АНО "ЦСМО"

Место простановки знака соответствия.

Подпись и дата Изм. инв. № инв. № дубл. Подпись и дата

№ п. л. п. л.

--	--	--	--	--

3872.3.914.000 91

Л.с. 4