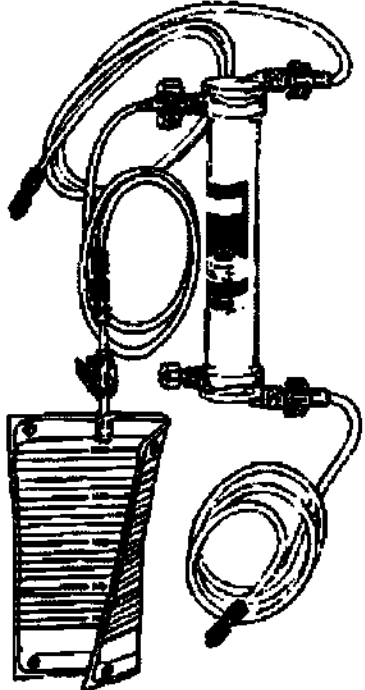


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройства для удаления жидкости из крови (гемоконцентраторы).

ОПИСАНИЕ:

Устройства для удаления жидкости из крови (гемоконцентраторы) поставляются в стерильной упаковке. Используются для удаления жидкости (воды) из плазмы крови во время перфузии, снижая использование донорской крови и ее компонентов. Полностью готовые к работе системы.

Гемоконцентратор		BC 140 plus
P-0400		BC 60 plus
P-0410		BC 20 plus
P-0420		
НКН-5000	Держатель для гемоконцентраторов универсальный	

ИНДИКАЦИЯ:

P-0400 – устройство разработано для удаления жидкости из крови, в комплекте с колонкой гемоконцентратора BC 140 plus, поставляется в стерильной упаковке

P-0410 – устройство разработано для удаления жидкости из крови, в комплекте с колонкой гемоконцентратора BC 60 plus, поставляется в стерильной упаковке

P-0420 – устройство разработано для удаления жидкости из крови, в комплекте с колонкой гемоконцентратора BC 20 plus, поставляется в стерильной упаковке

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Одноразовое изделие, не подлежит повторной стерилизации, недопустимо повторное использование;
- Данное устройство может быть использовано только в соответствии с условиями данной инструкции и только по прямому назначению;
- Следите за сроком годности устройства;
- Не использовать, если стерильная упаковка повреждена

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Вскройте упаковку и достаньте устройство. Не использовать, если упаковка повреждена
- Обратите внимание на номер лота.
- Подсоедините трубку к артериальной магистрали роликового насоса, используя коннектор $\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$
- Подсоедините трубку фильтрации к оксигенатору.
- Следите за скоростью потока: обращайте внимание на минимальный объем заполнения.
- Может быть подключена и использована в любой момент перфузии.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Данное устройство поставляется в стерильной и непиrogenной упаковке. Система полностью готова к работе. Сроки стерильности указаны на упаковках.

Устройство подлежит хранению в картонных коробках в прохладном, сухом и темном месте. Рекомендованная температура для хранения от +10 градусов по Цельсию до +30 градусов по Цельсию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Состоит из:	
1. Гемоконцентратора	• BC 140 plus • BC 60 plus • BC 20 plus
2. Подсоединенной линии	Длина 1000 мм, соединение male Луер-Лок
3. Линии фильтрации	Длина 1000 мм
4. Мешка для фильтра	Объем 2000 мл

Технические характеристики:

	BC 140 plus	BC 60 plus	BC 20 plus
Поверхность мембраны	1.35 м2	0.7 м2	0.2 м2
Объем заполнения	98 мл	65 мл	17 мл
Максимальное давление	600 мм рт.ст.	600 мм рт.ст.	600 мм рт.ст.
Материал мембраны	полиарилсульфон		
Покрывтие	SAFELINE		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

MAQUET Cardiopulmonary AG подтверждает, что этот продукт прошел необходимую регистрацию.