

**Маска медицинская из нетканого материала одноразовая
3-х слойная**

Производитель: ИП Прибылов Д.П., Свидетельство № 307616220100031 от 20.07.2007г
334034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Горбачева 19

ТУ 9398-001-0081581726-2010

Регистрационное удостоверение _____

Изготовлено: / / 201 г.

Гожен до: / / 201 г.

Срок сохранности 5 лет
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Инструкция по применению :

1. Расположить маску вертикально перед лицом, удерживая ее за ушные петли.
2. Заводя ушные петли за уши, надеть маску, чтобы ноздри и рот оказались закрыты маской. При необходимости, взявшись пальцами за верхний и нижний края маски, потянуть в разные стороны для увеличения площади лица, защищаемой маской.
3. Слегка продавить пальцами носовой фиксатор (проволочка в верхней части маски) слева и справа от носа для более удобного и плотного расположения маски на лице.

После использования снять маску с лица.

