

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ФГУП
«Всероссийское ПРОП» Росздрава
М.В. Давыдов
2» января 2009г.

«Обувь ортопедическая на протезы и аппараты»

Памятка по пользованию

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации ортопедической обуви на протезы и аппараты (далее- обувь), предназначенную для людей с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) всех половозрастных групп, пользующихся протезами и аппаратами нижних конечностей.

1. Медицинское назначение обуви

Обувь ортопедическая на протезы и аппараты предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) всех половозрастных групп, пользующихся протезами и аппаратами нижних конечностей.

Обувь на протезы при односторонней ампутации нижних конечностей назначается инвалидам в зависимости от состояния сохранившейся конечности.

Обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей назначается инвалидам в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы.

Обувь на аппарат назначается в зависимости от размера стопы пациента в аппарате нижней конечности, а также размера и состояния здоровой стопы.

2. Пользование обувью

Новую обувь в течение 5-7 дней необходимо использовать по несколько часов в день с обязательным периодическим осмотром стопы сохранившейся конечности. При обнаружении покраснения и потёртостей необходимо обратиться на предприятие-изготовитель изделия для её подгонки. Не рекомендуется использовать обувь на забинтованную стопу сохранившейся конечности, за исключением обуви специальной конструкции. При надевании обуви рекомендуется пользоваться ложечкой (рожком). Для предотвращения деформации задника, при снятии обуви нельзя наступать на её пяточную часть.

Не допускается надевать обувь на босую стопу, а также использовать носочно-чулочные изделия, не соответствующие размеру стопы и имеющие грубые швы, штокку или дыры.

3. Уход за стопой

Уход за стопой сохранившейся конечности должен осуществляться в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Перед надеванием обуви и после её снятия необходимо внимательно осмотреть стопу, в случае обнаружения покраснений и (или) потёртостей немедленно обратиться к специалисту.

4. Уход за обувью

После каждого использования приводить обувь в порядок, очищая от пыли и грязи, а при необходимости мыть мыльным раствором.

Ежедневно извлекать и просушивать индивидуальную ортопедическую стельку.

Сушить обувь и стельки необходимо при комнатной температуре, вдали от отопительных приборов или других источников тепла, избегая попадания прямых солнечных лучей.

5. Ремонт обуви

Ремонт обуви осуществляется в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

- на взрослую обувь-70дней;
- на детскую обувь-45дней.