


«УТВЕРЖДАЮ»

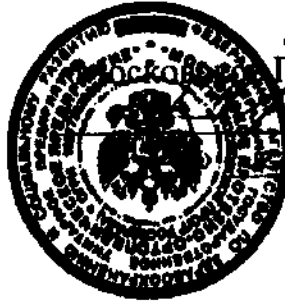

Директор ФГУП
«ВНИИИ им. академика
С.П. Боткина» Росздрава
М.В. Давыдов
2009г.

«Обувь ортопедическая женская»

Памятка по пользованию

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации женской ортопедической обуви сложной и малосложной для взрослых и детей с деформациями и дефектами стоп и содержит сведения о её назначении, правилах пользования и ухода.

1. Медицинское назначение обуви

Обувь ортопедическая женская сложная предназначена пациентам при выраженных анатомических изменениях стоп (эквинусная, эквиноварусная, половарусная стопа, культы стоп, укорочение нижней конечности, на «слоновую» стопу), а также для бездвуруких.

Обувь ортопедическая женская малосложная назначается при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп (плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3см и другие).

2. Пользование обувью

Обувь по размеру должна соответствовать параметрам стопы. Новую обувь в течении 5-7 дней необходимо использовать по несколько часов в день с обязательным периодическим осмотром стоп. При обнаружении покраснения и потёртостей необходимо обратиться на предприятие-изготовитель изделия для её подгонки. Не рекомендуется использовать обувь на забинтованную стопу, за исключением обуви специальной конструкции.

Пациентам с отёками стоп необходимо в течении дня следить за состоянием нижних конечностей и при необходимости регулировать объёмные параметры обуви за счёт натяжения или ослабления застёжки (шнуровки, ремешков).

При надевании обуви рекомендуется пользоваться ложечкой (рожком). Для предотвращения деформации задника, при снятии обуви нельзя наступать на её пяточную часть.

Не допускается надевать обувь на босую стопу, а также использовать носочно-чулочные изделия, не соответствующие размеру стопы и имеющие грубые швы, штопку или дыры.

3. Уход за стопой

Уход за стопами должен осуществляться в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Перед надеванием обуви и после её снятия необходимо внимательно осмотреть стопу, в случае обнаружения покраснений и (или) потёртостей немедленно обратиться к специалисту.

4. Уход за обувью

После каждого использования приводить обувь в порядок, очищая от пыли и грязи, а при необходимости мыть мыльным раствором.

Ежедневно извлекать и просушивать индивидуальную ортопедическую стельку.

Сушить обувь и стельки необходимо при комнатной температуре вдали от отопительных приборов или других источников тепла, избегая попадания прямых солнечных лучей.

5. Ремонт обуви

Ремонт обуви осуществляется в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

- на взрослую обувь-70 дней;
- на детскую обувь —45 дней.