

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП
«Московское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
М. В. Давыдов
« 10 » Октября 2010г.



**«Тутор на голеностопный сустав динамический
«Эластостоп «ЦИТО» (тутор - стоподержатель)
ТНО-24Ц75ПП**

Памятка по пользованию

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации тьютора – стоподержателя ТНО-24Ц75ПП и содержит сведения о его назначении, правилах пользования и ухода.

1. Медицинское назначение тьютора

1.1 Тьютор - стоподержатель предназначен для пациентов нуждающихся в фиксации голеностопного сустава и стопы в функционально выгодном положении, частичном снятии осевой нагрузки с поврежденного сегмента, защите его от внешних механических воздействий и восстановлении толчковой функции стопы при реабилитации на средних сроках после внутрисуставных переломов, при спастическом и вялом параличе, при неврологических заболеваниях периферических нервов нижних конечностей, при состоянии после острого нарушения мозгового кровообращения.

1.2 Тьютор выпускается в правом и левом исполнениях.

2. Надевание и пользование тьютором.

2.1. На нижнюю конечность надевают хлопчатобумажный чулок.

2.2. В положении сидя конечность расположить в икроножном фиксаторе тьютора и зафиксировать на конечности манжетой с застежкой «контакт».

2.4. Для снятия тьютора-стоподержателя расфиксировать застежки.

При болезненности и нарушении удержания стоподержателя на конечности или неудобном креплении, необходимо прекратить пользование изделием и обратиться на предприятие изготовитель.

3. Уход за тьютором.

3.1. Внутреннюю полость периодически 1-2 раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью увлажненной водой с добавлением моющих средств или производить обработку 3% перекисью водорода.

3.2. Нельзя хранить тьютор вблизи источника тепла, сушить на солнце.

4. Уход за телом.

Ежедневно, после пользования тьютором, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж, обработка кожи защитными лосьонами.

5. Гарантии предприятия

Средний срок службы тьютора - стоподержателя не менее (12) двенадцати месяцев.

Гарантийный срок тьютора- стоподержателя (12) двенадцать месяцев со дня выдачи в эксплуатацию. В течение этого срока, в случае поломки, предприятие – изготовитель производит ремонт или замену тьютора бесплатно.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

Директор

М.В. Давыдов

лист 1