

ВОСК

Базисный-02

Акционерное общество «Стома»
Украина, г.Харьков, ул.Ньютона, 3

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск базисный-02 предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов, а также индивидуальных ложек и ложек-базисов.

2. Свойства

Воск базисный-02 при разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, полностью, без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм. Температура плавления и застывания воска $(55\pm 3)^\circ\text{C}$.

3. Способ применения

Для изготовления базиса пластинку воска обрезают шпателем приблизительно по форме модели и, размягчив воск, равномерно разогревая его над пламенем горелки или в теплой $(45-50)^\circ\text{C}$ воде, укладывают на модель и формируют базис, прижимая воск к модели пальцами рук, избегая при этом излишних усилий, чтобы не истончить местами восковую пластинку. Валики изготавливают из разогретой восковой пластинки, свернутой в несколько слоев. Валик скрепляют с базисом расплавленным на шпателе воском.

Дальнейшее изготовление базиса съемного протеза производится общепринятыми в стоматологии методами.

4. Комплектность

Комплект Воска базисного-02 содержит:
пластины массой (500 ± 15) г;
инструкцию по применению – 1 шт.


5. Условия хранения

Хранение воска должно производиться в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Председатель Правления

АО «Стома»

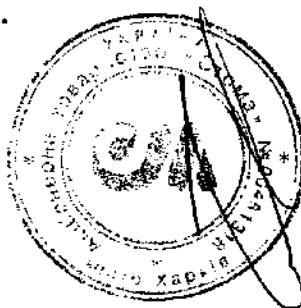

С.В.Черняев