

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
от _____ 20__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Аромат»
_____ А.Н. Обозов
« _____ » _____ 2013 г.
М.П. _____

ИНСТРУКЦИЯ

по применению: Гель электродный контактный «АМС-ГЕЛЬ»
универсальный с алоэ вера
(Наименование медицинского изделия)

Производства: Открытое Акционерное общество «Аромат» (ОАО «Аромат»)
420021, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Фаткуллина, д.7

2013 г.

ГЕЛЬ ЭЛЕКТРОДНЫЙ КОНТАКТНЫЙ «АМС-ГЕЛЬ» универсальный с алоэ вера

Гель электродный контактный «АМС-гель» универсальный с алоэ вера – является универсальным электродным гелем и используется для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторинговании, велоэргометрии, ЭМС и ЭМГ, подходит для всех видов ультразвуковых исследований, а также может применяться в аппаратной косметологии.

- Не портит электроды и датчики, нетоксичен;
- Не вызывает аллергических и воспалительных реакций на коже;
- Полностью водорастворим, не оставляет пятен на одежде.
- Благодаря своей консистенции, гель не растекается по коже, что позволяет подбирать дозировку индивидуально для каждого пациента и существенно экономить расход геля без потери качества исследования.
- Поставляется в различной фасовке в зависимости от потребностей учреждения и характера ультразвуковых исследований.

Применение:

Наносится на всю поверхность электродов, которая находится в непосредственном контакте с кожей, или наносится непосредственно на тело или датчик, распределяется на коже обеспечивая полный контакт. Гель снимается салфеткой или смывается водой.

Состав (INCI):

Вода питьевая, пропиленгликолевый экстракт алоэ, акрилат / C10-30 алкил акрилатный кроссполимер, триэтаноламин, хлорид калия, глицерин, метилхлороизотиазолинон и метилизотиазолинон.

Вязкость средняя:

Водородный показатель pH $5,7 \div 7,5$
Вязкость при скорости сдвига $(16,8 \pm 0,3) \cdot c^{-1}$ $(9,5 \div 10,5) \text{ Па} \cdot c$
Вязкость при скорости сдвига $(7,5 \pm 0,05) \cdot c^{-1}$ $(18,4 \div 20,5) \text{ Па} \cdot c$
Акустический импеданс $(1,53 \div 1,58) \text{ г/см}^2 \cdot c$
Удельная электропроводность $(0,6 \div 0,8) \text{ См/м}$

Срок хранения: 36 месяцев

Маркировка:

Партия №

Годен до:

Масса нетто:

ТУ 9398-005-00333871-2013

Регистрационное удостоверение №:

Фасовка:

Полимерные одноразовые бутылки объемом 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250; 1300; 1350; 1400; 1450; 1500; 1550; 1600; 1650; 1700; 1750; 1800; 1850; 1900; 1950; 2000; 2050; 2100; 2150; 2200; 2250; 2300; 2350; 2400; 2450; 2500; 2550; 2600; 2650; 2700; 2750; 2800; 2850; 2900; 2950; 3000; 3050; 3100; 3150; 3200; 3250; 3300; 3350; 3400; 3450; 3500; 3550; 3600; 3650; 3700; 3750; 3800; 3850; 3900; 3950; 4000; 4050; 4100; 4150; 4200; 4250; 4300; 4350; 4400; 4450; 4500; 4550; 4600; 4650; 4700; 4750; 4800; 4850; 4900; 4950; 5000 мл.

Утилизация:

Утилизация остатков неизрасходованного геля производят в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

Производитель:

ОАО «Аромат», 420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Фаткуллина, д.7

По заказу:

ООО «АМС-Мед», 101000, Россия, г. Москва, ул. Старосадский переулок 7/10 стр. 9, тел.: 8(495) 221-40-87/88.

В этом документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью

3 (три)
(прописью)

лист(ов).

« 07 » 06

20 13 г.



УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
от _____ 20__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Аромат»
_____ А.И. Обозов
«____» _____ 2013 г.
М.П. _____

ИНСТРУКЦИЯ

по применению: Гель электродный контактный «АМС-ГЕЛЬ»
 универсальный с алоэ вера
 (Наименование медицинского изделия)

Производства: Открытое Акционерное общество «Аромат» (ОАО «Аромат»)
420021, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Фаткуллина, д.7

2013 г.

ГЕЛЬ ЭЛЕКТРОДНЫЙ КОНТАКТНЫЙ «АМС-ГЕЛЬ» универсальный с алоэ вера

Гель электродный контактный «АМС-гель» универсальный с алоэ вера – является универсальным электродным гелем и используется для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторингировании, велоэргометрии, ЭМС и ЭМГ, подходит для всех видов ультразвуковых исследований, а также может применяться в аппаратной косметологии.

- Не портит электроды и датчики, нетоксичен;
- Не вызывает аллергических и воспалительных реакций на коже;
- Полностью водорастворим, не оставляет пятен на одежде.
- Благодаря своей консистенции, гель не растекается по коже, что позволяет подбирать дозировку индивидуально для каждого пациента и существенно экономить расход геля без потери качества исследования.
- Поставляется в различной фасовке в зависимости от потребностей учреждения и характера ультразвуковых исследований.

Применение:

Наносится на всю поверхность электродов, которая находится в непосредственном контакте с кожей, или наносится непосредственно на тело или датчик, распределяется на коже обеспечивая полный контакт. Гель снимается салфеткой или смывается водой.

Состав (INCI):

Вода питьевая, пропиленгликолевый экстракт алоэ, акрилат / C10-30 алкил акрилатный кроссполимер, триэтаноламин, хлорид калия, глицерин, метилхлороизотиазолинон и метилизотиазолинон.

Вязкость средняя:

Водородный показатель pH $5,7 \div 7,5$

Вязкость при скорости сдвига $(16,8 \pm 0,3) \cdot c^{-1}$ $(9,5 \div 10,5) \text{ Па} \cdot c$

Вязкость при скорости сдвига $(7,5 \pm 0,05) \cdot c^{-1}$ $(18,4 \div 20,5) \text{ Па} \cdot c$

Акустический импеданс $(1,53 \div 1,58) \text{ г/см}^2 \cdot c$

Удельная электропроводность $(0,6 \div 0,8) \text{ См/м}$

Срок хранения: 36 месяцев

Маркировка:

Партия №

Годен до:

Масса нетто:

ТУ 9398-005-00333871-2013

Регистрационное удостоверение №:

Фасовка:

Полимерные одноразовые бутылки объемом 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250; 1300; 1350; 1400; 1450; 1500; 1550; 1600; 1650; 1700; 1750; 1800; 1850; 1900; 1950; 2000; 2050; 2100; 2150; 2200; 2250; 2300; 2350; 2400; 2450; 2500; 2550; 2600; 2650; 2700; 2750; 2800; 2850; 2900; 2950; 3000; 3050; 3100; 3150; 3200; 3250; 3300; 3350; 3400; 3450; 3500; 3550; 3600; 3650; 3700; 3750; 3800; 3850; 3900; 3950; 4000; 4050; 4100; 4150; 4200; 4250; 4300; 4350; 4400; 4450; 4500; 4550; 4600; 4650; 4700; 4750; 4800; 4850; 4900; 4950; 5000 мл.

Утилизация:

Утилизация остатков неизрасходованного геля производят в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

Производитель:

ОАО «Аромат», 420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7

По заказу:

ООО «АМС-Мед», 101000, Россия, г. Москва, ул. Старосадский переулок 7/10 стр. 9, тел.: 8(495) 221-40-87/88.

В этом документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью

3 (три)
(прописью)

лист(ов).

«07» 06

2013 г.

