


4. УСТРОЙСТВО

4.1. Ультразвуковой ингалятор АЛЬБЕДО представляет собой прибор, состоящий из следующих основных частей:

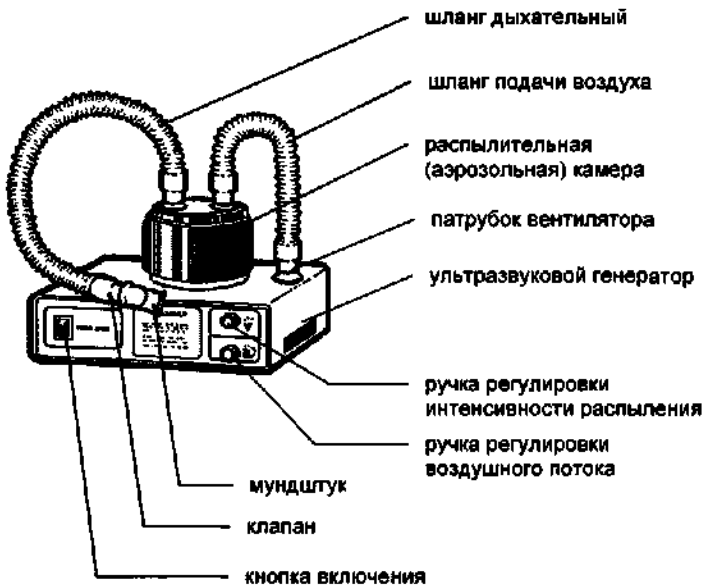

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ, ЧТО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНГАЛЯТОР - ЭТО ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР, ТРЕБУЮЩИЙ БЕРЕЖНОГО И АККУРАТНОГО ОБРАЩЕНИЯ.

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ И БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ ИНГАЛЯТОРА НЕОБХОДИМО ЧЕТКО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ УКАЗАНИЯМ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Распакуйте ингалятор. Если ингалятор хранился в холодном помещении или транспортировался в зимних условиях, перед включением в сеть выдержите прибор при комнатной температуре (17-20° C) не менее 2 часов.

6.2. Осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии внешних дефектов и поломок.


6.3. Установите генератор на ровную горизонтальную поверхность.

6.4. Вскипятите дистиллированную воду.

Для заправки прибора Вам потребуется 25 мл свежевскипяченной воды.

Пожалуйста, не игнорируйте это правило!

Кипятить воду необходимо для удаления содержащихся в ней пузырьков воздуха, которые значительно снижают интенсивность распыления. Недопустимо использование жесткой водопроводной воды, а еще хуже минерализованной или родниковой. Это приводит к постепенному образованию известкового налета на излучателе и выходу прибора из строя.

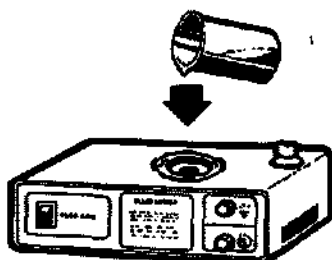

Отмерьте шприцом или мерным стаканчиком 25 мл свежевскипяченной воды и залейте этот объем в отверстие ультразвукового излучателя как показано на рисунке (воду можно не охлаждать).