

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор  
ООО «БОЛЕЗНИ МЕДИКА»



И. Шабров

2010 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**«Гели-смазки SICO, VIZIT**

**производства: CPR Produktions- und Vertriebs GmbH, Германия»**

**(наименование изделия медицинского назначения)**

## 1. Назначение

Гель-смазка имитирует естественную вагинальную смазку, оказывает увлажняющее и смазывающее действие, устраняет неприятные и болезненные ощущения во время полового акта. Гель-смазка предотвращает раздражение наружных половых органов, прекрасно восполняет недостаток естественной вагинальной смазки, устраняет дискомфорт при сухости слизистых оболочек влагалища и тем самым препятствует повреждению эпителия. Гель-смазку могут использовать женщины, у которых нарушен состав влагалищного секрета или снижено количество его образования, это может происходить в период менопаузы, после различных операций на матке и яичниках, молодые женщины могут сталкиваться с этой проблемой в стрессовых ситуациях (вагинизм).

Гель-смазка поможет избавиться от чувства дискомфорта при половом акте и наладит вашу интимную жизнь.

## 2. Основные характеристики


Гель-смазка не наносит вреда здоровью и не представляет опасности для пользователя при правильном его применении. Гель-смазка производится при соблюдении всех норм безопасности, с использованием прогрессивных технологий.

Основные характеристики геля-смазки:

- объем – 50 мл;
- внешний вид – однородная гелеобразная масса без посторонних примесей;
- цвет – бесцветный (прозрачный);
- запах – нейтральный (неприятный запах отсутствует);
- плотность – 1,1600 г/мл;
- вязкость – 1900 мПа;
- водородный показатель pH – 5,5;
- массовая доля сухого вещества – 2,2%;
- объемная доля этилового спирта – отсутствует;
- массовая доля суммы тяжелых металлов – менее 1 мкг/кг;
- общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) – менее  $10^3$  (КОЕ/г);
- дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы – отсутствуют;
- наличие бактерий: Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus – отсутствуют;
- термостабильность – стабилен.

Основные характеристики геля-смазки не меняются в течение всего срока годности.

Гель-смазка совместим с презервативами и любыми изделиями из натурального латекса, легко смывается водой и не содержит бензо- и красителей, не токсичен и не вызывает аллергии. Гель-смазка не содержит в своем составе спирта, имеет нейтральный показатель

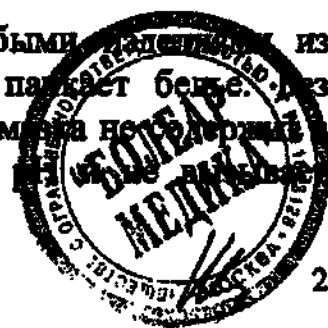

раздражения. Микробиологические и органолептические показатели геля соответствуют требованиям нормативных документов.

Гель-смазка производится и упаковывается таким образом, что во время транспортировки и хранения его характеристики не изменяются.

Гель-смазка очень простое и удобное в использовании изделие медицинского назначения.

### **3. Противопоказания к применению**

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав геля.

### **4. Подготовка к работе**

Перед использованием геля-смазки необходимо убедиться, что срок годности не истек, вымыть руки с мылом, снять защитную, прозрачную пленку с дозирующей крышки и открыть ее. Изделие готово к использованию.

### **5. Порядок работы изделия**

Перед осуществлением полового акта необходимо выдавить и нанести небольшое количество геля на половые органы и/или презерватив. Частота и доза применения определяется самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей организма.

В случае возникновения дискомфорта, следует прекратить использование геля и обратиться к врачу. Не допускать попадания содержимого в глаза, если контакт все же произошел, тщательно промойте это место проточной водой.

Гель-смазка совместим с презервативами и любыми изделиями из натурального латекса, легко смывается водой и не пачкает белье.

### **6. Правила хранения и использования**

Гель-смазку следует хранить в заводской упаковке при комнатной температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении, гель-смазка должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. После вскрытия упаковки гель-смазку следует хранить не более 3 месяцев.

Срок годности геля-смазки – 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

