



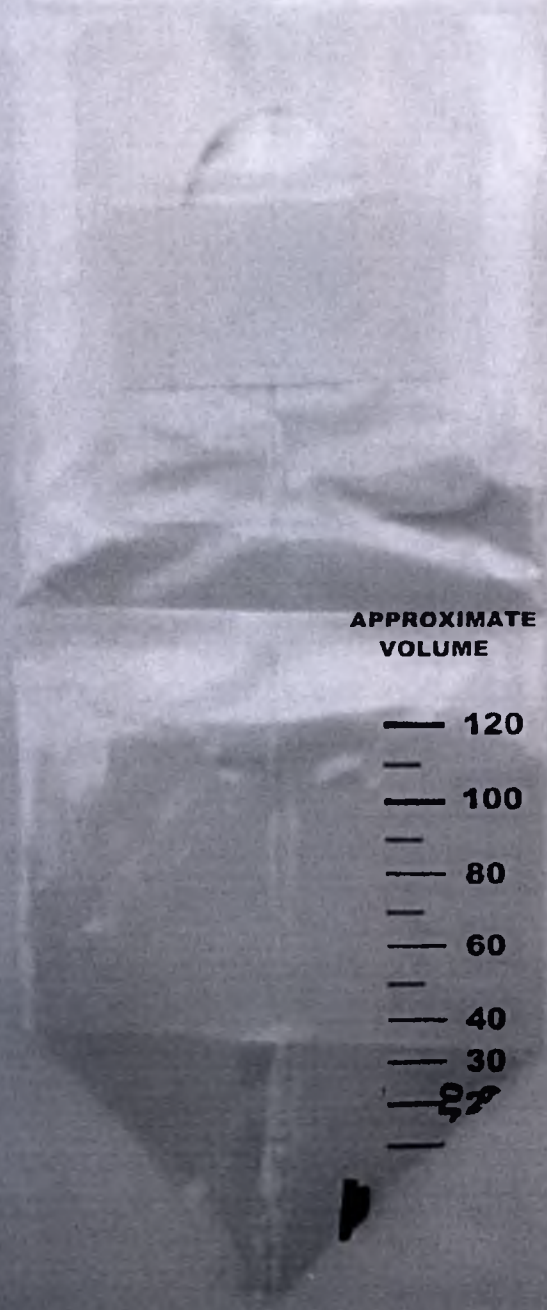

APPROXIMATE
VOLUME

— 120
—
— 100
—
— 80
—
— 60
—
— 40
— 30
— 20
—

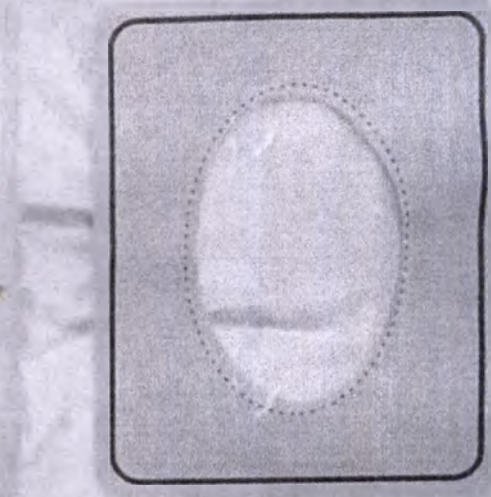

APPROXIMATE
VOLUME

150
100
80
60
40
30
20
10
0

PEEL HERE

LoRAF

Pediatric Urine Bag
Мочеприемник педиатрический

Применение:

1. Разорвать упаковку и извлечь мочеприемник.
2. Удалить защитную бумагу с клеевого слоя.
3. Прикрепить мочеприемник к телу ребенка, следя чтобы не образовались складки на клеевом слое.
4. При необходимости закрепить мочеприемник на подгузник клеевым слоем с задней стороны мочеприемника.
5. После наполнения мочеприемник аккуратно отклеить и прилепить жидкость в контейнер для мочи.
6. Мочеприемник имеет обратный клапан, который препятствует обратному току мочи.

Утилизация:

Не выбрасывать мочеприемник
в канализацию.

Не рекомендуется лицам,
страдающим аллергией
к латексу, силикону и ПВХ

120 мл.



2209100440