



ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГ

TY 9398-587-23548172-2016
PY №

Дата изготовления **Февраль 2016**
 дата выдачи паспорта **15.02.2016**
 Срок годности наборов до **Август 2017**

Лиофилизированная масса
светло-желтого цвета



ЗАО «Вектор-Бест» Новосибирский р-н, ПАСПОРТ № 2

Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (1)
Калибратор для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности

ТУ 9398-587-23548172-2016

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Транспортировать при температуре от 2 до 8 °С.
Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток.

Наименование Внешний вид

Калибратор, серия 010316

Номер серии **010316**

Дата изготовления **Март 2016**
Дата выдачи паспорта **10.03.2016**
Срок годности наборов до **Сентябрь 2017**

Тел. (383) 227-67-64, 227-75-50, 332-37-58
Тел./факс (383) 227-75-50, 332-37-58
E-mail: vbobtk@

ИНСТРУКЦИЯ
применению калибратора для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (1) набора на к...

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ВЕКТОР
БЕСТ

калибратор
для определения концентрации
холестерина липопротеидов
высокой и низкой плотности

**Калибратор ЛВП/ЛНП-
Холестерин-Ново-А (2)**

Состав: 2х1 мл

Антитела к Вич-1, 2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

ТУ 9398-587-23548172-2016
РТУ №

ИНСТРУКЦИЯ

по применению калибратора для определения
концентрации холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности
(Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А)

НАЗНАЧЕНИЕ определения
концентрации липопротеидов
высокой и низкой плотности
«Калибратор ЛВП/ЛНП-
Холестерин-Ново-А» предназначен для
определения концентрации
холестерина липопротеидов высокой
и низкой плотности

набора на кожу и слизистые; при попадании
немедленно промыть пораженное место большим
количеством проточной воды.
3.3. При работе с исследуемыми образцами
следует соблюдать меры предосторожности,
принятые при работе с потенциально
инфекционным материалом. Основные правила
работы изложены в «Инструкции по работе с
биологическими материалами» Минздрава СССР 17-
1991 г. и в методических указаниях по дезинфекции,
обеззараживанию и стерилизации, утв.
Минздрава РФ от 1991 г.

ЗАО «Вектор-Бест»
ПАСПОРТ № 3

Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (2)
для определения концентрации холестерина липопротеидов
высокой и низкой плотности

ТУ 9398-587-23548172-2016

Тел. (383) 227-67-64, 227-75-50, 332-37-58
Тел./факс (383) 227-75-50, 332-37-58
E-mail: vbobtk@ve

Номер серии 010316

Дата изготовления Март 2016
Дата выдачи паспорта 10.03.2016
Срок годности наборов до Сентябрь 2017

Характеристика и нормы		Рез-ты кон
Лиофилизированная масса	светло-желтого цвета, 2 ± 0,1 г	Лиоф



ИНСТРУКЦИЯ
по применению калибратора для определения
концентрации холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности
(калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А)

1. Подготовка набора на кожу и слизистые; при попадании
капли на кожу немедленно промыть пораженное место большим
количеством проточной воды.
2. Работа с исследуемыми образцами.
3. Предосторожности.
4. Основание по передаче
информации.
5. Инструкции по использованию
калибратора ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (2) для определения
концентрации холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности

калибратор
для определения концентрации
холестерина липопротеидов
высокой и низкой плотности

**Калибратор ЛВП/ЛНП-
Холестерин-Ново-А (2)**

Состав: 2x1 мл

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBeAg отсутствуют

ТУ 9398-567-23548172-2016
РЧ №

Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (2)
ПАСПОРТ № 4
для определения концентрации холестерина липопротеидов
высокой и низкой плотности

Тел./факс (383) 363-13-46
Тел. (383) 227-67-64.
227-75-50, 332-37-58
E-mail: vbobtk@vector-best.ru

Номер серии 020316

Дата изготовления Март 2016
Дата выдачи паспорта 16.03.2016
Срок годности наборов до Сентябрь 2017



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

[Handwritten signature]