

LEADCORE

Стойка фильтрационная «Лидстик (Leadstick)» СФ-01

Паспорт

Регистрационное удостоверение №

ЛДКР-25.2-03.71-01 ПС

**ООО «Лидкор»
Россия, г. Екатеринбург**

Содержание :

Основные сведения об изделии.....	3
Контактные данные изготовителя.....	3
Основные параметры и характеристики.....	4
Комплектность поставки.....	5
Гарантийные обязательства.....	6
Карта отказа.....	7
Свидетельство о приемке.....	8
Свидетельство об упаковывании.....	8
Свидетельство о вводе в эксплуатацию.....	9
Утилизация.....	11
Особые отметки.....	12

Основные сведения об изделии

Стойка фильтрационная «Лидстик (Leadstick)» СФ-01 (далее по тексту изделие).

Изделие предназначено для организации рабочего места специалиста отдела заготовки крови при проведении лейкофильтрации цельной крови ~~или~~ её компонентов в поликлиниках, больницах, стационарах, пунктах переливания крови и в других медицинских учреждениях.

Изделие состоит из трех секций на которых размещены: узел верхних крючков для подвешивания контейнеров с цельной кровью и её компонентами (далее верхние крючки), узел нижних крючков для подвешивания фильтров (далее нижние крючки), две корзины для размещения на них контейнеров с отфильтрованными компонентами (далее корзины) и поворотные колеса с педалями для их блокировки. Нижние крючки могут быть зафиксированы на любой высоте между верхними крючками и верхней корзиной.

Заводской № _____

Контактные данные изготовителя

Предприятие-изготовитель: ООО «Лидкор»

Адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 23-204

телефон: (343) 365-63-00, факс: (343) 372-78-69

электронная почта: mail@leadcore.ru; сайт: www.leadcore.ru

Адрес производства: 620033, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, 15

Основные параметры и характеристики

- 1 Габаритные размеры изделия (ДхШхВ)* (величина допуска не более 30 мм): 650х650х2000 мм.
- 2 Вес изделия, не более 12 кг.
- 3 Максимально допустимая нагрузка на составные части изделия, не более:
 - один верхний крючок – 1 кг;
 - один нижний крючок – 1 кг;
 - корзина верхняя** – 15 кг;
 - корзина нижняя** – 15 кг.
- 4 Максимально допустимая общая нагрузка на изделие, не более 30 кг.
- 5 Усилие, необходимое для перемещения изделия с максимальной нагрузкой по горизонтальной поверхности, не более 20 Н (2 кгс).
- 6 Есть возможность блокировки перемещения изделия.

* -при направлении поворотных колес внутрь изделия.

** -нагрузка должна быть равномерно распределена по корзине.

Комплектность поставки

Наименование	Документ	Кол-во
Стойка фильтрационная «Лидстик (Leadstick)» СФ-01. В составе:	ТУ 9452-025-65614693-2016	1
Секция нижняя	ЛДКР 25.2-02.01.00.000	1
Узел нижних крючков	ЛДКР 25.2-02.04.00.000	1
Секция верхняя	ЛДКР 25.2-02.05.00.000	1
Секция средняя	ЛДКР 25.2-02.06.00.000	1
Упаковка	ЛДКР 25.2-03.30.01	1
Документация		
Руководство по эксплуатации	ЛДКР 25.2-03.70.01 РЭ	1
Паспорт	ЛДКР 25.2-03.71.01 ПС	1
Упаковочный лист	ЛДКР 25.2-03.72.01 Д1	1

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия основным параметрам и характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в руководстве по эксплуатации и регулярного проведения технического обслуживания.

Условием исполнения гарантийных обязательств является наличие на изделии маркировки с его заводским номером.

Изготовитель не несет ответственности за поломку изделия, которая явилась результатом неправильного использования или изменения конструкции изделия.

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев от даты выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев от даты ввода изделия в эксплуатацию, при наличии подтверждающих документов. При отсутствии подтверждающих документов, началом гарантийного срока считается дата выпуска.

Срок службы (при интенсивности эксплуатации 8 ч в день) не менее 5 лет.

После истечения гарантийного срока ремонт изделия необходимо производить в лицензированных специализированных организациях. Сотрудник, выполняющий ремонт изделия, должен иметь соответствующий сертификат, выданный производителем. Перечень компаний и сотрудников, имеющих допуск на проведение данных работ, представлен на сайте компании изготовителя: www.leadcore.ru.

В случае отказа изделия необходимо заполнить бланк карты отказа и выслать его на электронный адрес изготовителя: quality@leadcore.ru.

Карта отказа

ООО «Лидкор»

Заполненный бланк необходимо выслать на эл. адрес quality@leadcore.ru
(электронная форма бланка находится по адресу <http://www.leadcore.ru/doc/cartaotkaza.doc>)

КАРТА № _____ по отказу изделия стойка фильтрационная «Лидстик (Leadstick)» СФ-01

Заводской номер _____ Дата выпуска _____

Местонахождение изделия _____

Адрес _____

ФИО, должность, телефон _____
для контактов по отказу

Дата получения оборудования филиалом/заказчиком _____

Номер документа (накладная ЦО/филиала, акт приема-передачи) _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Дата истечения срока гарантии _____

Описание отказа _____

Что требуется сделать _____

- заказать зап. часть _____

- выслать документацию _____

- получить инструкции _____

- выполнить ремонт (гарант/не гарант) _____

Дата заполнения карты _____

Карту заполнил: _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Свидетельство о приемке

Стойка фильтрационная «Лидстик (Leadstick)» СФ-01 соответствует техническим условиям ТУ 9452-015-65614693-2016 и признана годной для эксплуатации.

Дата _____

ОТК _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

Свидетельство об упаковывании

Дата* _____

Упаковщик _____
(подпись) (ФИО)

* дата упаковки считается датой выпуска изделия.

Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Внимание! Протокол ввода изделия в эксплуатацию является неотъемлемой частью этого свидетельства. Для подтверждения корректного проведения процедуры ввода изделия в эксплуатацию необходимо заполнить свидетельство, отсканировать его и отправить по адресу изготовителя quality@leadcore.ru

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

В эксплуатацию ввел _____ / _____
подпись Ф.И.О.

Контакты поставщика (организация, телефон, эл. почта):

МП поставщика

Представитель пользователя _____ / _____
подпись Ф.И.О.

Контакты пользователя (организация, тел., эл. почта):

МП пользователя

Примечания _____

Протокол ввода изделия в эксплуатацию

Раздел	Требования	Выполнение
Проверка внешнего вида	Лакокрасочное покрытие изделия не имеет повреждений. Внешние поверхности подушек не имеют царапин.	Да Нет
Проверка работы педалей блокировки колес	Работают все тормоза, при их фиксации изделие не перемещается при приложении усилия 20 Н.	Да Нет
Проверка маркировки	- На изделии размещена этикетка, содержащая информацию об изделии. - Заводской номер, указанный в руководстве по эксплуатации на изделие, совпадает с заводским номером, указанным на этикетке изделия.	Да Нет
Проверка комплектности	Позиция	Наличие
	Стойка фильтрационная «Лидстик (Leadstick)» СФ-01. В составе:	Да / Нет
	Секция нижняя	Да / Нет
	Узел нижних крючков	Да / Нет
	Секция верхняя	Да / Нет
	Секция средняя	Да / Нет
	Упаковка	Да / Нет
	Руководство по эксплуатации	Да / Нет
	Паспорт	Да / Нет
	Упаковочный лист	Да / Нет
Проверка регулировки узла нижних крючков	Положение узла нижних крючков регулируется перемещением его стопорного кольца.	Да Нет
Проверка требований к обслуживающему персоналу	- Персонал проинформирован о необходимости ознакомления с содержимым руководства по эксплуатации перед использованием изделия. - Персонал проинформирован о необходимости проведения технического обслуживания изделия, изложенного в руководстве по эксплуатации.	Да Нет

Утилизация

По классу опасности медицинских отходов, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, изделие относится к классу А.

Процедура утилизации изделия:

- разобрать и упаковать изделие в одноразовые пакеты белого цвета;
- доставить пакеты с изделием для временного хранения в специальное помещение на территории ЛПУ;
- вывезти пакеты с изделием на полигон, согласно заключённому договору с лицензированной организацией.

Особые отметки

Прошито, пронумеровано
12 (двенадцать) листов
Директор ООО «Лидкор»
Удбин А.И.





Стойка фильтрационная «Лидстик (Leadstick)» СФ-01

Руководство по эксплуатации

Регистрационное удостоверение №

ЛДКР-25.2-03.70-01 РЭ

ООО «Лидкор»
Россия, г. Екатеринбург



Благодарим Вас за приобретение изделия «Стойка фильтрационная «Лидстик (Leadstick)» СФ-01», изготовленного по ТУ 9452-025-65614693-2016 компанией «Лидкор».

Для того, чтобы использование стойки фильтрационной «Лидстик (Leadstick)» СФ-01 (далее по тексту изделие) было эффективным и безопасным, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми разделами данного руководства по эксплуатации.

Содержание:

Безопасность.....	4
Контактные данные изготовителя.....	5
Назначение.....	5
Основные параметры и характеристики.....	5
Состав изделия.....	6
Монтаж изделия.....	7
Подготовка к работе.....	7
Эксплуатация изделия.....	7
Техническое обслуживание.....	8
Возможные неисправности и способы их устранения.....	8
Хранение.....	8
Транспортирование.....	8
Гарантийные обязательства.....	9
Утилизация.....	9

Безопасность

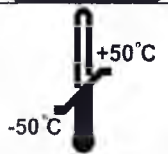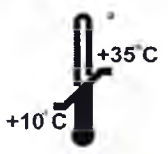	Внимательно прочтите всю информацию, содержащуюся в данном руководстве. Здесь содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию и уходу за изделием.
	Изделие содержит хрупкие элементы. Предохраняйте от ударов.
	Изделие не является водонепроницаемым. Оберегайте от попадания влаги.
	Условия транспортирования и хранения: температура от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха до 100% при 25°C
	Условия эксплуатации: температура от 10 до 35°C, относительная влажность воздуха не более 80% при 25°C, атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
	Если изделие находилось при температуре ниже 10°C, то перед эксплуатацией оно должно быть выдержано в транспортной упаковке при климатических условиях для эксплуатации не менее 4 часов.
	Материалы упаковки изделия не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, их можно использовать повторно.
	Перед эксплуатацией изделия, исключите опасность зажатия предметов при перемещении подъемной платформы.
 ЗАФИКСИРОВАТЬ!	Перед эксплуатацией изделия необходимо заблокировать его колеса.

Контактные данные изготовителя

Предприятие-изготовитель: ООО «Лидкор»

Адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 23-204

телефон: (343) 365-63-00, факс: (343) 372-78-69

электронная почта: mail@leadcore.ru; сайт: www.leadcore.ru

Адрес производства: 620033, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, 15

Назначение

Изделие предназначено для организации рабочего места специалиста отдела заготовки крови при проведении лейкофильтрации цельной крови или её компонентов в поликлиниках, больницах, стационарах, пунктах переливания крови и в других медицинских учреждениях.


Основные параметры и характеристики

- 1 Габаритные размеры изделия (ДхШхВ)* (величина допуска не более 30 мм): 650х650х2000 мм.
- 2 Вес изделия, не более 12 кг.
- 3 Максимально допустимая нагрузка на составные части изделия, не более:
 - один верхний крючок – 1 кг;
 - один нижний крючок – 1 кг;
 - корзина верхняя** – 15 кг;
 - корзина нижняя** – 15 кг.
- 4 Максимально допустимая общая нагрузка на изделие, не более 30 кг.
- 5 Усилие, необходимое для перемещения изделия с максимальной нагрузкой по горизонтальной поверхности, не более 20 Н (2 кгс).
- 6 Есть возможность блокировки перемещения изделия.

* -при направлении поворотных колес внутрь изделия.

** -нагрузка должна быть равномерно распределена по корзине.

Состав изделия

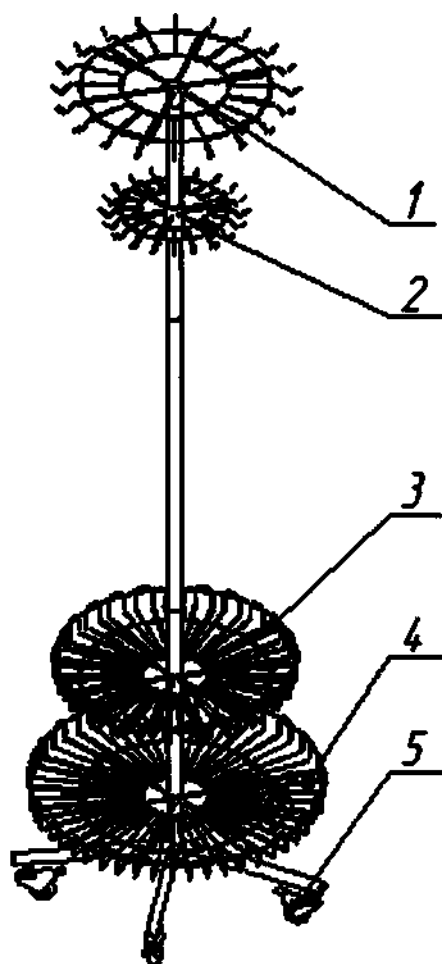

- 1 - узел верхних крючков;
- 2 - узел нижних крючков;
- 3 - корзина верхняя;
- 4 - корзина нижняя;
- 5 - колесо с тормозным механизмом.

Рисунок 1.

Изделие состоит из трех секций на которых размещены: узел верхних крючков для подвешивания контейнеров с цельной кровью и её компонентами (далее верхние крючки), узел нижних крючков для подвешивания фильтров (далее нижние крючки), две корзины для размещения на них контейнеров с отфильтрованными компонентами (далее корзины) и поворотные колеса с педалями для их блокировки. Нижние крючки могут быть зафиксированы на любой высоте между верхними крючками и верхней корзиной.

Комплектность поставки изделия указана в его паспорте, входящем в комплект эксплуатационных документов.

Монтаж изделия

Убедитесь в отсутствии на транспортной таре следов повреждений, ударов, которые могли возникнуть при транспортировке. Извлеките изделие из транспортной тары.




Если изделие находилось при температуре ниже 10°C, то перед эксплуатацией оно должно быть выдержано в транспортной упаковке при климатических условиях для эксплуатации не менее 4 часов.


Вкрутите среднюю секцию в ответное место на нижней секции изделия. Установите на средней секции узел нижних крючков. Для этого необходимо надеть на стойку секции стопорное резиновое кольцо, затем надеть этот узел, сориентированный пластиковым фланцем вниз, и надвинуть его сверху на кольцо. Вкрутите верхнюю секцию в ответное место на средней секции изделия.

Подготовка к работе

Переместите изделие в необходимое для работы место и зафиксируйте его положение нажатием на педали блокировки колес. Установите узел нижних крючков на необходимую высоту. Для этого поднимите его вверх по стойке, сместите стопорное кольцо на нужный уровень и надвиньте узел сверху на кольцо.

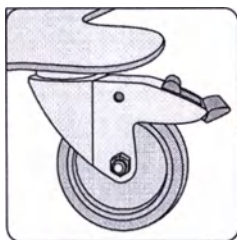

Положение педали при незаблокированных колесах.

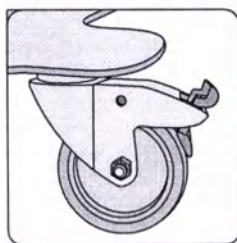

Положение педали при заблокированных колесах (блокируется вращение и поворот колес).

Эксплуатация изделия

Контейнеры с фильтруемым веществом подвешиваются на верхние крючки. Фильтры подвешиваются на нижние крючки. Отфильтрованный продукт располагается на корзинах изделия.



Не превышайте максимальные нагрузки на верхние и нижние крючки и корзины изделия, это может привести к их повреждению. Изгиб крючков и корзин не является гарантийным случаем!

Техническое обслуживание

Перед началом работы с изделием необходимо провести его внешний осмотр, во время которого убедиться в отсутствии его механических повреждений.

По мере загрязнения изделия, необходимо проводить дезинфекцию изделия 3%-ым раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644-96.

Возможные неисправности и способы их устранения

Описание неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Узел крючков нижних под нагрузкой смещается по стойке вниз.	Превышена допустимая нагрузка на узел.	Уменьшить нагрузку на узел.
	Стопорное кольцо потеряло свои свойства.	Заменить стопорное кольцо.
Изделие самопроизвольно катится.	Не заблокированы колеса.	Заблокировать колеса педалями.



Внимание! Неисправности, не отраженные в этой таблице, устраняются на предприятии-изготовителе или в соответствующих сервисных центрах. Для этого обратитесь к поставщику оборудования либо к изготовителю.

Хранение

Транспортная тара с изделием должна храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред.

Хранение изделий в транспортной таре может производиться при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности до 100% при 25°C.

Транспортную тару с изделием штабелировать запрещается.

Транспортирование

Транспортную тару с изделием можно перевозить любыми крытыми транспортными средствами в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование изделий в транспортной таре может производиться при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности до 100% при 25°C.

Размещение и крепление тары в транспортных средствах должно обеспечивать её устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов её друг о друга и о стенки транспортных средств. При транспортировании тару не кантовать.

Транспортную тару с изделием штабелировать запрещается.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия основным параметрам и характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в руководстве по эксплуатации и регулярного проведения технического обслуживания.

Условием исполнения гарантийных обязательств является наличие на изделии маркировки с его заводским номером.

Изготовитель не несет ответственности за поломку изделия, которая явилась результатом неправильного использования или изменения конструкции изделия.

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев от даты выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев от даты ввода изделия в эксплуатацию, при наличии подтверждающих документов. При отсутствии подтверждающих документов, началом гарантийного срока считается дата выпуска.

Срок службы (при интенсивности эксплуатации 8 ч в день) не менее 5 лет.

После истечения гарантийного срока ремонт изделия необходимо производить в лицензированных специализированных организациях. Сотрудник, выполняющий ремонт изделия, должен иметь соответствующий сертификат, выданный производителем. Перечень компаний и сотрудников, имеющих допуск на проведение данных работ, представлен на сайте компании изготовителя: www.leadcore.ru.

В случае отказа изделия необходимо заполнить бланк карты отказа и выслать его на электронный адрес изготовителя: quality@leadcore.ru.

Утилизация

По классу опасности медицинских отходов, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, изделие относится к классу А.

Процедура утилизации изделия:

- разобрать и упаковать изделие в одноразовые пакеты белого цвета;
- доставить пакеты с изделием для временного хранения в специальное помещение на территории ЛПУ;

- вывезти пакеты с изделием на полигон, согласно заключённому договору с лицензированной организацией.

Прошито, пронумеровано
10 (десять) листов
Директор ООО «Лидкор»
Улыбин А.И.

