


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

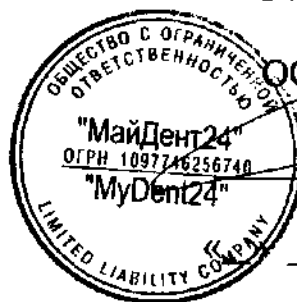

ООО «МайДент24»

Крейзеров Б.И.

2010 г.

## ИНСТРУКЦИЯ


по применению медицинского изделия:

«Зубы акриловые» производства фирмы:

«HUGE DENTAL MATERIAL CO., LTD.», Китай

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральный директор  
ООО «МайДент24»

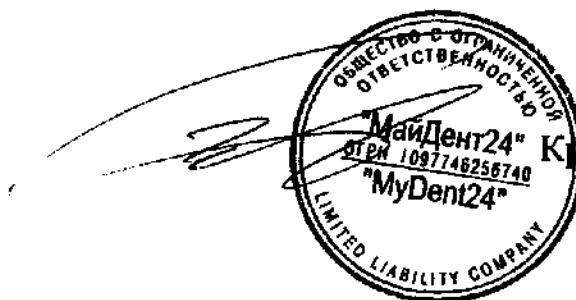

Крейзеров Б.И.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловые зубы используются для создания полностью съемных зубных протезов, съемных зубных протезов, мостовидных зубных протезов, лечебных протезов, устранения пустот в зубных рядах, улучшения лицевой формы и восстановления жевательной способности.

Внешний вид и форма соответствуют натуральным зубам.

Зубы изготавливаются путем горячего давления уникальными композитными металлическими литейными формами из полиметилметакрилата с взаимопроникающей сетевой структурой. Техника изготовления заключается в покрытии центра зуба слоями эмали.

Варианты исполнений различаются по количеству слоев эмали, которыми покрыт центр зуба:

KAILI, KAITONG – 2слойные

KAIFENG – 3слойные

KAILING, KAIYUE – 4слойные

MAIST (Kaibiao) – 5слойные

KAIWANG – 2слойные для временного использования

### **KAILI:**

Рекомендованы для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом.

Два слоя эмали позволяют создать зубы, воссоздающие натуральный зубной ряд при протезировании. Зубы эконом-класса.

Преимущества:

- Отличная стойкость оттенков
- Минимальная гигроскопичность
- Абсолютная цветоустойчивость
- Полно-анатомические окклюзионные поверхности
- Различные цветовые оттенки и формы

### **KAITONG:**

Рекомендованы для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом. Два слоя эмали позволяют создать зубы, воссоздающие натуральный зубной ряд при протезировании. Зубы эконом-класса.

Преимущества:

- Отличная стойкость оттенков
- Минимальная гигроскопичность
- Абсолютная цветоустойчивость
- Отличное сцепление с базисными материалами зубных протезов
- Различные цветовые оттенки и формы

#### **KAIFENG:**

Рекомендованы для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом.

- Три слоя эмали позволяют создать зубы, воссоздающие натуральный зубной ряд при протезировании. Имеют разный наклон (острый от 33° до 28°), обеспечивающий оптимальную степень бугорково-фиссурного контакта зубов-антагонистов в центральном положении. Преимущества: Повышенная износостойкость
- Отличная стойкость оттенков
- Минимальная гигроскопичность
- Абсолютная цветоустойчивость
- Полно-анатомические окклюзионные поверхности
- Различные цветовые оттенки и формы

#### **KAIJING:**

Рекомендованы для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом.

Четыре слоя эмали позволяют создать зубы, воссоздающие натуральный зубной ряд при протезировании.

Это высокачественные зубы с отличной эстетикой, созданные под азиатский тип лица, которые доступны в азиатских странах в настоящее время.

Преимущества:

- Контрастный цвет шейки зуба
- Повышенная износостойкость и стойкость против пятен
- Минимальная гигроскопичность
- Отличное сцепление с базисными материалами зубных протезов
- Различные цветовые оттенки и формы

#### **KAIYUE:**

Рекомендованы для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом.

Четыре слоя эмали позволяют создать зубы, воссоздающие натуральный зубной ряд при протезировании. Созданы с учетом особенностей лицевых характеристик людей на западе, например, американцев и канадцев.

**Преимущества:**

- Естественный вид
- Повышенная износостойкость и стойкость против пятен
- Отличное сцепление с базисными материалами зубных протезов
- Доступная классификация известных оттенков

### **MAIST (Kaibiao):**

Рекомендованы для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом. Представляют собой высококачественную зубную линию для частичных протезов и для полного диапазона всех съемных протезов. Пять слоев эмали позволяют воссоздать идеальный зубной ряд, неотличимый от натуральных зубов при протезировании.

- Преимущества: Тканевая совместимость
- Высокая износостойкость
- Высокая стойкость против пятен
- Стабильный оттенок цвета
- Натуральный блеск
- Идеальное сцепление с базисными материалами протезов
- Натуральная форма
- Доступная классификация известных оттенков

### **KAIWANG:**

Рекомендованы для временных реставраций на срок менее 30 дней.

Два слоя эмали позволяют создать коронки, воссоздающие натуральные зубы при временном протезировании.

**Преимущества:**

- Отличная стойкость оттенков
- Минимальная гигроскопичность
- Абсолютная цветоустойчивость

- Различные цветовые оттенки и формы

## 2. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не обладают биологической активностью; могут безопасно находиться во рту долгое время; не имеют видимых трещин и любых других недостатков на срезе; обладают гладкой поверхностью с естественными буграми; отличаются хорошим соединением с зубной базисной пластмассой, не обесцвечиваются; не меняют форму и цвет; не трескаются под воздействием кипятка; при тестировании не меняют оттенок под воздействием облучения и ультрафиолета. Износостойкость и сопротивление коррозии отличные.

## 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Необходимо содержать зубы в чистоте, зачистить основу зуба для лучшего сцепления с зубной базисной пластмассой; использовать силикатный бор для полировки зубов после шлифовки для защиты от абсорбции; стоматолог обязан узнать у пациента, есть ли у него аллергия на РММА.

## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Изделие должно использоваться с соблюдением общепринятых в стоматологической практике процедур, и рекомендовано для конструкций, которые будут находиться во рту не менее 30 дней, т.е. когда рекомендованы фиксированные мостовидные протезы и восстановление зубного ряда искусственным способом (исключение KAIWANG, которые предназначены для временного протезирования)

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зубы акриловые упакованы в бумажные коробки. Могут поставляться наборами по 28 зубов, или отдельно верхние и нижние зубы.

Рекомендуется хранить при влажности воздуха менее 80% в хорошо вентилируемом месте, не допускать воздействия щелочей и газов. Хранить в чистоте, держать вдали от огня. Не допускается использование непрофессионалами и детьми.

Срок хранения 5 лет (зависит от точной даты производства).