

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТЕХНОДЕНТ»

М.А.Савченко

2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора стоматологического для полирования
и препарирования зубов
методом абразивной струи
«ФЛОУ-КЛИНЗ»
ТУ 9391-011-67200978-2011

Порошок «Флоу-Клинз» выпускается двух типов:

- порошок №1 для профилактической обработки зубов;
- порошок №2 для препарирования полостей;
- суспензия для обработки твердых тканей зубов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Порошок «Флоу-Клинз» №1 предназначен для:

- удаления налета и мягких зубных отложений; очистки фиссур перед герметизацией; удаления пигментаций и отбеливания зубов, не приводящая к гиперестезии зубов.

Порошок «Флоу-Клинз» №2 предназначен для:

- удаления твердых зубных отложений; препарирования и обработки кариозных полостей; подготовки зубов, пораженных поверхностным кариесом, к реставрации.

Суспензия «Флоу-Клинз» для удаления зубного налета, поддесневого камня без повреждения твердых тканей и одновременной полировкой зубных поверхностей.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Порошок «Флоу-Клинз» №1 применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей (Air-Flow). Порошок эффективно очищает твердые ткани, отбеливает и придает зубам здоровый блеск.

В качестве абразивного компонента используется смесь бикарбоната натрия, карбоната и фосфата кальция с размером частиц 50-70мкм, позволяющим провести очистку при щадящем воздействии на твердые ткани зуба. После процедуры во рту появляется приятный освежающий вкус.

Порошок «Флоу-Клинз» №2 содержит в качестве активного абразива оксид алюминия (фракция 30-45мкм) и добавку с освежающим вкусом. Твердость абразива позволяют эффективно удалять твердые зубные отложения и безболезненно препарировать ткани зуба, пораженные поверхностным кариесом.

Суспензия «Флоу-Клинз» содержит кальция фосфат (3-5мкм) и водорастворимый наполнитель, антисептические и вкусовые добавки. С помощью ультразвукового воздействия (типа системы Vector) частицы суспензии безболезненно очищают твердые ткани зуба в труднодоступных зонах. Применение суспензии позволяет значительно снизить эндотоксины без повреждения природных твердых тканей зубов, безболезненно и менее травматично провести кюретаж, а также терапию и профилактику для пациентов с имплантатами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок «Флоу-Клинз» №1 применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа **для полирования зубов** или наконечникам импортного и отечественного производства. Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и профилактического порошка, не направляя в полость рта пациента.

Порошок «Флоу-Клинз» №2 применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа с наконечником **для препарирования зубов**.

Порошки «Флоу-Клинз» используют согласно инструкциям к воздушно-пескоструйным аппаратам или наконечникам отечественного и импортного производства.

Режим подачи струи сжатого воздуха, воды и абразивного порошка подбирается непосредственно перед применением, не направляя в полость рта пациента.

Суспензию применяют согласно инструкциям к аппаратам типа ультразвуковой системы ВЕКТОР.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка!
Не оставлять порошок в резервуаре!!!

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок №1 (флакон)	40г	или 200 г
Порошок №2 (флакон)	40г	или 200 г
Суспензия (флакон)	100мл	
Инструкция по применению	- 1 шт.	
Материалы «Флоу-Клинз» выпускаются индивидуальными изделиями.		

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C. **Избегать попадания влаги!**

Срок годности - 3 года.

Главный инженер Слижевский В.М.

Врач – стоматолог





2 мес.