



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ТехноДент»
Савченко М.А.
_____ 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набора стоматологических жидкостей для обработки
корневых каналов
и твердых тканей зубов
ТУ 9391-001-672009782010

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор стоматологических жидкостей состоит из:

жидкости для выявления устья каналов и их расширения, содержит соли ЭДТА (20%) и поверхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканальца за счет снижения коэффициента поверхностного натяжения раствора;

жидкости (антисептической) для обработки каналов, на основе гипохлорита натрия (3-5,2%);

жидкости для высушивания и обезжиривания каналов и твердых тканей зубов перед пломбированием и фиксацией;

жидкости, останавливающей внутриканальное кровотечение (гемостатической) или десневое просачивание, а также для ретракции десны.

Набор стоматологических жидкостей для обработки корневых каналов изготовлен для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32°C до 42°C

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Жидкости для расширения каналов и антисептической обработки :

в пульповую камеру ввести жидкость для расширения корневого канала и начать механическое расширение. Затем, используя корневую иглу, ввести жидкость в капал па 2-3 минуты и процедуру обработки повторить, чередуя химическое воздействие и механическое расширение канала с пропиткой дентина свежей порцией жидкости по мере необходимости.

Эффективную степень очистки системы корневых каналов обеспечивает метод поочередного применения ЭДТА-содержащей жидкости и антисептической

жидкости, содержащей гипохлорит натрия (3%) с использованием эндодонтической иглы с боковым расположением отверстия (или ирригационного шприца) для введения растворов в глубокие отделы корневого канала.

Завершающую ирригацию проводят 10-20 мл гипохлорита натрия (3-5%) с экспозицией (выдержкой) в канале 5-7 минут. Затем канал промывают дистиллированной водой, высушивают стерильным бумажным штифтом или с помощью жидкости для высушивания и обезжиривания каналов.

Жидкости для высушивания и обезжиривания каналов:

Стерильной ватной турундой, пропитанной жидкостью, тщательно обработать канал, пульповую камеру и коронковую часть зуба. Высушивание и обезжиривание каналов происходит в течение 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха.

Жидкости, останавливающей капиллярные кровотечения:

В случае кровотечения из канала в пульповую камеру ввести ватный шарик или турунду, пропитанную жидкостью. Кровотечение прекращается почти моментально, что позволяет успешно закончить механическую обработку и пломбирование каналов без риска последующего окрашивания зуба.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость для расширения каналов (флакон) - 15 мл или 100 мл

Жидкость антисептическая (флакон) - 15 мл

Жидкость для высушивания (флакон) - 15 мл

Жидкость гемостатическая (флакон) - 15 мл

Инструкция по применению - 1 шт.


Допускается выпуск жидкостей отдельным изделием.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 3 года.

Главный врач ГКБ №68

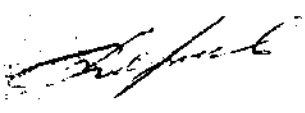

Тарасов К.М.

Начальник цеха



Волошин А.М.