

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕХНОДЕНТ»
М.А.Савченко
2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ комплекта стоматологического для лечения и пломбирования корневых каналов зубов «КРЕЗОТИН» ТУ 9391-015-67200978-2011

Стоматологический набор «Крезотин» состоит из двух жидкостей (№1 и №2) и готовой к применению пасты.

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость №1 «Крезотин» предназначена для обезболивания при травматических и острых пульпитах перед внесением девитализирующей пасты, а также при периодонтитах. Жидкость можно использовать в качестве компресса длительного действия для «купирования» пульпита.

Жидкость №2 «Крезотин» для антисептической обработки инфицированных каналов зубов при осложненном пульпите, а также при резекции верхней части корня зуба.

Паста «Крезотин» предназначена для пломбирования инфицированных и труднопроходимых каналов, а также для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Жидкость №1 содержит:

- хлорфенол, крезол – антисептики широкого спектра действия, незначительно мумифицирующие нервные волокна;
- лидокаина гидрохлорид - анестетик, обеспечивающий болеутоляющее действие жидкости;
- камфору, смягчающую воздействие хлорфенола на организм.

Жидкость № 2 содержит

- фенол, эвгенол, формальдегид, - антисептики, механизм действия которых связан с денатурацией белков микроорганизмов, что обеспечивает антисептические свойства и глубокую мумификацию, а также стерилизацию корневых каналов зубов.

Для быстрого и эффективного снижения болевых реакций в жидкость введен активный кортикостероид – дексаметазон (0,1%), оказывающий противовоспалительное и антиаллергическое действие.

Паста «Крезотин» содержит окись и сульфат цинка - антисептик, обладающий вяжущими свойствами. В качестве рентгеноконтрастного наполнителя в пасту введен бария сульфат. Антисептическую основу пасты составляют: хлорфенол, камфора, - что позволяет применять пасту после обработки жидкостями как завершающий этап лечения материалами единой антисептической основы. В пасту введен дексаметазон (0,1%) для снижения болевых реакций при выведении материала за апекс.

Паста обладает превосходной текучестью (23мм), легко вводится в канал с помощью каналонаполнителя и затвердевает под воздействием внутриканальной влаги в течение 72 часов. После отверждения растворимость материала составляет 1,5%. Материал соответствует требованиям ГОСТ Р 51059-97.

В случаях аллергических реакций у особо чувствительных пациентов пасту следует удалить и отказаться от дальнейшего применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкость №1 следует применять, используя турунды или ватные шарики для компрессов, которые пропитывают жидкостью и слегка отжимают, чтобы не было подтеканий препарата. При глубоком кариесе и острых пульпитах тампон, пропитанный жидкостью № 1, положить в полость, изолировать временным материалом, стараясь не нажимать и оставить на 1-3 дня.

При продолжительном лечении для применения жидкости в качестве непроницаемого компресса длительного действия пропитанный ватный шарик оставляют под временной пломбой. Через некоторое время (до 10 дней), определенное врачом, можно приступить к запланированному лечению зуба.

Жидкость №2 применяют, используя турунды, которые пропитывают и тщательно отжимают, не допуская подтекание препарата, и оставляют в устье канала под временной пломбой на 2-3 дня. Пропитанными турундами обрабатывают инфицированные каналы, а также их используют для временного компресса, оставляя в канале. Через 2-3 дня турунду следует убрать, обработку канала повторить и запломбировать стерильный корневой канал пастой «Крезотин». После пломбирования канала необходимо провести изоляцию из стеклоиономерного цемента и реставрацию коронки зуба.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (банка)	- 25,0 г
Жидкость №1 (флакон)	- 15,0 мл
Жидкость №2 (флакон)	- 15,0 мл
Инструкция по применению	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C. После применения банку с пастой необходимо плотно закрывать.

Избегать попадания влаги.

Срок годности - 2 года.

Главный инженер Слижевский В.М.

Врач-стоматолог





2 лст.