

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕХНОДЕНТ»
М.А.Савченко

2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
геля универсального для травления эмали и дентина
ТРАВЛИН
ТУ 9391-012-67200978-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Гель «Травлин» предназначен для травления эмали и дентина перед пломбированием кариозных полостей препарируемого зуба.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Гель для травления эмали и дентина содержит ортофосфорную кислоту (37%) и гелеобразователь, определяющий тиксотропные свойства, что позволяет наносить гель точно без подтеканий на поверхности, не требующие обработки. Краситель контрастного цвета позволяет контролировать точность нанесения геля на твердые ткани зуба.

При нанесении геля на эмаль через 15-30 сек эмаль приобретает матовый меловидный оттенок, что является признаком образования на ее поверхности микрошероховатости, которая увеличивает силу адгезии реставрационного материала к эмали.

При нанесении геля на дентин ортофосфорная кислота образует фосфаты с кальцием дентина и смазанного слоя, что способствует удалению смазанного слоя и раскрытию дентинных канальцев. Применение геля обеспечивает высокую адгезию реставрационного материала к дентину.

Гель «Травлин» на водорастворимой основе легко и полностью смывается водно-воздушной струей.

Внимание! При попадании на открытые части тела или в глаза необходимо промыть большим количеством воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Небольшое количество геля для травления аппликатором наносят на препарированную промытую и просушенную поверхность эмали (время воздействия -30секунд) и дентина (время воздействия - 15секунд). Для обработки эмали и дентина общее время протравливания составляет 30сек. Затем гель тщательно смывают водно-воздушной струей и сушат протравленную поверхность струей воздуха.

Если на протравленной поверхности не появился меловой матовый оттенок, то процедуру травления необходимо повторить.

Затем протравленную поверхность необходимо обработать праймером и адгезивом и приступить к реставрации.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель (шприц) - 5 мл
Инструкция по применению - 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года.

Главный инженер Слижевский В.М.

Врач - стоматолог

