

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕХНОДЕНТ»

М.А.Савченко

2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора стоматологических жидкостей для снижения
гиперестезии твердых тканей зубов
«ДЕСЕНСЕТИН»
ТУ 9391-010-67200978-2011

В стоматологический комплект «Десенсетин» входят:

- жидкости для снижения гиперестезии зубов;
- анестезирующий гель для обработки слизистой оболочки полости рта;
- суспензия для снижения гиперестезии зубов.

Стоматологический комплект «Десенсетин» выпускается отдельными индивидуальными изделиями: набор жидкостей, суспензия, гель.

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкости №1 и №2 «Десенсетин» в совместном применении предназначены для снижения болевой чувствительности дентина при клиновидном дефекте, эрозии эмали, оголении пришеечной части коронки зуба, для обработки культи витального зуба после одонтопрепарирования, а также глубоких полостей при лечении кариеса.

Суспензия «Десенсетин» предназначена для обработки твердых тканей зубов с целью снижения чувствительности. Возможно применение не только в условиях клиники, но и в домашних условиях.

Гель «Десенсетин» предназначен для поверхностно-аппликационного применения на слизистой оболочке полости рта с целью обезболивания перед инъекцией, при незначительных раневых повреждениях, иссечении десны, при прорезывании зубов, а также для снижения рвотного рефлекса у чувствительных пациентов.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Жидкости №1 и №2 «Десенсетин» в совместном применении на твердых тканях зубов при последовательной обработке образуют соли микрокристаллического размера (1-3 мкм), плотно герметизирующие дентинный дефект.

Жидкость № 1 содержит фосфат, карбонат калия, фторид натрия и антисептик в дистиллированной воде.

Жидкость № 2 содержит хлориды кальция, стронция и антисептик в дистиллированной воде.

При проникновении глубоко в дентинные каналы образуются нерастворимые соли фосфатов, карбонатов и фторидов кальция и стронция, перекрывающие доступ раздражителей. Ионы калия снижают передачу нервного импульса, чем снижают болевую проводимость.

Суспензия «Десенсетин» на водно-спиртовой основе содержит фосфат кальция, фторид натрия и аргинин. При нанесении на поверхность зуба аргинин из композиции образует комплекс, обладающий высокой буферной емкостью, и эффективно блокирует воздействие кислотных раздражителей, что быстро и надолго освобождает пациентов от болевых ощущений.

Гель «Десенсетин» выпускается с различными отдушками (мятной, цитрусовой, лесной ягодой) на водорастворимой основе, содержащей лидокаина гидрохлорид (12%).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения жидкостей №1 №2 необходимо очистить, продезинфицировать и высушить поврежденный дентин. Чистым аппликатором (брашем или кисточкой) в течение 10 секунд поверхность дентина обильно смочить жидкостью № 1. Затем на обработанную поверхность дентина другим чистым аппликатором (брашем или кисточкой) нанести жидкость №2 и тщательно втереть в течение 10 секунд. Через 7-8 минут можно проводить плановое лечение.

Для применения суспензии необходимо очистить, продезинфицировать и высушить поврежденный дентин. Суспензию нанести с помощью браша (или другого аппликатора) на проблемные участки зуба и тщательно втереть в поврежденную поверхность. Дополнительные количества суспензии можно вносить неоднократно без боязни нарушения структуры предыдущей порции. После втирания последней порции следует просушить с применением воздушной струи (в домашних условиях с применением фена) в течение 1-1,5 минут или порекомендовать пациенту не закрывать рот в течение 5-7 минут. Необходимо рекомендовать пациенту воздержаться от приема пищи, напитков и проведения полосканий в течение 2 часов после процедуры, а также не употреблять в пищу кислотосодержащих напитков и фруктов в течение 3-5 дней после процедуры. Для получения стойкого эффекта в течение года процедуру нанесения следует проводить 2-3 раза в течение 7-10 дней.

Для применения анестезирующего геля слизистую поверхность следует аккуратно слегка осушить ватным шариком и с помощью аппликатора или на турунде нанести гель на участок слизистой поверхности полости рта, подлежащий обезболиванию. Через 1-2 минуты следует провести запланированные манипуляции. Время обезболивания можно увеличить до 20-30 минут при повторном нанесении геля.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость № 1 (флакон)	- 15 мл	или суспензия (шприц)	- 5мл
Жидкость № 2 (флакон)	- 15 мл	или гель (шприц)	- 5мл
Кисточки	- 10 шт.	или гель (туба)	- 60г
Инструкция по применению	- 1 шт.		

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года.

Главный инженер Слижевский В.М.

Врач – стоматолог



1. 



2 лист.

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ