

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «ТехноДент»
Савченко М.А.
_____ 2013г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Комплект стоматологических гелей
для облечения препарирования твердых тканей зуба и
антисептической обработки
ТУ 9391-024-67200978-2012

В комплект стоматологических гелей входят:

- гель для облегчения препарирования твердых тканей зуба;
- гель для антисептической обработки.

ПОКАЗАНИЯ

Область применения – стоматология.

Для профессионального применения в условиях ЛПУ.

Гель для облегчения препарирования твердых тканей зубов предназначен для выявления, химико-механического расширения, формирования корневых каналов и неглубоких полостей с помощью ручных инструментов.

Гель для антисептической обработки применяют при лечении инфицированных каналов зубов и тканей пародонта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Гели предназначены для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32°C до 42°C (в условиях полости рта при температуре $(37\pm 1)^{\circ}\text{C}$ и влажности 60-90%).

Гель для облегчения препарирования твердых тканей зубов, выявления, химико-механического расширения, формирования корневых каналов содержит: комплексон кальция (ЭДТУ с пероксидом и ее натриево-калиевые соли ЭДТА), пастообразователь и наполнитель.

Комплексон кальция (этилендиаминтетрауксусная кислота -15%; этилендиаминтетраацетат -20%), попадая на дентин, образует комплексное растворимое соединение с кальцием, чем разрыхляет структуру твердых тканей и облегчает разработку кальцифицированных и склерозированных устьев каналов, очистку и формирование труднодоступных каналов зубов и полостей.

Для тщательной очистки от дентинных опилок и осколков, а также для антисептической обработки в гель введен пероксид. Гель в совместном применении с раствором гипохлорита натрия образует пену из-за активного выделения хлора и кислорода. Пеновыделение способствует удалению инфицированной ткани и дентинных опилок. В результате обработки улучшается цвет и блеск зубов путем отбеливания. Гелеобразователь служит хорошей смазкой для инструментов. Водорастворимая основа геля позволяет легко и быстро его смыть водой.

Гель для антисептической обработки содержит: метронидазол и хлоргексидина биглюконат - антисептики, активно подавляющие анаэробную флору корневых каналов зубов. Хлоргексидина биглюконат оказывает быстрое действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Метронидазол обладает широким спектром действия в

отношении простейших, анаэробных бактерий (споро - и неспорообразующих), активен в отношении бактериоидов, фузобактерий.

Благодаря гидрофильной тиксотропной основе гель легко вводится в труднодоступные места верхней и нижней челюсти, глубоко проникает и легко вымывается водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект стоматологических гелей предназначен для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32°C до 42°C (в условиях полости рта при температуре $(37\pm 1)^{\circ}\text{C}$ и влажности 60-90%).

Перед применением гелей зуб необходимо изолировать раббердамом или ватными тампонами.

Гель для облегчения препарирования твердых тканей зубов, выявления, химико-механического расширения нанести на инструмент и легкими нагнетательными движениями начать препаровку твердых тканей или разработку канала. При необходимости процедуру повторить несколько раз с использованием свежей порции геля. Затем полость или корневой канал промыть дистиллированной водой.

Гель для антисептической обработки помещают в препарированную полость или вводят в инфицированный корневой канал или в пародонтальный карман. Препарированную полость промывают и реставрируют.

При лечении корневого канала гель оставляют в канале под временной повязкой на 3-5 дней. При необходимости процедуру повторяют со свежей порцией геля. При положительной динамике на последнем этапе лечения гель следует вымыть из канала, просушенный канал запломбировать и провести реставрацию коронки зуба.

Внимание! После каждого применения флаконы и шприцы с материалами следует тщательно закрывать. Несоблюдение требования ведет к непригодности материалов к применению.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель для облегчения препарирования (ЭДТА/ЭДТУ с пероксидом) (шприц)	5мл
Гель для антисептической обработки (шприц)	5 мл
Инструкция по применению	1 шт
Упаковка	1 шт

Допускается выпуск отдельно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать при температуре от +5°C до +25°C.

Комплект гелей предназначен для многократного применения.

Внимание! Несоблюдение условий хранения, транспортирования, применения ведет к сокращению срока службы изделия.

После вскрытия упаковки гарантийный срок хранения и применения ограничен сроком годности. Запрещается применять по истечении срока годности.

Гарантийный срок годности - 3 года от даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для безопасных медицинских отходов класса А.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «ТехноДент»

308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132А

Тел/факс (4722) 23-14-18, 23-14-81.


E-mail: tehnodent31@mail.ru

Гл.технолог



Кузьмина Е.А.

Генеральный директор
ООО «ТехноДент»

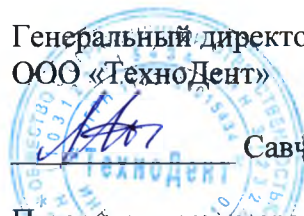

Савченко М. А.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

2 96A ЛИСТОВ