

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
«ТехноДент»
Савченко М.А.
_____ 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Стоматологического материала на основе иодоформа
«ИОДОТИН»
для лечения и пломбирования корневых каналов зубов
ТУ 9391-003-67200978-2010

Стоматологический материал «Иодотин» выпускается в двух формах:

- **нетвердеющая паста** для временного пломбирования при лечении инфицированных каналов зубов;
- **твердеющая паста** для постоянного пломбирования каналов зубов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Нетвердеющая паста «Иодотин» применяется:

- при лечении острых и хронических периодонтитов;
- для временного пломбирования инфицированных каналов при лечении пульпитов;
- для апексификации при периодонтитах, при несформированном апексе, при перфорациях корня, а также резорбции кости;
- для лечения гранулематозного и гранулирующего периодонтита, а также при повторной инфекции после пломбирования.

Твердеющая паста «Иодотин» применяется для пломбирования каналов зубов после лечения пульпитов и всех форм периодонтитов, как во взрослой, так и в детской стоматологии для пломбирования каналов молочных зубов.

Стоматологический материал «Иодотин» изготовлен для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32°C до 42°C

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Стоматологический материал «Иодотин» содержит комплекс антисептиков с пролонгированным дезинфицирующим и бактерицидным действием:

-йодоформ, который в контакте с тканями подвергается постепенному разложению, выделяя свободный иод, обеспечивающий непрерывное антибактериальное действие;

- хлорфенол, антисептик ряда фенола;
- камфору, смягчающую действие фенолов на организм;
- настообразователь и кальций содержащий наполнитель.

Применение нетвердеющей пасты «Иодотин» позволяет проводить длительное лечение, после чего применение твердеющей пасты «Иодотин» снижает возможность осложнений и болевой реакции после пломбирования.

Структурирование твердеющей пасты происходит в канале под воздействием внутриканальной влаги в течение 48-72 часов.

Внимание! В случаях аллергических реакций на компоненты пасты материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением сухим инструментом пасту в банке необходимо перемешать.

При лечении инфицированных каналов зубов ввести нетвердеющую пасту «Иодотин» в верхнюю часть расширенного обработанного канала и запломбировать полость временным пломбировочным материалом «Темподент», избегая компрессии. При необходимости лечебную пасту «Иодотин» можно оставлять в канале на 8-10 дней.

В следующее посещение очистить каналы от пасты, провести медикаментозную обработку и заполнить каналы твердеющей пастой «Иодотин». После наложения изолирующей подкладки провести реставрацию коронки зуба.

При лечении пульпита твердеющую пасту «Иодотин» ввести в медикаментознообработанный канал, используя корневую иглу или каналонаполнитель. Чтобы избежать окрашивания коронки зуба, не рекомендуется заполнять пастой пульповую камеру. После наложения изолирующего подкладочного материала реставрировать анатомическую форму зуба.

В детской стоматологии для лечения молочных зубов после удаления кариозного дентина и некротизированных тканей, канал заполнить нетвердеющей пастой «Иодотия», затем закрыть временной пломбой («Гемподент»). В следующее посещение снять часть временной пломбы и провести восстановление анатомической формы зуба.

Для апексификации при периодонтитах зубов с несформированным апексе необходимое количество нетвердеющей пасты ввести в подготовленный канал как можно ближе к апексу. Излишки пасты необходимо удалить. Под контролем рентгенограммы провести лечение в течение 1-3 месяцев для формирования апексального барьера, после чего рекомендуется очистить канал, обработать и запломбировать твердеющей пастой, изолировать подкладочным материалом и реставрировать коронку зуба.

После применения банку (или шприц) закрыть и хранить в упаковке с целью изоляции от света.

ФОРМА ВЫПУСКА

1. Паста твердеющая (банка)	- 25.0 г	или шприц	-2г
Инструкция по применению	- 1 шт.		
2. Паста нетвердеющая (банка)	- 25.0 г	или шприц	-2г
Инструкция по применению	- 1 шт.		

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят в сухом темном месте в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C

Срок годности - 2 года.

Избегать попадания влаги!!!

Главный врач ГКБ №68

Начальник цеха

Тарасов К.М.

Волошин А.М.