

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «ТехноДент»

Савченко М.А.

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Стоматологического комплекта «РЕЗОРТИН»

**для лечения, антисептической обработки и
пломбирования корневых каналов зубов
ТУ 9391-007-67200978-2010**

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологический комплект «Резортин» предназначен для лечения труднопроходимых каналов, для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Стоматологический комплект «Резортин» состоит из:

- жидкости лечебной, содержащей формальдегид;
- жидкости каталитической для отверждения;
- порошка, содержащего резорцин и рентгеноконтрастный наполнитель.

При смешивании жидкостей с порошком получается пластичная паста, плотно заполняющая канал и твердеющая в течение 24 часов. Образуется антисептическая резорцин-формальдегидная смола, содержащая рентгеноконтрастный наполнитель.

При пломбировании каналов не рекомендуется выводить пасту в пульпарную часть зуба из-за окрашивающего эффекта.

Стоматологический комплект «Резортин» изготовлен для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32°C до 42°C

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для антисептической обработки после удаления пульпы и медикаментозной обработки канал необходимо тщательно просушить обработать лечебной жидкостью, не допуская подтеканий.

Для пломбирования каналов смешать жидкости лечебную (1капля) и каталитическую (1капля) в объемном соотношении 1:1. К смеси присыпать порошок и замешать в течение 1минуты до получения пластичной пасты.

Для лечения инфицированных каналов или глубокой стерилизации каналов при приготовлении пасты рекомендуется использовать лечебной жидкости вдвое больше, чем каталитической.

Пасту внести в канал, слегка уплотняя, не выводя за устья канала. Избыток пасты необходимо тщательно удалить.

ФОРМА ВЫПУСКА

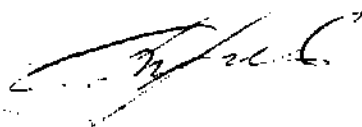
Жидкость лечебная (флакон)	5 мл
Жидкость каталитическая (флакон)	5 мл
Порошок (банка)	10 г
Мерник для порошка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C.

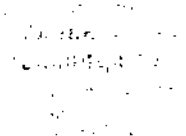
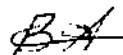
Срок годности - 2 года.

Главный врач ГKB №68



Тарасов К.М.

Начальник цеха

Волошин А.М.