


УТВЕРЖДАЮ

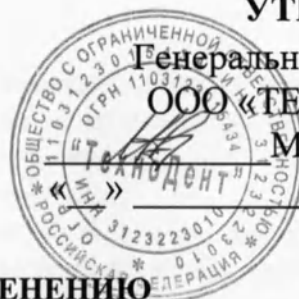

Генеральный директор
ООО «ТЕХНОДЕНТ»
М.А.Савченко

2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
пасты стоматологической для девитализации пульпы зуба
«ДЕВИТАЛ»

ТУ 9391-016-67200978-2011

Стоматологическая паста «ДЕВИТАЛ» выпускается в двух формах:

- с мышьяком «Девитал» (с мышьяком);
- без мышьяка «Девитал» (без мышьяка).

НАЗНАЧЕНИЕ

Стоматологическая паста «Девитал» предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Стоматологическая паста «Девитал» представляет собой готовую к применению композицию.

Стоматологическая паста «Девитал» (с мышьяком) синего цвета содержит:

- мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и эффективный некроз пульпы;
- лидокаина гидрохлорид – анестетик местного действия - снижает болезненность чувствительных тканей при девитализации;
- эвгенол – седативный антисептик широкого спектра действия;
- наполнитель, краситель и пастообразователь, придающие технологичность материалу.

Девитализация пульпы происходит в течение 24 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней.

Внимание! Время нахождения препарата в полости зуба не должно превышать 72 часов. В случае утечки девитализирующей пасты через временную пломбу (появления привкуса и запаха гвоздичного масла) пациент должен немедленно сообщить врачу и явиться на прием.

Стоматологическая паста «Девитал» (без мышьяка) белого цвета содержит:

- параформ - антисептик, коагулирующий белки, обеспечивая некроз пульповой ткани;
- лидокаина гидрохлорид - анестезирующий компонент и снижающий риск возникновения болезненных реакций при девитализации пульпы;
- эвгенол и м-крезол - актимикробные компоненты;
- пастообразователь, краситель и наполнитель.

Применение пасты «Девитал» (без мышьяка) обеспечивает пролонгированную и безболезненную девитализацию пульпы в течение 1-5 дней. При разбавлении пасты окисью цинка в 2 раза (по объему) пасту можно применять в детской стоматологии.

4

После девитализации пульпы при условии отсутствия боли через 24-48 часов (определяется врачом индивидуально) необходимо провести экстирпацию пульпы и дальнейшее лечение корневого канала.

- 3,0 г или паста (банка) - 6,5 г

- 1 шт.

11.

Внимание! При работе с пастой «Девитал-арсеникум» (с мышьяком) необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Пасту следует хранить отдельно от других стоматологических материалов.

1. 

Главный инженер
Врач-стоматолог

1990

2 л.ст.