

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

«Оптосмайл»



Гераськин А.А.

2012г.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Брекет-система иБрейс (eBrace) индивидуальная,  
лингвальная для одной или двух челюстей,  
производства «Guangzhou Riton Biomaterial Co., Ltd.», Китай.**

**2012**



Хорошие зубы  
Свободная улыбка  
Крепкое здоровье  
Счастливая жизнь



**Guangzhou Riton Biomaterial Co.,Ltd.**

Address: 301 Room, Building B, industrial and commercial trading park.  
Hainan Town, Huadi Nan Road, Fangcun, liwan District, Guangzhou.

индивидуализированная система лингвальных брекетов e-Brace

инструкция по использованию



**e·brace**<sup>TM</sup>  
lingual bracket system  
易美舌側矯治系統

Индивидуально для каждого, невидимые, удобные

# Инструкция по фиксации брекетов e-Brace (светоотверждаемая система)




1. Переносная каппа, модель постановки зубов и скриншоты.



2. Необходимые ортодонтические инструменты:



3. Убедитесь в правильном исполнении переносной каппы, обработайте ее спиртом. При необходимости разрежьте каппу на несколько частей специальными ножницами для работы с лингвальной техникой.

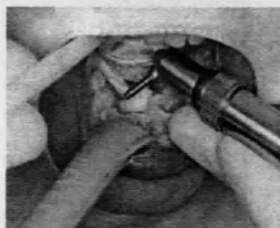

Прибор  
для  
пескоструйной  
обработки

4. Проведите внутриротовую пескоструйную обработку каждого зуба в течение 3-4 секунд, предварительно обеспечив защиту десен во избежание кровотечений.




5. Установите в ротовую полость ретрактор со слюноотсосом.





6. Подготовьте лингвальную поверхность зубов (37% ортофосфорная кислота, аспирация слюны и промывание, просушивание) и затем

# Инструкция по фиксации брекетов e-Brace (светоотверждаемая система)

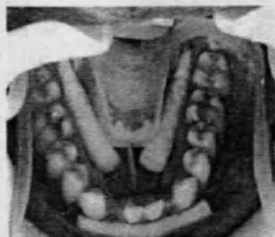

7. Перед приклеиванием брекетов на нижнюю челюсть положите хлопковые валики в подъязычную область симметрично. Нанесите светоотверждаемый праймер на лингвальную поверхность зубов и на поверхность брекетов e-Brace, находящихся в переносной капке.

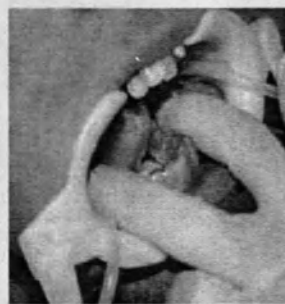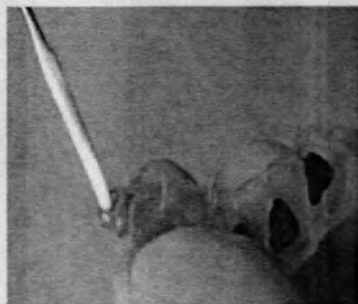


8. Нанесите светоотверждаемый адгезив на поверхность брекетов e-Brace, находящихся в переносной капке.

9. Поместите капку в ротовую полость, придерживая ее, но не давя на нее.






11. Удалите каппу из ротовой полости двумя этапами: сначала снимите более жесткие участки каппы, а затем более мягкие, начиная с задних зубов и двигаясь к передним, от внешней поверхности к внутренней поверхности зубов.

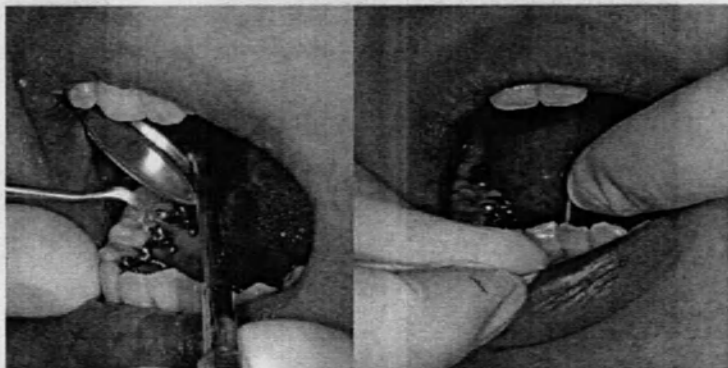

12. Устраните избыток клея при помощи короткого зонда, скалера и зубной нити. Не забудьте также обработать и вестибулярную поверхность зубов.



13. Фиксация брекетов на зубах завершена.

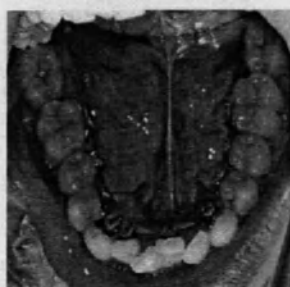

14. Вставьте дугу необходимого размера.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,  
ПРОШНУРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
4 ЛИСТА (ОВ)

