

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Солнцг Комиани»

Андреев Ю. П.

Справка

об изделии медицинского назначения

**Имплант вязко-эластичный для инъекционной контурной пластики
Stylage.**

1. Импланты из гиалуроновой кислоты, содержащие лидокаин: загущенной или нет, для коррекции морщин, дефектов кожи или губ посредством интрадермального или подкожного введения или инъекции в губы: STYLAGE M Lidocaine, STYLAGE Special Lips Lidocaine и STYLAGE HYDRO max.

2. Описание изделия.

Название	Упаковка	Состав	Показания	Продолжительность эффекта
STYLAGE M Lidocaine	Шприц 1 мл, 4 иглы 30 G 1/2	Гиалуроновая кислота с перекрестными связями 20 мг. Ледокаина гидрохлорида 3 мг. Фосфатный буфер, показатель pH 7,2 q.s. 1 г. Наполненный стеклянный шприц 1 мл.	Для заполнения средних и глубоких морщин и / или для улучшения контура губ аугментации объема губ путем инъекции в средние или глубокие слои дермы лица. Ледокаина	От одного до двух сеансов для оптимального лечения эстетических дефектов

			гидрохлорид предназначен для уменьшения боли при инъекции	
STYLAGE Special Lips Lidocaine	Шприц 0,8 мл, 2 иглы 30 G 1/2	Гиалуроновая кислота с перекрестными связями 20 мг.	Для улучшения контура губ и / или аугментации объема губ. Ледокаина гидрохлорид предназначен для уменьшения боли при инъекции	От одного до двух сеансов для оптимального лечения эстетических дефектов
STYLAGE HYDRO Max	Шприц 1,0 мл, 2 иглы: 1 игла: 30 G 1/8 2 игла: 30 G 1/2	Гиалуроновая кислота с перекрестными связями 12,5 мг. Фосфатный буфер, показатель РН 7,2 q.s. 1 г. Наполненный Стекланный шприц 1 мл.	Для улучшения увлажнения и эластичности кожи, путем использо- вания папульной техники, серии пунктиров или техники наппажа в область соединения дермы с эпидермисом лица, шеи,	От одного до двух сеансов для оптимального лечения эстетических дефектов

			декольте и тыльные стороны рук	
STYLAGE HYDRO	Шприц 1,0 мл, 2 иглы: 30 G 4 мм	Гиалуроновая кислота 14 мг. Фосфатный буфер, показатель PH 7,2 q.s. 1 мл.	Омоложение кожи лица, шеи и декольте. Коррекция мелких морщин	От одного до трех сеансов для оптимального лечения кожи
STYLAGE XL	Шприц 1,0 мл, 4 иглы: 26 G 1/2	Гиалуроновая кислота с перекрестными связями 26 мг. Фосфатный буфер, показатель PH 7,2 q.s. 1 мл.	Для глубоких дермальных или подкожных инъекций, для заполнения складок кожи и / или для объемной аугментации лица	От одного до двух сеансов для оптимального лечения эстетических дефектов

STYLAGE L	Шприц 1,0 мл, 4 иглы: 27 G 1/2	Гиалуроновая кислота с перекрестными связями 24 мг. Фосфатный буфер, показатель PH 7,2 q.s. 1 мл.	Для глубоких дермальных инъекций, для заполнения складок кожи и / или для эстетической аугментации объема лица	От одного до двух сеансов для оптимального лечения эстетических дефектов
STYLAGE M	Шприц 0,1 мл, 4 иглы: 30 G 1/2	Гиалуроновая кислота с перекрестными связями 20 мг. Фосфатный буфер, показатель PH 7,2 q.s. 1 мл.	Для заполнения складок кожи и / или для улучшения контура губ и аугментации губ.	От одного до двух сеансов для оптимального лечения эстетических дефектов
STYLAGE S	Шприц 0,7 мл, 4 иглы: 30 G 1/2	Гиалуроновая кислота с перекрестными связями 16 мг. Фосфатный буфер, показатель PH 7,2 q.s. 1 мл.	Для заполнения складок кожи и / или для улучшения контура и аугментации губ.	От одного до двух сеансов для оптимального лечения эстетических дефектов

3. Сфера применения

STYLAGE предназначен для дермальных или подкожных инъекций, с целью заполнения складок кожи и / или для объемной аугментации. Процедура проводится практикующим специалистом, имеющим официальную квалификацию и обученным технике введения инъекционных имплантатов.

STYLAGE – имплантат для одноразового применения. Не использовать повторно. Количество вводимого препарата зависит от морщины или дефекта кожи, который необходимо корректировать. Только практикующий специалист может определить необходимую дозу инъекции для оптимального результата.

Генеральный директор

Антипов Ю.П.