

Генеральный директор
ООО «КТБ «Аудиомаг»

П. Горячев

2007 г.



АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ТРИММЕРНЫЕ ВОЗДУШНОГО ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ
ЗАУШНОГО ТИПА "БРИЗ-Т31SP", "БРИЗ-Т41SP" , "БРИЗ-Т42SP"

Паспорт

210-00-00 ПС

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

2007

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1 Технические требования	5
2 Комплектность	7
3 Техническое описание	8
4 Подготовка к работе	12
5 Использование СА	14
6 Техническое обслуживание	15
7 Простейшие неисправности и методы их устранения	17
8 Свидетельство о приемке	18
9 Гарантии изготовителя	19
Приложение А (гарантийные талоны)	20

Подпись и дата

Имя № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя № подл

					210-00-00 ПС					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.		Полятов		30.06.09	Аппараты слуховые электронные цифровые триммерные воздушного звукопроведения » «БРИЗ-Т31SP», «БРИЗ-Т41SP», «БРИЗ-Т42SP» Паспорт					
Провер.		Скворцов						Лит.	Лист	Листов
Н. Контр.									2	23
Утверд.  30.06.09 Гл. инж.					ООО «КБ «Аудиомаг»					

Настоящий паспорт распространяется на аппараты слуховые электронные цифровые триммерные воздушного звукопроводения заушного типа "БРИЗ-Т31SP", "БРИЗ-Т41SP", "БРИЗ-Т42SP" (далее СА) и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной эксплуатации и технического обслуживания СА.

СА предназначены для звукоусиления по воздушному звукопроводению при средних и тяжелых потерях слуха.

В СА осуществляется цифровая обработка звуковых сигналов.

СА имеют две программы прослушивания и настраиваются с помощью триммеров.

Триммерная настройка позволяет легко и точно настроить СА без применения компьютера.

СА предназначены для индивидуального пользования .

Цифровая обработка звукового сигнала, широкий динамический диапазон и разнообразные регулировки параметров СА обеспечивают естественное звучание, оптимальную разборчивость речи.

СА отличаются современным дизайном, хорошими электроакустическими характеристиками, удобны в эксплуатации, надежны.

При эксплуатации СА располагается за ухом пациента и соединяется со слуховым проходом при помощи гибкого звукопровода с ушным вкладышем.

СА по устойчивости к механическим воздействиям относятся к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

СА по последствиям отказа относятся к классу Г5 по РД-50-707 и ГОСТ Р 50444-92.

Подпись и дата

Имя № дубл

Изм. инв. №

Подпись и дата

Изм. инв. №

Изм.	Подп.	Изм. инв. №	Подп.	Дата
30м	01-08			13.06.08

210-00-00 ПС

Лист

3

В зависимости от степени потенциального риска применения СА относятся к классу 2а ГОСТ Р 51609-2000.

СА применяются по назначению врача.

Подбор и настройку СА должен осуществлять специалист по слухопротезированию.

Триммерная настройка позволяет легко и точно настроить СА без применения компьютера.

Примечание – Если СА приобретен в организации, которая не оказывает услуги по подбору и настройке СА, то обращайтесь в сурдологический центр или кабинет слухопротезирования по месту жительства.

СА сертифицированы.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.В06451

Срок действия – по 11.09.2010г.

Выдан ООО ЦСМИ ВНИИМП

Подпись и дата	Име № дубл	Взам. инв. №	Подпись и дата	№. Не подл.
210-00-00 ПС				
4				

000 ЦСМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
----------	---------------	-----------------------	------	------	----------	---------	------

I Технические требования

1.1 Параметры СА должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Тип аппарата		
	"БРИЗ-Т31SP"	"БРИЗ-Т41SP"	"БРИЗ-Т42SP"
1	2	3	4
1 Полное акустическое усиление, дБ: максимальное на частоте 1600 Гц	78±4,5 65±4,5		
2 Максимальный ВУЗД ₉₀ , дБ	138±4		
3 Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30		
4 Коэффициент компрессии, не менее	3		
5 Верхняя граница усредненного частотного диапазона, Гц	5000±500		
6 Нижняя граница усредненного частотного диапазона, Гц	100± ¹⁰⁰ ₅₀		
7. Глубина регулировки акустического усиления дБ, не менее	—	—	30
8 Глубина регулировки ВУЗД дБ, не менее	—	25	—

Подпись и дата

Имя и подп.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, Подподл.

210-00-00 ПИС

Лист

5

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
9 Глубина регулировки тембра в области низких частот, дБ, не менее	35		
10 Глубина регулировки тембра в области высоких частот, дБ, не менее	20		
11 Коэффициент гармоник на частотах, %, не более: 500 Гц	5		
1000 Гц	3		
1600 Гц	3		
12 Приведённый ко входу уровень собственных шумов (при кривой А), дБ, не более	30		
13 Потребляемый ток, мА, не более	1,3		
14 Максимальный выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	110		
15 Время срабатывания АРУ, мс, не более	20		
16 Время восстановления АРУ, мс, не более	120		

Примечания:

1. Параметры по п.п. 1 - 13; 15, 16 таблицы 1 приведены при включении переключателя в положение "М".

2. Параметры по п. 14 таблицы 1 приведены при включении переключателя в положение "Т"

1.2 Номинальное напряжение питания слухового аппарата 1,4 В.

Питание осуществляется от элемента питания 675 или аналогичного.

1.3 Средний срок службы СА 5 лет.

Подпись и дата

Имя № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя. №подл.

210-00-00 ПС

Лист

6

КОПИЯ
ВЕРНА

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа	Количество
1	2	3
1 Аппарат слуховой электронный цифровой триммерный воздушного звукопроводения заушного типа "БРИЗ-Т31SP", "БРИЗ-Т41SP", "БРИЗ-Т42SP"	210-00-00 210-00-00-01 210-00-00-02	1
Принадлежности		
2* Звукопровод № 1	180-06-00	1
3* Звукопровод № 2	180-06-00-01	1
4* Звукопровод № 3	180-06-00-02	1
6* Элемент питания 1,4В	Тип 675	2
7 Футляр	205-07-00	1
8 Коробка	126-00-14	1
Эксплуатационная документация		
12 Паспорт на СА	210-00-00 ПС	1

Примечание - По согласованию с потребителем, слуховой аппарат может комплектоваться позициями принадлежностей, отмеченными * в любом наборе.

в. Неподл.	Подпись и дата	Имя № докл	Взам. имя. №

3 Техническое описание

3.1 В СА окружающие звуки воспринимаются миниатюрным микрофоном, преобразуются им в электрические сигналы, которые затем усиливаются и подводятся к электромагнитному телефону, где вновь преобразуются в акустические сигналы, поступающие по системе звукопроводов в наружный слуховой проход пользователя.

3.2 Внешний вид СА" показан на рисунке 1

В СА предусмотрены два режима работы – от микрофона "М" и индукционной катушки "Т". Режим работы с индукционной катушкой применяется при пользовании телефонным аппаратом, либо при нахождении в помещении, оборудованном индукционной петлёй связи. В остальных случаях используется режим работы от микрофона.

В СА "БРИЗ-Т31SP" имеются плавные неоперативные регуляторы: регулятор тембра в области низких частот "N-H", регулятор тембра в области высоких частот "N-L" и автоматический регулятор усиления "AGC".

В СА "БРИЗ-Т41SP" имеются плавные неоперативные регуляторы: регулятор тембра в области низких частот "N-H", регулятор тембра в области высоких частот "N-L", автоматический регулятор усиления "AGC", регулятор выходного уровня звукового давления "PC".

В СА "БРИЗ-Т42SP" имеются плавные неоперативные регуляторы: регулятор тембра в области низких частот "N-H", регулятор тембра в области высоких частот "N-L", автоматический регулятор усиления "AGC" и неоперативный регулятор акустического усиления "G".

При подборе аппарата, в зависимости от индивидуальных потерь слуха, врач выставляет нужное положение неоперативных регуляторов. Самостоятельно этими регуляторами пользоваться не рекомендуется.

Внимание!

Обращайтесь с регулятором усиления СА бережно, без усилий, плавными движениями регулируя громкость.

Име. Метод.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Дата	210-00-00 ПС	Лист 8
-----	---------	-----	---------	---------	------	--------------	-----------

На поверхности корпуса СА имеются следующие переключатели:

- переключатель режима работы О-Т-М предназначен для включения – выключения слухового аппарата и выбора программы прослушивания с подключением телефонной катушки или микрофона;

- ♦ в положении О переключателя СА выключен;

- ♦ в положении М переключателя работает основная программа прослушивания с помощью микрофона. СА усиливает акустические сигналы (речь, музыка и другие звуки) принимаемые микрофоном;

- ♦ в положении Т переключателя работает программа прослушивания с помощью телефонной катушки. СА усиливает электромагнитные сигналы, принимаемые телефонной катушкой.

- выдвижной держатель элемента питания предназначен для установки элемента питания в СА;

- триммеры – регуляторы для настройки СА.


Примечание: Положение триммеров настраивается специалистом при слухопротезировании и отмечается на рисунке 3 СА

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

210-00-00 ПС


Лист

9

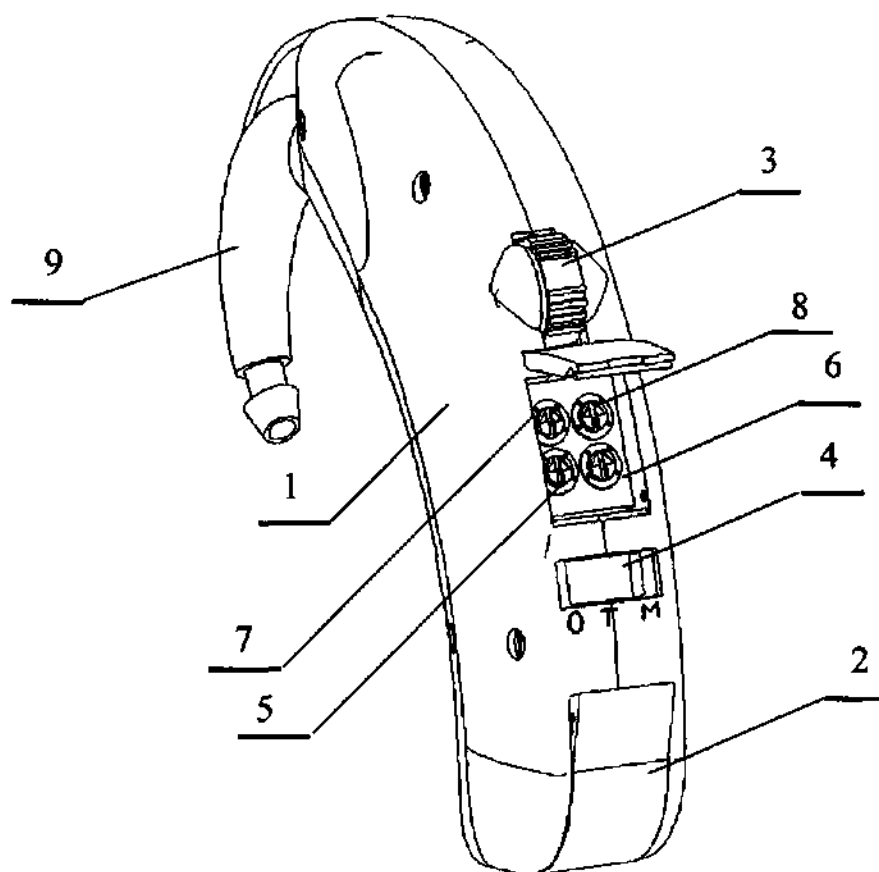

- 1 – корпус СА;
- 2 – выдвижной держатель элемента питания;
- 3 – регулятор усиления;
- 4 – переключатель "О-Т-М";
- 5 – регулятор тембра НЧ "N-H";
- 6 – регулятор тембра ВЧ "N-L";
- 7 – автоматический регулятор усиления AGC;
- 8 – регулятор выходного уровня звукового давления РС в СА "БРИЗ-Т41SP",
 – регулятор неоперативного акустического усиления G в СА "БРИЗ-Т42SP".
 – в СА "БРИЗ-Т31SP" отсутствует;
- 9 – звукопровод (крючок).

Рисунок 1 - Внешний вид СА

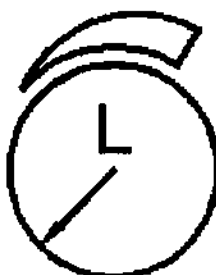

A – автоматический регулятор усиления "AGC";

P(G) – регулятор выходного уровня звукового давления "PC" или неоперативный регулятор акустического усиления "G";

H – регулятор тембра в области низких частот "N-H";

L – регулятор тембра в области высоких частот "N-L".

Рисунок 2 – Положение триммеров (регуляторов)
при настройке СА при слухопротезировании

Подпись и дата

Име № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

Ис. № подл.

4 Подготовка к работе

4.1 Установка или замена элемента питания.

4.1.1 Питание СА осуществляется от элемента питания- типа 675 или аналогичного.

4.1.2 Поместите элемент питания в выдвинутый из корпуса аппарата держатель так, чтобы знак "+", обозначенный на элементе питания, совпал со знаком "+" на держателе и задвиньте держатель в корпус аппарата.

4.1.3 Осторожно задвиньте держатель с элементом питания в корпус СА

Примечание – Осторожно обращайтесь с держателем элемента питания, не применяйте силу.

4.1.4 В случае разряда элемента питания , использованный элемент питания следует удалить и установить новый. После замены элемента питания может пройти некоторое время, прежде чем установленный элемент питания заработает в полную силу.

4.2 Установка ушного вкладыша

4.2.1 Из комплекта СА выберите гибкий звукопровод с ушным вкладышем такого размера, чтобы он плотно входил в слуховой проход уха. Свободный конец гибкого звукопровода оденьте на жесткий звукопровод (крючок) СА, предварительно укоротив длину трубки до необходимого размера.

Наденьте жесткий звукопровод (крючок) СА на ушную раковину, а СА разместите за ухом.

Ушной вкладыш звукопровода введите в слуховой проход уха.

При больших потерях слуха рекомендуется пользоваться индивидуальными ушными вкладышами, сделанными по слепку с ушной раковины и слухового прохода. Индивидуальные ушные вкладыши можно заказать на пунктах слухового протезирования.

ВНИМАНИЕ! При снятии (или установке) ушного вкладыша с СА, необходимо держать СА за жесткий звукопровод (крючок) для исключения механического повреждения корпуса.

инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

4.3 Подготовка СА к использованию

4.3.1 Предварительную настройку СА должен осуществлять специалист по слухопротезированию.

4.3.2 Регулировку громкости производите колесиком регулятора усиления 3 (рисунок 1), который имеет маркировку с цифрами от 1 до 4.

Минимальная громкость (вниз) соответствует цифре 1.

Максимальная громкость (вверх) соответствует цифре 4. Увеличивать громкость следует поворотом регулятора вверх; уменьшать – вниз.

При исправном СА, после установки регулятора усиления в положение максимального усиления, должен появиться характерный высокочастотный свист, который исчезает, если ушной вкладыш плотно прилегает к стенкам слухового прохода.

4.3.3 Установите регулятор усиления СА на минимальную громкость и поставьте выключатель аппарата в положение «М» (микрофон).

4.3.4 Поместите СА за ушной раковиной и вставьте ушной вкладыш плотно в наружный слуховой проход.

4.3.5 Установите регулятор усиления на наиболее благоприятный для Вас уровень громкости.

4.3.6 При разговоре по телефону установите переключатель режима работы в положение «Т». При необходимости, откорректируйте громкость принимаемых звуков с помощью регулятора усиления.

Имя и фамилия	Подпись и дата
Имя и фамилия	Имя и фамилия
Взам. инв. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	Подпись и дата
Имя и фамилия	Имя и фамилия

5 Использование СА

5.1 Рекомендации по использованию СА

5.1.1 Для эффективного использования СА необходимо некоторое время для привыкания к нему.

В течение первого месяца рекомендуется пользоваться СА дома, избегая шумных мест. Начинать тренировки следует с разговора с одним собеседником.

Попросите собеседника говорить медленно и правильно произносить слова. Старайтесь концентрировать внимание на тех звуках, которые хотите расслышать.

Следует научиться отделять звуки, которые Вы хотите расслышать, от всех остальных.

Во избежание утомления слуха в первые дни не рекомендуется пользоваться СА более получаса. Затем с каждым разом увеличивайте время ношения СА.

5.2 Прослушивание радио и телепередач

5.2.1 Слушать радио и телепередачи можно, установив с помощью кнопки 5, рисунок 2 акустическую программу прослушивания с помощью телефонной катушки.

Включив радио, послушайте передачу в течении 20 минут с СА. Расстояние до приемника или телевизора определите сами, установив регулятор усиления в СА по наиболее комфортному звучанию. Первые дни время прослушивания должно быть невелико.

5.3 Участие в групповой беседе

5.3.1 У многих пользователей СА возникают сложности при общении в большой группе людей. Эту проблему можно преодолеть, сокращая расстояние между собой и говорящим, а также концентрируя свое внимание на артикуляции и мимике собеседника. Старайтесь не слушать остальных и не стесняйтесь переспросить, если что не поняли.

Подпись и дата

Име № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. Непопл.

Регулярное пользование СА в различной обстановке улучшит способность слышать и получать от СА максимум возможного.

5.4 Посещение общественных мест

5.4.1 Многие кинотеатры, лекционные залы, театры оборудованы специальными устройствами, преобразующими звук в электромагнитные колебания. Переключите СА переключателем рода работ в положение "Т", что позволит четко воспринимать звук.

5.4.2 Находясь в общественных местах, располагайтесь в той части зала, где имеются наилучшие акустические условия, но не слишком близко к источнику звука. Обычно этим местом является середина зала.

5.5 Разговор по телефону

5.5.1 Переключите СА переключателем рода работ в положение "Т". При этом СА работает в режиме восприятия звуков, исходящих только от телефонной трубки.

5.5.2 Телефонную трубку следует держать около уха, на котором установлен слуховой аппарат, при этом не следует с силой прижимать телефонную трубку к уху. Попытайтесь найти такое положение телефонной трубки, при котором телефонный сигнал слышен достаточно громко и четко.

6 Техническое обслуживание

6.1 СА являются сложным электроакустическим устройством, поэтому техническое обслуживание и ремонт должны производиться специалистами ремонтных организаций.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВСКРЫВАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ СЛУХОВОГО АППАРАТА.**

6.2 Следует оберегать СА от механических повреждений, воздействия прямых солнечных лучей и сырости, высокой температуры и органических растворителей.

Примечание. Если СА берется в руки, держать его следует над мягкой поверхностью, чтобы не повредить, если уроните.

в. Неподл.	Подпись и дата	Име. Подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата

6.3 Не используйте СА в непосредственной близости от источников мощных излучений, чтобы не повредить СА. Маломощные излучения, например, мобильная связь, радиооборудование, сигнализация охраны систем не опасны для СА, но могут временно повлиять на качество звука, что не является дефектом.

6.4 Хранить СА следует вдали от обогревательных приборов и в местах, недоступных малолетним детям, а также домашним животным.

6.5 Выключайте СА, когда им не пользуетесь, а также при длительном хранении СА, вынимайте элемент питания из держателя элемента питания.

6.6 Не подвергайте СА воздействию повышенной влажности. Не допускайте попадания на корпус СА воды, лака для волос, одеколона и т.п. Снимайте при посещении бани, душа, парикмахерской.

6.7 Соблюдайте гигиену слухового прохода.

6.8 Содержите ушной вкладыш в чистоте. Для его дезинфекции и очистке пользуйтесь теплой, мыльной водой, предварительно сняв ушной вкладыш и трубку со СА. Прополощите его чистой водой и протрите насухо мягкой тряпочкой. Капли воды, попавшие внутрь ушного вкладыша или трубки, должны быть удалены продуванием. Перед присоединением ушного вкладыша и трубки к СА убедитесь, что они сухие. Если трубка стала жесткой или хрупкой, ее необходимо заменить.

6.9 СА следует протирать сухой мягкой хлопчатобумажной материей.

6.10 Если отверстие микрофона забьется грязью, работа слухового аппарата может ухудшиться. Для очистки отверстия необходимо обратиться к специалисту.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ ОТВЕРСТИЕ МИКРОФОНА САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.11 Если при работе СА возникают трудности, попробуйте устранить их самостоятельно, используя таблицу 4.

7 Простейшие неисправности и методы их устранения

7.1 Если при работе СА возникают простейшие неисправности, попробуйте их исправить самостоятельно, используя таблицу 4.

При более сложных неисправностях обращайтесь за технической помощью в организации по ремонту изделий медицинской техники.

Таблица 4

Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Устранение неисправности
Слабая слышимость.	Ручка регулятора усиления установлена на малую громкость.	Добейтесь нормальной громкости, поворачивая ручку регулятора усиления
	Засорился канал ушного вкладыша.	Прочистите канал ушного вкладыша.
Полностью отсутствует слышимость.	1 Аппарат не включен.	Включите аппарат с помощью выключателя питания.
	Неправильно вставлен элемент питания.	Вставьте элемент питания правильно.
Два коротких звуковых сигнала	Разрядился элемент питания	Замените элемент питания. Использованный элемент питания выбросите
При пользовании аппаратом слышен "свист".	Ушной вкладыш неплотно вставлен в слуховой проход.	Плотно вставьте ушной вкладыш в слуховой проход. При необходимости обратитесь на пункт слухового протезирования для подбора или изготовления индивидуального вкладыша.

Подпись и дата	
Име № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Исполн.	

3	07.08	26.508
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР	ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР	ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

210-00-00 ПС

Лист

17

8 Свидетельство о приемке

Аппарат слуховой электронный цифровой триммерный заушный
"БРИЗ-Т31SP", "БРИЗ-Т41SP", "БРИЗ-Т42SP"

(наименование изделия)

(обозначение)

заводской номер _____

соответствует ТУ 9444-005-93307926-2007

(номер стандарта или технических условий)

и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _____

М.П.

(личные подписи (оттиски личных клейм)
должностных лиц предприятия, ответственных
за приемку изделия)

Име. Неподл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

210-00-00 ПС

Лист

18

9 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого аппарата требованиям технических условий ТУ 9444-005-93307926-2007 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 1,5 года с момента отгрузки изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня продажи потребителю, но в пределах гарантийного срока хранения.

Продолжительность установленных гарантийных сроков не распространяется на источники питания.

При отказе или обнаружении неисправности аппарата в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть предъявлен, (оформленный торгующей организацией) гарантийный талон предприятию, осуществляющему гарантийное обслуживание изделий медицинской техники или заводу-изготовителю.

Гарантия не действует, если нарушен внешний вид пломбировки или установлен факт неправильной эксплуатации аппарата.

Имя, Подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя, № дубл	Подпись и дата
4	Зам	08 - 08	А-1	13.6.98
Имя	Подп.	№ докум	Подпись	Дата

210-00-00 ПС

Лист 19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение А

ОАО "завод "РИТМ" Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д.81.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срокаИзделие медицинской техники Аппарат слуховой
наименование и тип изделияэлектронный цифровой триммерный заушный"БРИЗ-Т31SP", "БРИЗ-Т41SP", "БРИЗ-Т42SP"ТУ 9444-005-93307926-2007

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____
заполняется заводом-изготовителемПриобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организацииВведен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятияПодпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

в. Неподл.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

"БРИЗ-Т31SP", "БРИЗ-Т41SP", "БРИЗ-Т42SP"

номер ГОСТ или ТУ

заполняется заводом-изготовителем

дата, подпись и штамп торгующей организации

дата, подпись

города

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Продолжение приложения А

ОАО "завод "РИТМ" Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д.81

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой
наименование и тип изделия

электронный цифровой триммерный заушный
"БРИЗ-Т31SP", "БРИЗ-Т41SP", "БРИЗ-Т42SP"

ТУ 9444-005-93307926-2007

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____
заполняется заводом-изготовителем

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Подпись и дата	Име № дубл	Взам. инв. №	Подпись и дата	№. Неопл.

210-00-00 ПС

Лист

22

Лист регистрации изменений

[illegible][illegible]

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 23 листов

Генеральный Горячев Г.Л.

директор

