

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭНДОПРОТЕЗОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УПАКОВКИ
СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ И СТЕРИЛИЗОВАТЬ

Хирургический инструмент CERAVER изготовлен в соответствии с международными стандартами из коррозионностойкой стали, обладающей, в большинстве случаев, магнитными свойствами.

На каждом инструменте, изготовленном из нержавеющей стали, могут появляться следы коррозии, пятна, повреждения, в случае, если не будут с ними обращаться с надлежащей старательностью и согласно указаниям.

Хирургический инструмент должен применяться исключительно по его назначению.

Чистка, стерилизация, хранение

Инструмент поставляется в нестерильном состоянии. Новый инструмент перед первой стерилизацией после извлечения из упаковки следует промыть. Стерилизация производится непосредственно перед использованием.

Немедленно после использования инструмент следует промыть теплой водой с применением пластмассовой щетки. Для ручной мойки нельзя пользоваться металлическими щетками и проволочными мочалками. В процессе мойки следует удалить всю кровь, ткани, осадок и жидкость. Для мойки следует пользоваться препаратами, предназначенными для мойки и дезинфекции, допущенными для применения в медицине. Эти препараты содержат добавки, замедляющие процесс коррозии. После мойки и споласкивания инструмент следует тщательно просушить. Инструмент, состоящий из нескольких элементов, для мойки и сушки следует разобрать. Петли и шарниры инструмента после каждой мойки и сушки, но перед стерилизацией, следует смазать маслом на основе парафина.

Согласно польской фармакопеи рекомендуется стерилизация водяным паром под давлением в автоклавах при температуре 121°C и избыточном давлении 1 ати в течение не менее 15 минут или при температуре 134°C и избыточном давлении 2 ати в течение не менее 10 минут (эти параметры следует считать минимальными), согласно процедурам и инструкциям по стерилизации.

Необходимо соблюдать правила эксплуатации всех устройств для мойки, дезинфекции и стерилизации, соблюдать температуру и продолжительность обработки.

Инструмент, после тщательной мойки и сушки, должен храниться при температуре 5 - 30°C и относительной влажности не более 70%.

Предупреждения

Инструмент следует применять в соответствии с хорошей врачебной практикой и по назначению, учитывая рекомендации и следующие предупреждения:

- перед тем, как начать операцию, следует убедиться в том, что приготовлен весь инструмент, необходимый для ее проведения, а также проверить, подходят ли друг другу подготовленные имплантаты и инструментарий;
- не допускается применение изношенного, деформированного, затупленного или поврежденного инструмента;
- ввиду наличия магнитных свойств следует учитывать воздействие электрического и электромагнитного поля;
- для сверления следует пользоваться тихоходной дрелью;
- не допускается нанесение ударов по инструменту или деталям инструмента, которые могут быть деформированы или повреждены;
- силы, прикладываемые при пользовании инструментом, должны соответствовать прочности и состоянию костей;
- перед завершением операции следует тщательно проверить, весь ли инструмент и его составные элементы удалены из операционного поля.

Инструментом можно пользоваться до момента, пока требуемые свойства позволяют достичь намеченной цели.

CERAVER предоставляет на инструмент 5-летний гарантийный срок. В течение этого срока фирма отремонтирует или заменит бесплатно любой поврежденный инструмент, применяемый с соблюдением указанных выше правил.

ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

NON STERILE

Сделано во Франции, маркировано Европейским Союзом