


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто Медикл Групп»

В.Ю. Задорожний

2011 г.

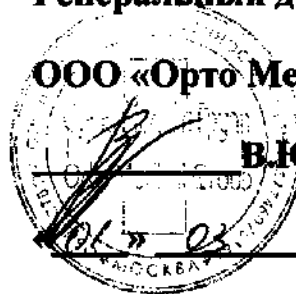

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

«Изделия протезно-ортопедические корректирующие»

1. Назначение изделий:

- защита деформированного сустава от давления и трения воспаленной суставной сумки первого плюснефалангового сустава;
 - амортизирует давление на деформированные суставы;
 - защищает деформированные суставы от трения.
 - амортизирует ударную нагрузку на стопу, суставы ног и позвоночник во время ходьбы;
 - опосредованно разгружает толчковые нагрузки на позвоночник.
 - коррекция большого пальца стопы при начальной и средней степени нефиксированного Hallux Valgus (отклонение первых пальцев наружу)
 - реабилитация после операции по поводу Hallux Valgus;
 - профилактика развития деформации суставов большого пальца;
 - восстанавливает тонус связок и мышц стопы.
 - коррекция поперечной распластанности стоп;
 - восстановление амортизирующей функции поперечного свода стопы при начальной и средней степени Hallux Valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы);
 - фиксация после травм и при деформациях плюснефаланговых суставов.
 - коррекция Hallux valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы);
 - фиксация деформированных молоткообразных пальцев;
 - восстановление формы сустава после операции по поводу Hallux Valgus.
 - коррекция положения деформированных пальцев стопы;
- разгрузка поперечного отдела стопы;
- фиксация деформированных молоткообразных и когтеобразных пальцев стоп в физиологическом положении.
- защищает деформированные суставы от трения.
- начальная степень Hallux valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы);
 - артрозо-артриты и бурситы первого плюснефалангового сустава;
 - мозоли и натоптыши в области первого плюснефалангового сустава;
 - деформация переднего отдела стопы при подагре;
 - послеоперационный период.

Мозоли, деформации и натоптыши на внешней стороне переднего отдела стопы;

- деформация пальцев стопы при подагре;
- послеоперационный период.
- защита от контакта с обувью.
- деформация пальцев стопы;
- воспаление суставов пальцев;
- травмы пальцев стопы.
- восстановление внешнего вида и формы при мозолях, потертостях, деформациях на пальцах ног;
- Используются при крючкообразных искривленных пальцах;
- снимают болевой синдром;
- снижают давление на пораженные участки.
- легкая фиксация голеностопного сустава;
- реабилитационный период лечения травм и заболеваний области голеностопного сустава;
- профилактика развития артритов, бурситов, тендовагинитов и других заболеваний;
- профилактика спортивных и производственных травм;
- защищает Ахиллово сухожилие от натирания, воспаления и мозолей;
- снижает болевой синдром.
- профилактика спортивных и производственных травм;
- защищает от давления, натертостей и болевого синдрома при занятиях спортом.
- амортизация ударной нагрузки на стопу;
- синдром диабетической стопы I и II степени;
- ревматоидный артрит с преимущественным поражением суставов стопы;
- предотвращают появление боли и дискомфорта на фоне сухости и трещин кожи на подошве стопы.
- эффективно поддерживает нормальную арочную форму переднего отдела стопы;
- нормализует анатомическое положение костей плюсны;
- уменьшает отек стопы;
- уменьшают ударную нагрузку на стопу, суставы ног и позвоночник во время ходьбы, опосредованно эффективно гасят импульсные нагрузки на позвоночник;

- защищают от появления болей и дискомфорта на фоне сухости и трещин кожи на подошве стопы, от болей в ногах и спине;
- повышают сопротивляемость к нагрузкам;
- снимают боль при пяточных шпорах;
- улучшают общее самочувствие.
- эффективно уменьшают ударную нагрузку на стопу во время ходьбы;
- предотвращают появление боли и дискомфорта на фоне сухости и трещин кожи на подошве стопы;
- снимают боль в плюсневом и пяточном отделах стопы, а также в коленях;
- предотвращают развитие натоптышей.
- травмы и деформации плюснефаланговых суставов;
- поперечная распластанность стоп;
- начальная и средняя степени Hallux valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы);
- натоптыши и мозоли в основании пальцев;
- силиконовый пелот защищает передний отдел стопы от ударных нагрузок;
- защищает от ощущения жжения при длительном стоянии, хождении и ношении обуви на высоком каблуке
- мозоли межфаланговых суставов;
- молоткообразные пальцы;
- перекрещивающиеся пальцы;
- когтеобразные пальцы;
- вросший ноготь;
- ампутации фаланг пальцев;
- профилактика образования мозолей и травмирования кончиков пальцев об обувь.
- пяточная шпора;
- предотвращают развитие костных мозолей и травм;
- защищает наcostницу, обеспечивает поддержку при занятиях спортом.
- защищает ложыжечную часть стопы от давления, натертостей и болевого синдрома при занятиях спортом;
- ампутационные культы фаланг пальцев.

2.Ортопедические приспособления для пальцев ног:

Защита суставов пальцев от трения об обувь и друг о друга при наличии деформации пальцев (молоткообразные пальцы, перекрещивающиеся пальцы, когтеобразные пальцы), а также омоволелостей в области междланговх суставов. Применяют изделия при подагре, отложении солей, артрозо-артритах и бурситах суставов пальцев. При начинающейся деформации пальцев изделия применяют для профилактики образования омоволелостей. Изделия надевают на палец, прикрывая наиболее трущееся или болезненное место.

Рекомендации по использованию:

- Применять не более 16 часов в день
- Не использовать при открытых и кровоточащих ранах
- Беречь от детей

Уход за изделием:

- Промыть изделие в слабом мыльном растворе без хлора
- Протереть мягкой тканью
- Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
- Обработать присыпкой

3.Ортопедические приспособления при HALLUX VALGUS (вальгусная деформация пальцев стоп):

Коррекция отклонения пальцев стопы (Hallux valgus) на фоне плоскостопия.

Изделия наиболее эффективно помогают во время сна, на фоне расслабленных мышц, регулярное применение приостанавливает дальнейшее отклонение, частично нормализует положение пальцев стопы и адаптирует тонус мышц и связок стопы к измененному положению пальца.

Рекомендации по использованию:

- Применять не более 16 часов в день
- Не использовать при открытых и кровоточащих ранах
- Беречь от детей

Уход за изделием:

- Промыть изделие в слабом мыльном растворе без хлора
- Протереть мягкой тканью
- Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
- Обработать присыпкой

4.Ортопедические приспособления для стопы переднего отдела:

- Изделие предназначено для лечения комбинированного и поперечного плоскостопия.

- восстанавливает форму поперечного свода стопы, нормализует анатомическое положение костей плюсны, улучшает периферическое кровообращение и уменьшает отек стопы.
- Пелот поперечного свода стяжки размещают в области поперечного свода, лентой обхватывают стопу и застегивают ее на подошве.
- Изделие носят в широкой уличной или домашней обуви на протяжении всего дня.

Назначение

- травмы и деформации плюснефаланговых суставов, поперечная распластанность стоп
- начальная и средняя степени Hallux valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы)
- натоптыши в основании пальцев
- после операций на плюснефаланговых суставах

Рекомендации по использованию:

- Применять не более 16 часов в день
- Не использовать при открытых и кровоточащих ранах
- Беречь от детей

Уход за изделием:

- Промыть изделие в слабом мыльном растворе без хлора
- Протереть мягкой тканью
- Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
- Обработать присыпкой

Преимущества

- легко одевается
- эффективно поддерживает нормальную арочную форму переднего отдела стопы в стандартной обуви

5. Ортопедические стельки, полустельки:

Описание

Сверхтонкие силиконовые стельки с двумя различными по плотности зонами. Идеальны для амортизации ударной нагрузки на стопу во время ходьбы, эффективно предотвращают боль и дискомфорт на фоне трещин кожи в подошвенной части стопы. Стельки применяют при начальной степени синдрома диабетической стопы и при ревматоидном артрите.

Силиконовые полустельки применяют во всех типах обуви. Изделие изготовлено из биологически инертного полимера, не вызывающего аллергических реакций, смягчающего кожу и уменьшающего потливость стоп.

Рекомендации по использованию:

- Применять не более 16 часов в день
- Не использовать при открытых и кровоточащих ранах
- Беречь от детей

Уход за изделием:

- Промыть изделие в слабом мыльном растворе без хлора
- Протереть мягкой тканью
- Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
- Обработать присыпкой

Назначение

- синдром диабетической стопы начальной степени
- трещины и сухость кожи подошвенной части стопы
-

6.Хранение и срок годности.

Хранить в сухом, чистом и вентилируемом месте, вдали от солнечного света и источников тепла. Срок хранения в нормальных условиях - от 3 до 5 лет.