

ООО «ОРТО-МЕД»

Юридический адрес: 454092, Челябинская область г. Челябинск, ул. Воровского 79

Фактический адрес: 454076, г. Челябинск ул. Аптечная ба. Тел./факс (351) 2606820

ОКПО 49105561 ЕГРПО 1027402930235 от 30.12.2002 ОГРН 1027402930235, ОКАТО 75401000000

ИНН 7451073396 БИК 047501602 КПП 745101001

Р/с 40702810772310000947 в Челябинском ОСБ 8597 г. Челябинска. К/с 30101810700000000602.

Имл: orto-med@mail.ru сайт: www.orto-med.ru

Руководство по эксплуатации изделия **Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке** **(массовое/серийное производство),**

Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке (далее - обувь) предназначена для полного или частичного восстановления опорно-двигательных функций стопы с помощью ортопедической обуви. Обувь имеет специальную форму и конструкцию и изготавливается для пациентов с умеренно выраженными деформациями, дефектами или функциональными недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Обувь имеет одну специальную мягкую или жесткую деталь или межстелечные слои и специальные детали низа или прочие специальные детали, наличие и конструкция которых обеспечивает профилактическое, фиксирующее и легкое корректирующее воздействие обуви на стопу.

Подбор обуви по размеру и полноте необходимо осуществлять с учетом индивидуальных особенностей стопы. При выборе необходимо обратить внимание на назначение обуви (повседневная, прогулочная, праздничная и т.п.).

Виды обуви - сапожки, полусапожки во всех половозрастных группах.

Обувь изготавливается в сезонных вариантах утепленная (на натуральном и искусственном меху). Материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, морозостойкие в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы

При эксплуатации обуви следует соблюдать следующие условия:

- После каждой носки обувь следует приводить в порядок.
- Сушить мокрую обувь необходимо при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов, источников тепла, открытого огня, предварительно набив ее смятой бумагой.
- При надевании обуви закрытого типа необходимо пользоваться обувным рожек, чтобы не деформировать пяточную часть.
- Одевать обувь следует на носок.
- Перед тем как снять обувь, ослабьте шнурки, «липучку» или ремешки, а затем придерживая руками, снимайте обувь.
- Нельзя снимать обувь, наступая на задник, — это приводит к порче обуви.
- Обувь с ремешками и резинками имеет специальные места для захвата и обувания, нельзя тянуть ее непосредственно за ремни и резинки.
- Необходимо бережно обращаться с декоративной фурнитурой, не перетягивать шнурки в районе голеностопного сустава во избежание разрыва кожи и крепления.
- Новую обувь из натуральной кожи следует почистить обувным кремом сразу после покупки, в дальнейшем обувь нужно чистить минимум раз в неделю. Внимательно выбирайте крем для чистки цветной обуви, во избежание изменения цвета обуви.
- Грязную обувь сначала следует очистить специальной щеткой, влажной тряпкой или губкой, не давая грязи впитаться в кожу. Лишь потом можно ухаживать за кожей.
- Сушить обувь нужно при комнатной температуре, предварительно набив ее скомканной газетной бумагой. Категорически запрещается использовать для сушки обуви нагревательные приборы.
- В случае если лицевой слой краски механически поврежден, нанесите на поврежденный участок тонкий слой краски соответствующего цвета, которые продаются в аэрозольной упаковке.
- Храните обувь в хорошо проветриваемом или вентилируемом месте.

Меры предосторожности

- Не подвергайте обувь воздействию активных растворителей, солей, кислот, щелочей чрезмерных механических нагрузок.
- При эксплуатации обуви учитывайте сезонность.
- Помните, кожаная обувь не предназначена для дождливой погоды.
- Не оставляйте на хранение обувь в грязном состоянии, так как это может стать причиной изменения цвета, а также привести к деформации обуви.
- Не рекомендуется ходить в обуви по гравию, щебню, поверхностям на которых имеется техническая соль.
- Не допускайте чрезмерных механических нагрузок, ударов, порезов, которые могут привести к стиранию и отрыву подошвы, фурнитуры.
- Не надевайте закрытую обувь на голую ногу, так как это не гигиенично и может стать причиной мозолей, дефектов кожи и мелких ран.
- Изменение цвета верха обуви при попадании воды не является дефектом.
- Не следует носить обувь из натуральной кожи в сырую дождливую погоду. Промокание обуви из натуральной не является причиной для обращения с претензией.
- Гарантийные сроки на сезонную обувь наступают с момента начала сезона.
- Не принимает претензии по качеству при несоблюдении правил эксплуатации транспортировки, хранения обуви, или обувь приобретена покупателем на подбор с нестандартной формой стопы.
- На детали, требующие мелкого ремонта и на стельки, шнурки, молнию, набойки фурнитуру (т.к. они являются сменными деталями) гарантия не распространяется.
- Обувь надлежащего исполнения изготовленная по индивидуальным меркам, обмену возврату не подлежит.

Гарантийный срок носки - 45 дней на детскую обувь, 70 дней на взрослую с подошвой из термоэластопласта со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Изменение размеров пациента, изменения назначения врача не являются основаниями для выполнения гарантийных обязательств по обуви.

Директор ООО «ОРТО-МЕД»



Крохалев В.Ю

Прошнуровано, пронумеровано

листов 2

Директор ООО "ОРТО-МЕД"

Крõхалев В.Ю.

