

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Пластырь от укачивания

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

как вспомогательное средство при болезненных состояниях для смягчения симптомов и профилактики головокружения, тошноты и рвоты в различных видах транспорта.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

круглой формы, диаметр 2 см

На поверхности пластыря не допускается наличие складок, микровключений.

Сопротивление отслаивания - в соответствии с требованиями РФ.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Запрещается использовать изделие на поврежденных участках кожи.

Запрещается использовать изделие, если:

- истёк допускаемый срок хранения изделия, указанный на упаковке,
- нарушена целостность упаковки
- при наличии аллергических реакций на любой из компонентов входящий в состав изделия

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:


1. вымыть руки перед использованием;
2. открыть упаковку с изделиями;
3. достать пластырь из упаковки;
4. удалить прозрачную защитную пленку;
5. плотно приклеить пластырь на кожу в области за ухом.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Хранение изделий - в сухих помещениях при комнатной температуре.
- При отсутствии нарушений упаковку вскрывают и содержащиеся в ней изделия используют по назначению.
- Изделия для одноразового использования.

- Не рекомендуется использовать беременным женщинам и детям до 6 лет, людям, страдающим эпилепсией, тяжелыми формами заболевания сердца, аллергией.
- Не использовать на поврежденных участках тела, а также при наличии индивидуальной непереносимости компонентов.
- В случае появления аллергических реакций следует немедленно прекратить использование и обратиться к врачу.

Генеральный директор
ООО «Пробонум»

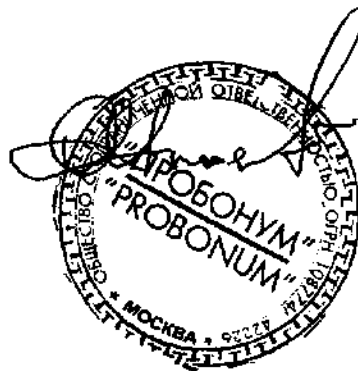

Дмоховский О.Ю.