



«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «СпецПак»

В.А. Романова

«21» ноября 2016 г.

МП

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПЕЦ.323151.001-01РЭ

**Пакеты одноразовые из полимерных материалов для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"**

по ТУ 9398 - 001- 26493106 – 2015

г. 2015

## Содержание

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>I. Описание и работа:</b>                    |               |
| 1.1. Назначение изделия.....                    | стр.3         |
| 1.2. Технические характеристики.....            | стр.3         |
| 1.3. Состав изделия.....                        | стр.6         |
| 1.4. Устройство и работа изделия.....           | стр.7         |
| 1.5. Маркировка.....                            | стр.7         |
| 1.6. Упаковка.....                              | стр.8         |
| <b>II. Показания к применению.....</b>          | <b>стр.8</b>  |
| <b>III. Противопоказания к применению.....</b>  | <b>стр.8</b>  |
| <b>IV. Использование по назначению:</b>         |               |
| 4.1. Эксплуатационные ограничения.....          | стр.9         |
| 4.2. Подготовка изделия к работе.....           | стр.9         |
| 4.3. Использование изделия.....                 | стр.9         |
| <b>V. Техническое обслуживание.....</b>         | <b>стр.10</b> |
| <b>VI. Хранение:</b>                            |               |
| 6.1. Условия хранения.....                      | стр.10        |
| 6.2. Гарантийные сроки хранения.....            | стр.10        |
| <b>VII. Транспортирование.....</b>              | <b>стр.11</b> |
| <b>VIII. Утилизация.....</b>                    | <b>стр.11</b> |
| <b>IX. Контактные данные производителя.....</b> | <b>стр.11</b> |
| <b>X. Лист регистрационных изменений.....</b>   | <b>стр.12</b> |

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на пакеты одноразовые из полимерных материалов для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов “А, Б, В, Г” (далее по тексту – пакеты) предназначены для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.

I. Описание и работа

1.1.Назначение изделия

Пакеты одноразовые из полимерных материалов для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов “А, Б, В, Г” (далее по тексту – пакеты) предназначены для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г, в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.

*Область применения:* широкого применения (предназначены для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г, в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур).

1.2. Технические характеристики

Основные технические характеристики пакетов представлены в таблице № 1.

Таблица № 1  
Основные параметры и характеристики пакетов

| Арт.     | Класс пакета<br>(цвет) | Габаритные<br>размеры пакета<br>ДхШ, мм | Толщи-<br>на<br>пакета,<br>мкм | Емкость<br>пакета, л | Макс.<br>масса<br>загрузки<br>пакета,<br>кг | Материал           | Кол-во<br>пакетов в<br>упаковке |
|----------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ПКА-1-15 | Кл. А (белый)          | 330*300                                 | 15                             | 5                    | 10                                          | ПНД марки 293-2853 | 6000 шт.                        |
| ПКА-1-20 |                        |                                         | 20                             |                      |                                             |                    |                                 |
| ПКА-2-15 |                        | 330*600                                 | 15                             | 15                   | 4000 шт.                                    |                    |                                 |
| ПКА-2-20 |                        |                                         | 20                             |                      |                                             |                    |                                 |
| ПКА-3-15 |                        | 500*600                                 | 15                             | 30                   | 15                                          |                    | 2500 шт.                        |
| ПКА-3-20 |                        |                                         | 20                             |                      |                                             |                    |                                 |
| ПКА-4-15 |                        | 600*1000                                | 15                             | 90                   | 20                                          |                    | 1500 шт.                        |
| ПКА-4-20 |                        |                                         | 20                             |                      |                                             |                    |                                 |
| ПКА-5-15 |                        | 700*800                                 | 15                             | 60                   |                                             |                    |                                 |

|            |                 |           |    |     |                    |          |
|------------|-----------------|-----------|----|-----|--------------------|----------|
| ПКА-5-20   |                 |           |    |     |                    |          |
| ПКА-6      |                 | 700*1100  | 20 | 120 |                    |          |
| ПКА-7-15   |                 | 700*900   | 15 |     |                    |          |
| ПКА-7-20   |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКА-8-15   |                 | 800*900   | 15 | 100 |                    | 1000 шт. |
| ПКА-8-20   |                 |           |    |     |                    |          |
| ПКА-9      |                 | 1000*1100 | 20 | 125 |                    |          |
| ПКА-10     |                 | 1000*1200 |    | 140 |                    |          |
| ПКА-1-15/1 | Кл. А (белый)   | 330*300   | 15 | 5   | 10                 | 6000 шт. |
| ПКА-1-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКА-2-15/1 |                 | 330*600   | 15 | 15  |                    | 4000 шт. |
| ПКА-2-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКА-3-15/1 |                 | 500*600   | 15 | 30  | 15                 | 2500 шт. |
| ПКА-3-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКА-4-15/1 |                 | 600*1000  | 15 | 90  | 20                 | 1500 шт. |
| ПКА-4-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКА-5-15/1 |                 | 700*800   | 15 | 60  |                    |          |
| ПКА-5-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКА-6/1    |                 | 700*1100  | 20 | 120 |                    |          |
| ПКА-7-15/1 |                 | 700*900   | 15 |     |                    |          |
| ПКА-7-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКА-8-15/1 |                 | 800*900   | 15 | 100 |                    | 1000 шт. |
| ПКА-8-20/1 |                 |           |    |     |                    |          |
| ПКА-9/1    |                 | 1000*1100 | 20 | 125 |                    |          |
| ПКА-10/1   |                 | 1000*1200 |    | 140 |                    |          |
| ПКБ-1-15   | Кл. Б (Желтый)  | 330*300   | 15 | 5   | 10                 | 6000 шт. |
| ПКБ-1-20   |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-2-15   |                 | 330*600   | 15 | 15  |                    | 4000 шт. |
| ПКБ-2-20   |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-3-15   |                 | 500*600   | 15 | 30  |                    | 2500 шт. |
| ПКБ-3-20   |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-4-15   |                 | 600*1000  | 15 | 90  |                    | 1500 шт. |
| ПКБ-4-20   |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-5-15   |                 | 700*800   | 15 | 60  |                    |          |
| ПКБ-5-20   |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-6      |                 | 700*1100  | 20 | 120 | ПНД марки 293-285Д | 800 шт.  |
| ПКБ-7-15   |                 | 700*900   | 15 |     |                    |          |
| ПКБ-7-20   |                 |           | 20 | 100 |                    |          |
| ПКБ-8-15   |                 | 800*900   | 15 |     |                    | 1000 шт  |
| ПКБ-8-20   |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-9      |                 | 1000*1100 | 20 | 125 |                    |          |
| ПКБ-10     |                 | 1000*1200 | 20 | 140 |                    |          |
| ПКБ-1-15/1 | Кл. Б (Желтый)  | 330*300   | 15 | 5   | 10                 | 6000 шт. |
| ПКБ-1-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-2-15/1 |                 | 330*600   | 15 | 15  |                    | 4000 шт. |
| ПКБ-2-20/2 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-3-15/1 |                 | 500*600   | 15 | 30  |                    | 2500 шт. |
| ПКБ-3-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-4-15/1 |                 | 600*1000  | 15 | 90  |                    | 1500 шт. |
| ПКБ-4-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-5-15/1 |                 | 700*800   | 15 | 60  | ПНД марки PE6148C  |          |
| ПКБ-5-20/1 |                 |           | 20 |     |                    |          |
| ПКБ-6/1    |                 | 700*1100  | 20 | 120 |                    | 800 шт.  |
| ПКБ-7-15/1 |                 | 700*900   | 15 |     |                    |          |
| ПКБ-7-20/1 |                 |           | 20 | 100 |                    |          |
| ПКБ-8-15/1 |                 | 800*900   | 15 |     |                    | 1000 шт  |
| ПКБ-8-20/1 |                 |           |    |     |                    |          |
| ПКБ-9/1    |                 | 1000*1100 | 20 | 125 |                    |          |
| ПКБ-10/1   |                 | 1000*1200 |    | 140 |                    |          |
| ПКВ-1-15   | Кл. В (Красный) | 330*300   | 15 | 5   | 10                 | 6000 шт. |

|            |                 |     |           |     |    |                     |          |          |     |          |
|------------|-----------------|-----|-----------|-----|----|---------------------|----------|----------|-----|----------|
| ПКВ-1-20   |                 |     | 20        |     |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-2-15   |                 |     | 15        |     |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-2-20   |                 |     | 330*600   | 20  |    |                     |          |          | 15  | 4000 шт. |
| ПКВ-3-15   |                 |     | 500*600   | 15  |    |                     |          |          | 30  | 2500 шт. |
| ПКВ-3-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-4-15   |                 |     | 600*1000  | 15  |    |                     |          |          | 90  | 1500 шт. |
| ПКВ-4-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-5-15   |                 |     | 700*800   | 15  |    |                     |          |          | 60  |          |
| ПКВ-5-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-6      |                 |     | 700*1100  | 20  |    |                     |          |          | 120 | 1000 шт  |
| ПКВ-7-15   |                 |     | 700*900   | 15  |    |                     |          |          | 100 |          |
| ПКВ-7-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-8-15   |                 |     | 800*900   | 15  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-8-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-9      |                 |     | 1000*1100 | 125 |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-10     |                 |     | 1000*1200 | 140 |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-1-15/1 | Кл. В (Красный) |     | 330*300   | 15  | 10 | ПНД марки РЕ6148С   | 6000 шт. |          |     |          |
| ПКВ-1-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     | 4000 шт. |          |     |          |
| ПКВ-2-15/1 |                 |     | 330*600   | 15  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-2-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-3-15/1 |                 |     | 500*600   | 15  |    |                     | 30       | 2500 шт. |     |          |
| ПКВ-3-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-4-15/1 |                 |     | 600*1000  | 15  |    |                     | 90       | 1500 шт. |     |          |
| ПКВ-4-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-5-15/1 |                 |     | 700*800   | 15  |    |                     | 60       |          |     |          |
| ПКВ-5-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-6/1    |                 |     | 700*1100  | 20  |    |                     | 120      | 1000 шт  |     |          |
| ПКВ-7-15/1 |                 |     | 700*900   | 15  |    |                     | 100      |          |     |          |
| ПКВ-7-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-8-15/1 |                 |     | 800*900   | 15  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-8-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-9/1    |                 |     | 1000*1100 | 125 |    |                     |          |          |     |          |
| ПКВ-10/1   | 1000*1200       | 140 |           |     |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-1-15   | Кл.Г (Черный)   |     | 330*300   | 15  | 10 | ПНД марки 293-28511 | 6000 шт. |          |     |          |
| ПКГ-1-20   |                 |     |           | 20  |    |                     | 4000 шт. |          |     |          |
| ПКГ-2-15   |                 |     | 330*600   | 15  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-2-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-3-15   |                 |     | 500*600   | 15  |    |                     | 30       | 2500 шт. |     |          |
| ПКГ-3-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-4-15   |                 |     | 600*1000  | 15  |    |                     | 90       | 1500 шт. |     |          |
| ПКГ-4-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-5-15   |                 |     | 700*800   | 15  |    |                     | 60       |          |     |          |
| ПКГ-5-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-6      |                 |     | 700*1100  | 20  |    |                     | 120      | 1000 шт  |     |          |
| ПКГ-7-15   |                 |     | 700*900   | 15  |    |                     | 100      |          |     |          |
| ПКГ-7-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-8-15   |                 |     | 800*900   | 15  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-8-20   |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-9      |                 |     | 1000*1100 | 125 |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-10     | 1000*1200       | 140 |           |     |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-1-15/1 | Кл.Г (Черный)   |     | 330*300   | 15  | 10 | ПНД марки РЕ6148С   | 6000 шт. |          |     |          |
| ПКГ-1-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     | 4000 шт. |          |     |          |
| ПКГ-2-15/1 |                 |     | 330*600   | 15  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-2-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-3-15/1 |                 |     | 500*600   | 15  |    |                     | 30       | 2500 шт. |     |          |
| ПКГ-3-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-4-15/1 |                 |     | 600*1000  | 15  |    |                     | 90       | 1500 шт. |     |          |
| ПКГ-4-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |
| ПКГ-5-15/1 |                 |     | 700*800   | 15  |    |                     | 60       |          |     |          |
| ПКГ-5-20/1 |                 |     |           | 20  |    |                     |          |          |     |          |

|            |           |     |     |    |         |
|------------|-----------|-----|-----|----|---------|
| ПКГ-6/1    | 700*1100  | 120 |     |    |         |
| ПКГ-7-15/1 | 700*900   | 15  |     |    |         |
| ПКГ-7-20/1 |           | 20  | 100 | 20 |         |
| ПКГ-8-15/1 | 800*900   | 15  |     |    | 1000 шт |
| ПКГ-8-20/1 |           | 20  |     |    |         |
| ПКГ-9/1    | 1000*1100 |     | 125 |    |         |
| ПКГ-10/1   | 1000*1200 |     | 140 | 10 |         |

Масса одного пакета не более 30 г

### 1.3. Состав изделия

Для изготовления пакетов применяют:

- ПНД марки 293-285Д производства ОАО "Казаньоргсинтез" по ТУ 2243-127-00203335-2000;
- ПНД марки РЕ6148С производства ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ТУ 2211-145-05766801-2008.

В таблице № 2 представлена комплектность изделия.

Таблица № 2

Комплектность изделия

| № п/п | Наименование                                                                               | Обозначение документа | Кол., шт.       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1     | Пакет для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Кл. А (белый)   | СПЕЦ.323151.001       | в пачке 100 шт. |
|       | Эксплуатационный документ                                                                  |                       |                 |
|       | Руководство по эксплуатации                                                                | СПЕЦ.323151.001-01РЭ  | 1               |
| 2     | Пакет для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Кл. Б (желтый)  | СПЕЦ.323151.002       | в пачке 100 шт. |
|       | Эксплуатационный документ                                                                  |                       |                 |
|       | Руководство по эксплуатации                                                                | СПЕЦ.323151.001-01РЭ  | 1               |
| 3     | Пакет для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Кл. В (красный) | СПЕЦ.323151.003       | в пачке 100 шт. |
|       | Эксплуатационный документ                                                                  |                       |                 |
|       | Руководство по эксплуатации                                                                | СПЕЦ.323151.001-01РЭ  | 1               |
| 4     | Пакет для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Кл. Г (черный)  | СПЕЦ.323151.004       | в пачке 100 шт. |
|       | Эксплуатационный документ                                                                  |                       |                 |
|       | Руководство по эксплуатации                                                                | СПЕЦ.323151.001-01РЭ  | 1               |

#### 1.4. Устройство и работа

Пакет представляет собой одноразовую, герметичную емкость установленного размера и цвета, устойчивую к климатическим и механическим воздействиям, возникающим в процессе транспортировки медицинских отходов.

Пакеты не оказывают вредного воздействия на человека, при использовании их в нормальных комнатных и атмосферных условиях (температура — от минус 20 °С до плюс 30°С, давление -760 мм рт.ст.)

#### 1.5. Маркировка

1.5.1. Маркировку наносят на ярлык, который наклеивают или вкладывают в каждую транспортную единицу (кипу, мешок или ящик) с упакованными пакетами:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны;
- товарный знак (при наличии);
- наименование, назначение, тип и размеры пакета;
- дату изготовления (месяц, год);
- срок хранения;
- обозначения настоящих технических условий;
- информацию о возможности утилизации пакетов после их использования;
- штриховой код (при наличии);
- знак обращения на рынке (№ и дата РУ по факту регистрации МИ);
- наименования и марки материала, из которого изготовлен пакет;
- количества пакетов в упаковке;
- надписи: «для медицинских отходов»;
- маркировки класса отходов.

1.5.2. Каждый пакет содержит маркировку:

- наименование, назначение и размер (объем) пакета;
- класс отходов;
- надписи: Название медицинского учреждения; Подразделение медицинского учреждения; Ответственное лицо; Дата сбора;
- Не превышать нагрузку 10 кг (для классов Б и В, для других классов согласно Таблице № 1);

- Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- Не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты (для классов Б и В);
- Не утрамбовывать отходы (для классов Б и В);
- После заполнения пакета, не более чем на 3/4, завязать пакет с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес;
- обозначения настоящих технических условий;
- обозначение размера и артикула пакета".

1.5.3. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

1.5.4. На транспортную упаковку наносят манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Беречь от влаги», «Крюками не брать», «Беречь от солнечных лучей».

## 1.6. Упаковка

- 1.6.1. Пакеты одного типа и размера, изготовленные из материала одной марки, укладываются в стопы в количестве, кратном 100 шт. в зависимости от класса и размера пакета (см. Таблицу № 1).
- 1.6.2. Стопы пакетов формируются в кипы, завертываются в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 или упаковываются в мешки из термосвариваемых пленок, которые заваривают и/или заклеивают лентой с липким слоем или укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.
- 1.6.3. Масса кипы, мешка или ящика не превышает 20 кг.
- 1.6.4. Кипы и ящики укладываются в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.
- 1.6.5. Допускается поставка пакетов в рулонах. Рулоны упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12302.
- 1.6.6. По согласованию с потребителем (заказчиком) допускаются другие способы упаковывания пакетов, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировании и хранении.

## II. Показания к применению

Пакеты не имеют медицинских показаний к применению.

### **III. Противопоказания к применению**

Пакеты не имеют медицинских противопоказаний к применению.

### **IV. Использование по назначению**

#### **4.1. Эксплуатационные ограничения**

- не подлежат использованию пакеты с нарушенной герметичностью;
- не превышать нагрузку 10 кг (для классов Б и В, для других классов согласно Таблице № 1);
- не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты (для классов Б и В);
- смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.
- не утрамбовывать отходы (для классов Б и В);
- после заполнения пакета, не более чем на 3/4, завязать пакет с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов.

В зависимости от класса, медицинские отходы должны помещаться в пакеты соответствующего цвета:

Класс А (белый) - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (ТБО).

Класс Б (желтый) - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В (красный) - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г (черный) - токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности.

#### **4.2. Подготовка изделия к использованию**

- извлечь пакет из упаковки, расправить;
- визуально проверить целостность/герметичность пакета;
- при необходимости закрепить на контейнере, либо на специализированных стойках. При размещении пакетов строго следовать маркировке класса отходов.

#### **4.3. Использование изделия**

Поместить отходы соответствующего класса в пакет.

Строго следовать нормативам заполнения и смены пакетов, установленных СанПиН 2.1.7.2790.

После заполнения пакета, завершении операции, либо смены, сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет

или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов.

Перемещение отходов за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.

Содержимое пакетов класса Б и В подлежит обязательному обеззараживанию. Обеззараживание должно осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 и внутренними нормативами медицинской организации.

При окончательной упаковке отходов класса Б и В для удаления их из подразделения (организации) пакеты с отходами класса Б и В маркируются надписью "Отходы. Класс Б", либо "Отходы. Класс В" с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости ("Отходы. Класс Г") в соответствии с требованиями нормативных документов (СанПиН 2.1.7.2790) в зависимости от класса опасности отходов. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

## **V. Техническое обслуживание**

Пакеты являются одноразовыми изделиями и технического обслуживания не требуют.

## **VI. Хранение**

### **6.1. Условия хранения**

Пакеты хранят в условиях, установленных для хранения полимерных изделий.

Кипы и ящики хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях.

Хранение пакетов, содержащих медицинские отходы должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790.

Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

### **6.2. Гарантийные сроки хранения**

Изготовитель гарантирует соответствие пакетов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок хранения пакетов из полимерных пленок - 6 мес.

По истечении гарантийного срока хранения перед применением пакеты проверяют на соответствие требованиям настоящих ТУ.

## **VI. Транспортирование**

6.1. Пакеты транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Условия транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3. Мешки, кипы, ящики с пакетами формируют в транспортные пакеты и транспортируют по ГОСТ 26663.

6.4. Кипы и ящики хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях.

Транспортирование пакетов, содержащих медицинские отходы должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790.

## **VII. Утилизация**

Пакеты, не подвергшиеся использованию по назначению, утилизируются вместе с бытовым мусором.

Утилизация пакетов, содержащих медицинские отходы должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790.

## **IX. Контактные данные**

Производитель: ООО "СпецПак"

Юридический адрес: 153043, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Калашникова, д.28К

Тел: +7(4932)93-94-43, 93-94-45

E-mail: [info@sptex.ru](mailto:info@sptex.ru)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| 1 | Номера страниц |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 1-12           | заменённых                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                | дополнительных                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                | исключённых                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                | изменённых                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 12             | Всего страниц после внесения изменения                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                | Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                | Подпись лица, внесшего изменения                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                | Фамилия этого лица и дата внесения изменения                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Романов В.А.  
21.11.2016 г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью: 12 (дважды 6) листа (ов)  
Директор  
ООО «СпецПак»  
В. А. Романов

