


62
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания ПрактикМед»

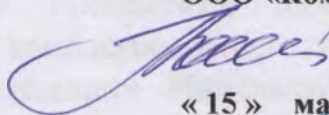

Ходак Я.В.

« 15 » марта 2012г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Гели для проведения УЗИ - исследований:

ECOULTRAGEL, ECG GEL, ECG CREAM

Производства: PIRRONE & Co. S.r.l. (ПИРРОНЕ энд Ко. С.р.Л.), 20139-Milano-Italy-Via
Balduccio da Pisa, 12, Италия, Tel (+39) 02.525397.1 Fax (+39) 02.57404077

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гель предназначен для проведения любых ультразвуковых диагностик и лечений, где необходимо наличие проводника между датчиком и участком исследования. Используется для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторингировании, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С точки зрения акустики подходит для всех частот, растворим в воде, не вызывает аллергии, не содержит соль, не раздражает кожу, не содержит разъедающее вещество и опасных ингредиентов, не оказывает разрушающего воздействия на датчик. Гель упакован в бутылки, не стерилизованный, густой, голубого цвета, не огнеопасен. Класс потенциального риска – 1. Среда pH = 6.0 – 7.0

Упакован:

Бутылка-260 гр., в коробке 35 или 56 шт.

Бутылка- 1000 гр., в коробке 24 шт.

Бутылка- 5000 гр., в коробке 4 шт.



3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Отсутствуют.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Откройте бутылку с гелем. Выдавите некоторое количество геля. Необходимое количество геля зависит от площади исследуемого участка. Закройте бутылку.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Избегать попадания в органы дыхания.

В случае попадания в глаза - тщательно промойте.

Избегать попадания на пораженные участки кожи.

После проведения исследований, сотрите с поверхности кожи и протрите влажной салфеткой или промойте водой.

Хранить при температуре ниже 40 С.

Не хранить рядом с нагревательными элементами.

Срок годности: неограничен

Индивидуальная непереносимость не выявлена.

[Handwritten signature]