

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплекты медицинские из нетканых материалов одноразовые стерильные «Снабпромед» по ТУ 9398-001-12989559-2012

НАЗНАЧЕНИЕ:

Комплекты медицинские из нетканых материалов одноразовые стерильные «Снабпромед» (далее – комплект), предназначены для предотвращения передачи возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и персоналом медицинских лечебных и профилактических учреждений, косметологических и процедурных кабинетов.

Варианты исполнения комплектов:

1. Комплект одежды и белья из нетканого материала хирургический, одноразовый, стерильный «Снабпромед» в составе:
 - халат хирургический «Евростандарт» – 1 шт.;
 - халат хирургический – 1 шт.;
 - халат процедурный – 1 шт.;
 - костюм хирургический (рубашка и брюки) – 1 шт.;
 - комбинезон – 1 шт.;
 - фартук – 1 шт.;
 - паруканники – 1 шт.;
 - накладка для пациента – 1 шт.;
 - бахилы низкие – 1 пара;
 - бахилы высокие – 1 пара;
 - шапочка «берет» - 1 шт.;
 - шапочка «колпак» - 1 шт.;
 - шапочка «шлем» - 1 шт.;
 - простыня хирургическая – 1 шт.;
 - завязка – 1 шт.;
 - салфетка – 1 шт.;
 - брюки процедурные для пациента – 1 шт.;
 - трусы процедурные – 1 шт.;
 - пододержательник – 1 шт.;
 - наволочка – 1 шт.;
 - чехол на матрац – 1 шт.;
 - рулон гигиенический - 1 шт.;
 - манжета – 1 пара.
2. Комплект белья акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный «Снабпромед» в составе:
 - простыня – 1 шт.;
 - простыня для кесарева сечения – 1 шт.;
 - простыня медицинская влагонепроницаемая разового пользования – 1 шт.;
 - салфетка – 1 шт.;
 - рубашка для роженицы – 1 шт.;

- бахилы высокие – 1 пара;
- бахилы низкие – 1 пара;
- шапочка «берет» - 1 шт.;
- грусы послеродовые – 1 шт.;
- прокладка гинекологическая – 1 шт.;
- пленка гигиеническая -1шт.

3. Комплект белья одноразового из нетканого материала для ограничения операционного поля одноразовый стерильный «Снабпромед» в составе:

- простыня на операционный стол – 1 шт.;
- простыня для абдоминальных и гинекологических операций – 1 шт.;
- простыня для операций абдоминально-промежностной области – 1 шт.;
- простыня для ангиографических операций – 1 шт.;
- простыня для артроскопических операций – 1 шт.;
- простыня для кесарева сечения – 1 шт.;
- простыня для кардиоваскулярных операций – 1 шт.;
- простыня для кардиоваскулярных операций с отверстием – 1 шт.;
- простыня для кардиоваскулярных операций с карманом – 1 шт.;
- простыня для операций с круглым отверстием – 1 шт.;
- простыня для операций с П-образным вырезом -1шт.;
- простыня для лапароскопических операций – 1 шт.;
- простыня для лапаротомических операций – 1 шт.;
- простыня для нейрохирургических операций – 1 шт.;
- простыня для операций на бедре – 1 шт.;
- простыня для операций на конечностях – 1 шт.;
- простыня для операций в травматологии и ортопедии – 1 шт.;
- простыня для офтальмологических операций – 1 шт.;
- простыня для трансвагинальных вмешательств – 1 шт.;
- простыня для урологических операций с мешком для сбора жидкостей – 1 шт.;
- карман-приемник – 1 шт.;
- салфетка – 1 шт.;
- держатель для трубок – 1 шт.;
- мешок для ног (с лентой) – 1 пара;
- бахилы низкие – 1 пара;
- чехол на инструментальный стол – 1 шт.;
- чехол для шнура и трубок – 1 шт.;
- чехол для аппаратуры – 1 шт.;
- чехол патологоанатомический – 1 шт.

4. Комплект белья и одежды одноразовый стерильный для операционных «Снабпромед» в составе:

- простыня – 1 шт.;
- простыня хирургическая – 1 шт.;
- простыня на операционный стол – 1 шт.;
- простыня для ограничения операционного поля для профильных операций – 1 шт.;
- карман-приемник – 1 шт.;
- салфетка – 1 шт.;
- держатель для трубок – 1 шт.;
- мешок для ног (с лентой) -1 пара;

- бахилы низкие – 1 пара;
- чехол – 1 шт.;
- халат хирургический – 1 шт.;
- костюм хирургический (рубашка и брюки) - 1 шт.;
- комбинезон – 1 шт.;
- фартук – 1 шт.;
- нарукавники – 1 шт.;
- брюки процедурные для пациента – 1 шт.;
- простыня – 1 шт.;
- салфетка – 1 шт.;
- полотенце – 1 шт.;
- чехол на инструментальный стол – 1 шт.

Комплект изготавливается из материала спанбонд (100% полипропилен).

АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. В санпропускнике операционного блока хирурги, операционные медсестры, анестезиологи и медсестры-анестезисты переодеваются в комплект хирургический, включающий костюм хирургический.
2. Затем персонал одевает бахилы, шапочку и входит непосредственно в операционный блок.
3. После обработки рук в предоперационной, операционная сестра в операционной одевает стерильный халат, маску и накрывает один общий стол для хирургического инструментария и один малый инструментальный. Малый инструментальный стол накрывается на каждую операцию.
4. Простыней одноразового использования укрывается операционный стол и накрывается пациент (2 простыни – меняются на каждой операции). В процессе укладки пациента могут использоваться разовые пеленки.
5. После обработки рук хирурги одеваются в разовые стерильные халаты и приступают к выполнению хирургических вмешательств.
6. После обработки операционного поля пациент укрывается одной специализированной простыней с вырезами, отверстиями и т.д., снабженных адгезивными краями, впитывающими зонами, карманами и т.д. Такой подход позволяет использовать одну одноразовую простыню вместо двух многоразовых и двух пеленок для укрытия пациента.
7. Смена хирургических халатов, простыней и пеленок на операционном столе, производится после каждой выполненной операции.
8. После окончания операций использованная одноразовая одежда собирается в специальную емкость, где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Изделия комплекта должны быть использованы один раз. Не допускается использовать стерильные изделия с повреждённой упаковкой. При вскрытии упаковки изделие должно быть немедленно использовано или утилизировано.

Перед использованием изделий необходимо убедиться в том, что срок хранения не закончился.

Утилизация комплектов осуществляется по СанПиН 2.1.7.2790, использованных – как отходов класса Б, неиспользованных (просроченных, непригодных для использования) – как отходов класса А.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения стерильных изделий – 3 года со дня стерилизации.

Директор ООО «Снабпромед»



Э.Х.Хусаинова

В данном документе

пронумеровано,

скреплено и

заверено печатью

4 листов

директор

Хусайнова Э.Х.

